

# 膝関節軟性装具

ゲニユ ディクサ ステージブル (8368)

可動域調整ができる2軸膝継手がついた、支持性の高いソフトニーブレース

- オープンデザイン： 前開きで着脱が簡単
- Click 2 Go システム： ツールなしで簡単に伸展および屈曲制限を調整可能
- 4本ストラップ： 最適なフィット感をサポート
- ジョイントバー： 装具内に収納され、スポーツの練習にも使用しやすい



可動域調整可能な  
2軸膝継手付ステー



# ゲニユ ディレクサ ステابل (8368) 使い勝手のいい2軸膝継手付ステー内蔵

## 幅広のアルミ支柱

内外側に内蔵のアルミ支柱は3cm幅と安定性があり、しっかりと膝関節をサポートし屈曲伸展を制限します。必要に応じて義肢装具士による調整も容易です。



## Click 2 Go システムでワンタッチ角度調整

Click 2 Go システムを採用し、工具不要で膝関節の可動域調整ができます。継手部分の角度調整チップは手で挿入することができ、「カチッ」という音が確認できるまで差し込めばOKです。チップの交換により、現場でも簡単に調整することができます。

下記の角度調整チップが付属します。

- 伸展制限チップ：0° / 10° / 20° / 30° / 45°
- 屈曲制限チップ：0° / 10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90°



### 伸展制限用 (E: Extension Stop)




### 屈曲制限用 (F: Flexion Stop)



## フロントオープンタイプ

前が開くフロントオープンタイプ。パテラの位置を確認しやすく、装着が容易です。

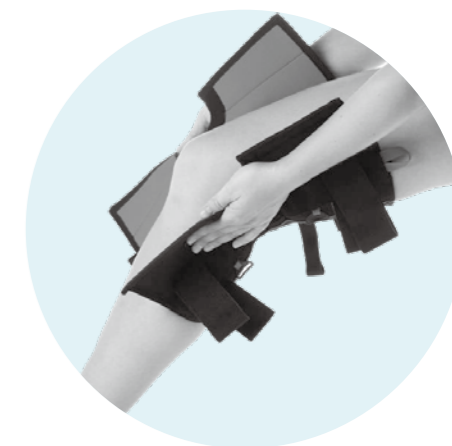

## 3層構造の通気性伸縮素材

しゃがみこみ動作もしやすく、日常生活をしっかりとサポートします。また通気性の良い素材ですので、長時間の装着にも優れています。

- 表生地: 伸縮/通気
- 芯材: 伸縮/コシ+通気
- 肌側生地: 肌触り向上+ズレ抑制



## ユーザーに合わせてられる後面のベルト

非伸縮性のベルトは、ユーザーに合わせて配置が可能です。

- 平行に留める：支持性強化
- 交差させて留める：反張膝へのアプローチ



# 適応

軽度から中等度の不安定性を伴う膝の痛み、伸展または屈曲を制限をする必要がある場合に膝関節をサポート

- 前 / 後十字靭帯 (ACL/PCL) 損傷後の保存療法
- 内外側副靭帯損傷後の保存療法
- 半月板損傷後の保存療法
- 膝蓋大腿症候群の保存療法
- 反張膝
- 関節リウマチ
- リハビリテーション時の使用 など


(適応症例は、海外で認可されたものです。適応については医師による診断が必要です。)

# サイズ

発注品番	サイズ	適用範囲	
		大腿周径(cm)	下腿周径(cm)
8368=XXS-7	XXS	36-40	29-32
8368=XS-7	XS	40-44	32-35
8368=S-7	S	44-48	35-38
8368=M-7	M	48-52	38-41
8368=L-7	L	52-56	41-44
8368=XL-7	XL	56-61	44-48
8368=XXL-7	XXL	61-67	48-51

### 《サイズの測り方》

イラストのように膝蓋骨から上下 15cm の大腿部、下腿部の周径を測ります。

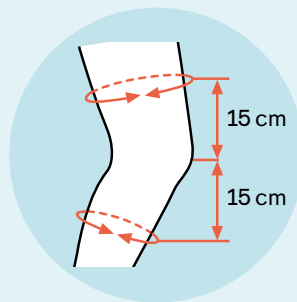

# オットーボック膝装具のバリエーション

製品名	ゲニューディレクサ	ゲニューディレクサステープル	ゲニューアレクサ	ゲニューインモバイル	ゲニューカレッツァパテラスタビライザー	パテラプロ
装具分類	軟性	軟性	硬性	硬性	軟性	軟性
製品番号	8353	8368	50K13	8060	8360	8320N
支持体	2軸フリーアルミステー	2軸角度調整付アルミステー	2軸角度調整付アルミ + プラスチックフレーム	アルミステー	-	単軸フリーフレキシブルプラスチックステー
可動域制限機能		◎	◎			
側方安定性	○	○	◎	◎		
膝関節の固定				◎		
フロントオープン	○	○		○		
膝蓋骨の保持					○	◎
膝蓋骨のアライメント調整						◎

### お問い合わせ先

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・本カタログ掲載の製品を使用される際には、必ず義肢装具士および医師が調整を行ってください。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本誌の内容は 2024 年 11 月現在のものです。

オットーボック・ジャパン株式会社  
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル4F  
TEL. 03-6739-4090 (代表) FAX. 03-6739-4097 www.ottobock.com/ja-jp