


膝関節軟性装具

ゲニユ ディレクサ ステーブル (8368)

可動域調整ができる2軸膝継手がついた、支持性の高いソフトニーブレース

- ・ オープンデザイン： 前開きで着脱が簡単
- ・ Click 2 Go システム： ツールなしで簡単に伸展および屈曲制限を調整可能
- ・ 4本ストラップ： 最適なフィット感をサポート
- ・ ジョイントバー： 装具内に収納され、スポーツの練習にも使用しやすい

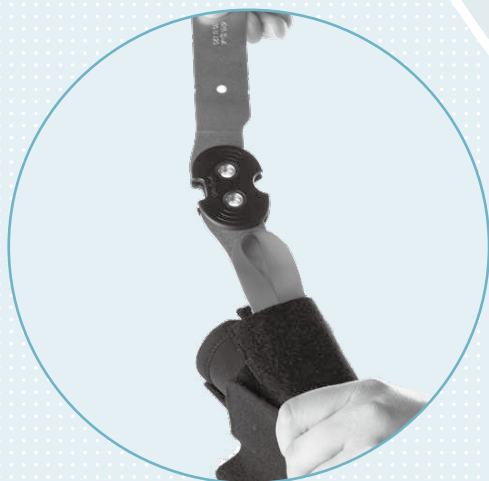

可動域調整可能な
2軸膝継手付ステー



Quality for life

ゲニュー ディレクサ ステーブル (8368) 使い勝手のいい 2 軸膝継手付ステー内蔵

幅広のアルミ支柱

内外側に内蔵のアルミ支柱は 3cm 幅と安定性があり、しっかりと膝関節をサポートし屈曲伸展を制限します。必要に応じて義肢装具士による調整も容易です。



Click 2 Go システムでワンタッチ角度調整

Click 2 Go システムを採用し、工具不要で膝関節の可動域調整ができます。継手部分の角度調整チップは手で挿入することができ、「カチッ」という音が確認できるまで差し込めば OK です。チップの交換により、現場でも簡単に調整することができます。

下記の角度調整チップが付属します。

- ・ 伸展制限チップ：0° / 10° / 20° / 30° / 45°
- ・ 屈曲制限チップ：0° / 10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90°



伸展制限用 (E : Extension Stop)



屈曲制限用 (F : Flexion Stop)




フロントオープンタイプ

前が開くフロントオープンタイプ。パテラの位置を確認しやすく、装着が容易です。



3 層構造の通気性伸縮素材

しゃがみこみ動作もしやすく、日常生活をしっかりとサポートします。また通気性の良い素材ですので、長時間の装着にも優れています。

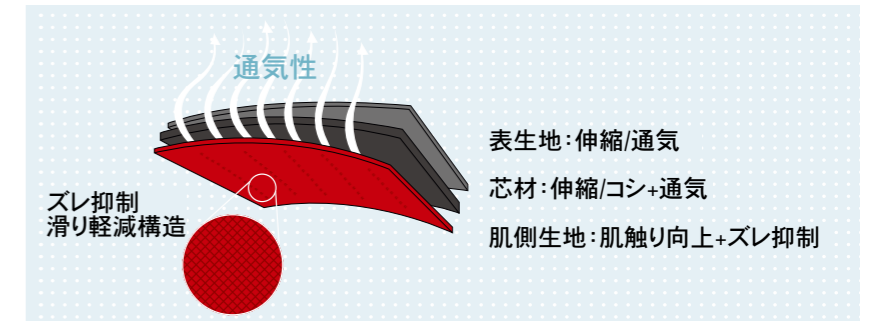

ユーザーに合わせてられる後面のベルト

非伸縮性のベルトは、ユーザーに合わせて配置が可能です。

- 平行に留める：支持性強化
- 交差させて留める：反張膝へのアプローチ



適応

軽度から中等度の不安定性を伴う膝の痛み、伸展または屈曲を制限をする必要がある場合に膝関節をサポート


- ・前/後十字靭帯 (ACL/PCL) 損傷後の保存療法
- ・内外側側副靭帯損傷後の保存療法
- ・半月板損傷後の保存療法
- ・膝蓋大腿症候群の保存療法
- ・反張膝
- ・関節リウマチ
- ・リハビリテーション時の使用 など

(適応症例は、海外で認可されたものです。適応については医師による診断が必要です。)

サイズ

発注品番	サイズ	適用範囲	
		大腿周径(cm)	下腿周径(cm)
8368=XXS-7	XXS	36-40	29-32
8368=XS-7	XS	40-44	32-35
8368=S-7	S	44-48	35-38
8368=M-7	M	48-52	38-41
8368=L-7	L	52-56	41-44
8368=XL-7	XL	56-61	44-48
8368=XXL-7	XXL	61-67	48-51

《サイズの測り方》
イラストのように膝蓋骨から上下15cmの大腿部、
下腿部の周径を測ります。

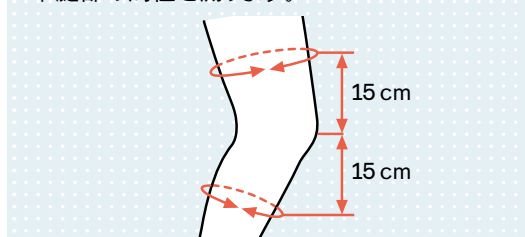

オットーボック膝装具のバリエーション

製品名	ゲニュー ディレクサ	ゲニュー ディレクサ ステーブル	ゲニュー アレクサ	ゲニュー インモビル	ゲニュー カレッツァ パテラ スタビライザー	パテラ プロ
装具分類	軟性	軟性	硬性	固定	軟性	軟性
製品番号	8353	8368	50K13	8060	8360	8320N
支持体	2軸フリー アルミステー	2軸角度調整付 アルミステー	2軸角度調整付 アルミ + プラスチックフレーム	アルミステー	—	2軸フリー フレキシブル プラスチックステー
可動域制限機能		◎	◎			
側方安定性	○	○	◎	◎		
膝関節の固定				◎		
フロントオープン	○	○		○		
膝蓋骨の保持					○	◎
膝蓋骨のアライメント調整						◎

お問い合わせ先

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・本カタログ掲載の製品を使用される際には、必ず義肢装具士および医師が調整を行ってください。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本誌の内容は2020年11月現在のものです。

オットーボック・ジャパン株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-4-44 横河ビル 8F
www.ottobock.co.jp TEL 03-3798-2111 (代表) FAX 03-3798-2112