


ottobock.

Sensa Line bandáže

Podporují každý pohyb

Hradené zdravotními poistovňami

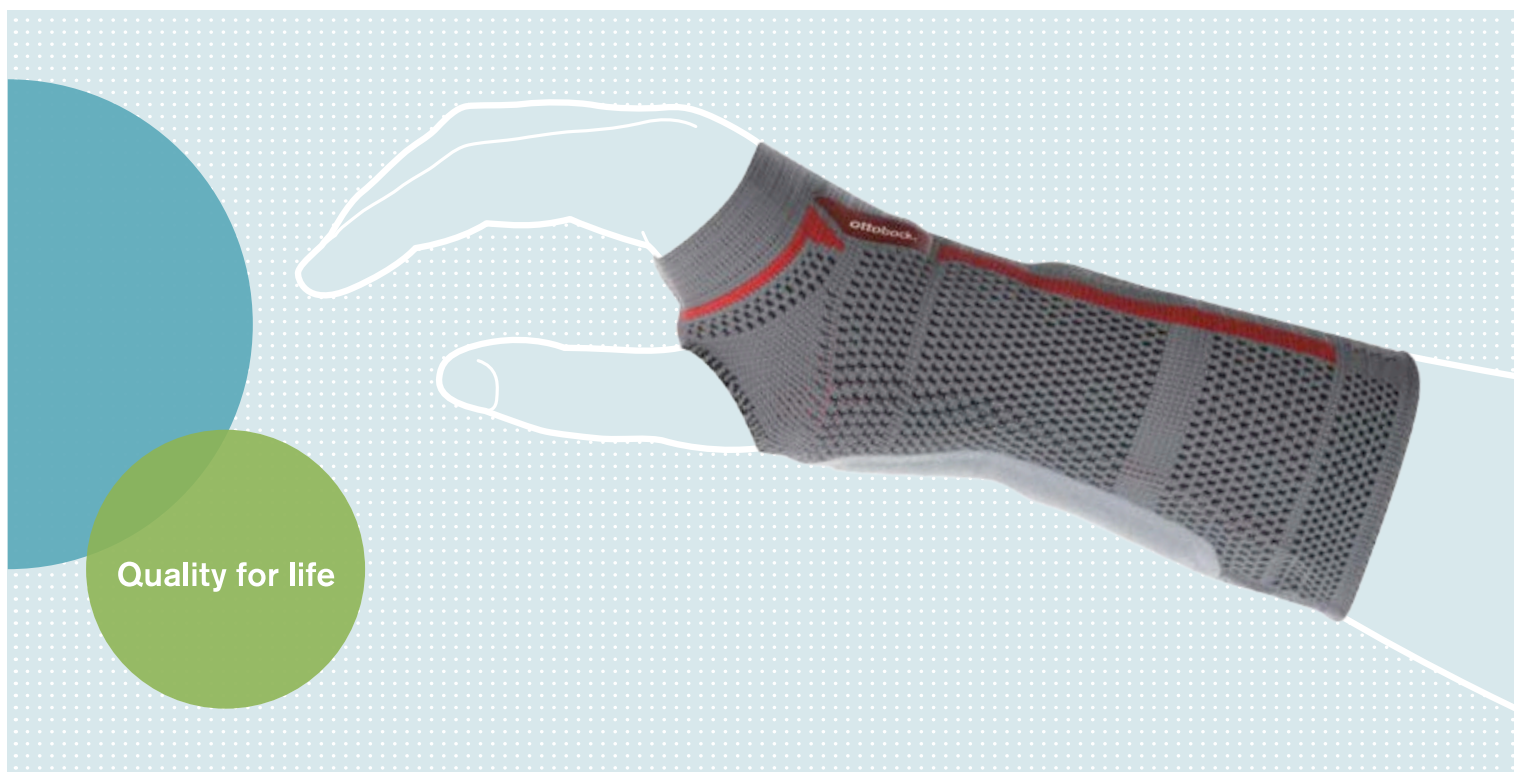

Sensa Line aktívne bandáže

Prednosti, ktoré presvedčia

Hodí sa v každej situácii:

Chcete si chrániť telo v bežnom dni aj pri športe, a napriek tomu zostať pohyblivý? Nato je niekedy potrebná cieleňá podpora. Aktívny a pohyblivý zostanete s aktívnymi inovovanými bandážami Sensa Line, ktoré pri pohybe a záťaži poskytujú istotu a dá sa na ne spoľahnúť bez toho, aby vás príliš sťahovali. Podporujú proces hojenia a pomáhajú zmierňovať bolesti.

Hodí sa na akúkoľvek časť tela:

Nezáleží na tom, či potrebujete podporu na svoju ruku, koleno, členkový kĺb, chrbticu alebo lakeť. Rad Sensa Line ponúka vhodné bandáže na akúkoľvek časť tela. Aktívne bandáže presvedčia vďaka svojmu perfektnému tvaru a výbornej znášanlivosti na pokožke. Antibakteriálne vlákno integrované do tkaniny efektívne znižuje rozmnožovanie baktérií a tým aj vznik zápachu.

Naše bandáže neobsahujú prírodný latex a dajú sa prať v práčke pri teplote 30°. Antibakteriálny účinok sa zachováva aj po viacnásobnom vypraní.




„Z pohybu mám
jednoducho znova
radosť – vďaka
bandáži Genu Sensa.“

Prednosti produktovej rady Sensa Line :


Podopiera presne tam, kde je to potrebné

3D úpletová tkanina umožňuje kopírovať tvar tela a špecificky prebiehajúce kompresné zóny.

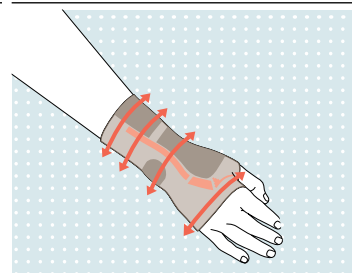


Nesťahuje

Elastické okraje bránia sťahovaniu a tvorbe vzduchových bublín.

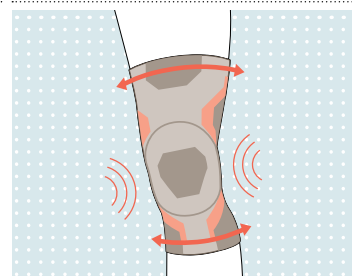


Postihnuté oblasti sa jemne masírujú

Peloty z technogélu sú veľmi mäkké, elastické a trvalo stabilné. Tieto mimoriadne vlastnosti technogélu poskytujú účinnú tlakovú masáž postihnutých oblastí.

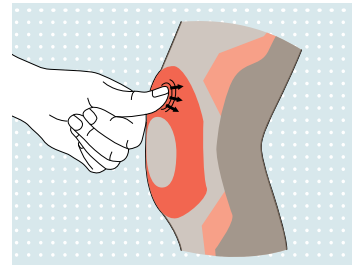


Antibakteriálna, zabraňujúca pachu, príjemná na pokožku

Výborne sa nosí a na pokožku je príjemná vďaka integrovanému antibakteriálnemu vláknu, ktoré značne znižuje rozmnožovanie baktérií a vznik nepríjemného zápachu.

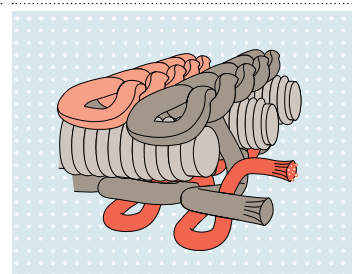

Priedušná

Elastické funkčné vlákno cez svoj povrch nasáva vlhkosť a transportuje ju na povrch úpletu, odkiaľ sa rýchlo vyparí.

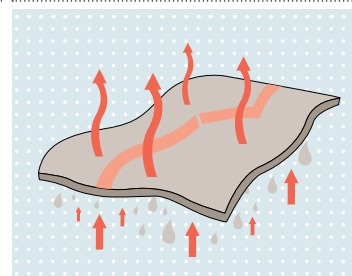

Kolenná bandáž Genu Sensa

Odlahčuje a stabilizuje koleno

Kód ŠÚKL : J78513

Genu Sensa stabilizuje koleno, odľahčuje kĺb, podporuje jeho funkciu a zmierňuje bolesti. Inovované, integrované antibakteriálne vlákno poskytuje optimálnu hygienu a obzvlášť príjemný pocit z nosenia. Genu Sensa sa dá nosiť obojstranne.

Genu Sensa pomáha pri nasledujúcich ťažkostiach


- pocit nestability
- podráždenie po operácii a zranení
- chronické stavy podráždenia
- kĺbové výrony a opuchy, napr. pri opotrebovaní kolenného kĺbu (artróza) alebo pri zápale kolenného kĺbu (artritída)
- začínajúce opotrebovanie kolenného (gonartróza)
- záťažou podmienená bolesť kolena pri podráždení mäkkých tkanív (tendomyopatie, ligamentóza úponov)


Takto pôsobí Genu Sensa

- stabilizuje a odľahčuje koleno
- zlepšuje funkciu kolena a zmierňuje bolesti
- povzbudzuje prekrvovanie
- podporuje regresiu opuchov a výronov

Tabuľka veľkostí Genu Sensa 50K15


Veľkosť	Obvod predkolena A (cm)	Obvod stehna B (cm)	V-MAX Obvod B (cm)
XXS	25 – 28	35 – 38	–
XS	28 – 31	38 – 41	–
S	31 – 34	41 – 44	–
M	34 – 37	44 – 47	47–50
L	37 – 40	47 – 50	50–53
XL	40 – 43	50 – 53	53–56
XXL	43 – 46	53 – 56	56–59

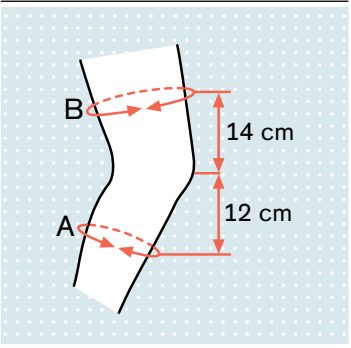

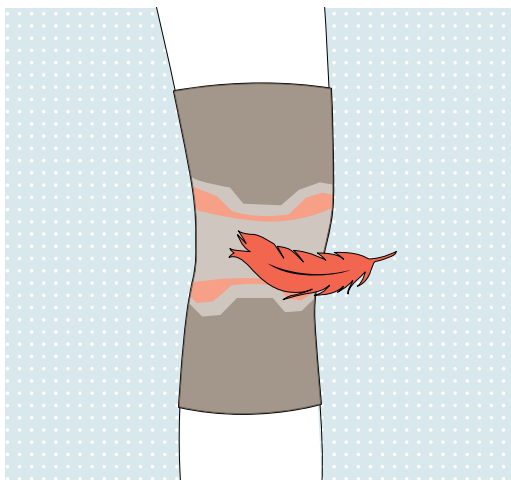

• **Veľmi mäkký:**

Tento úplet, ktorý bol vyvinutý a patentovaný špeciálne na oblasť podkolenia, je veľmi mäkký a elastický.

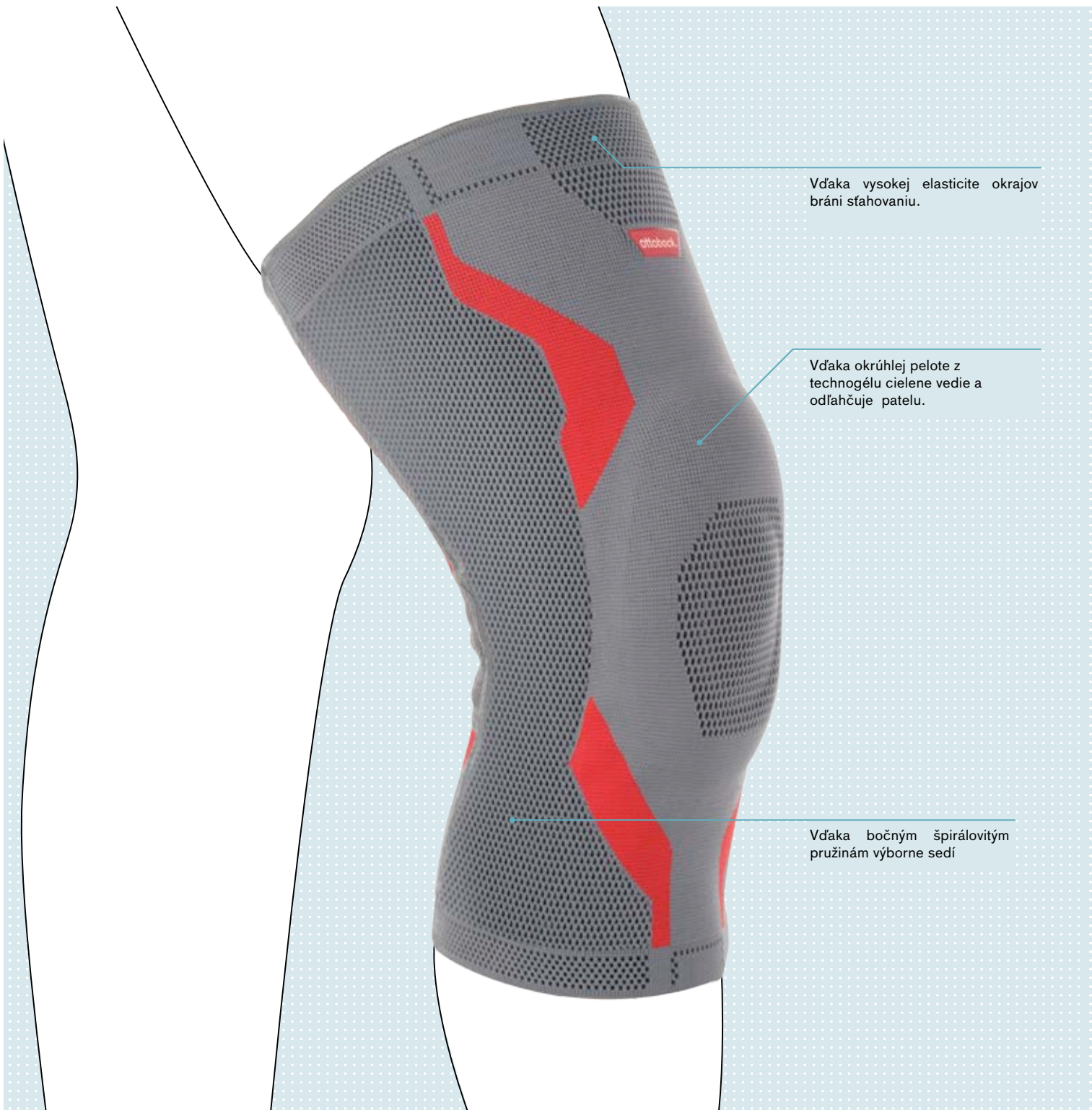

Bandáž členkového kĺbu

Malleo Sensa

Stabilizuje členkový kĺb

Kód ŠÚKL : J81773

Malleo Sensa bandáž členkového kĺbu po zranení alebo zápale ponúka potrebnú istotu. Zmierňuje bolesti a stabilizuje pri súčasne neobmedzenej voľnosti pohybu. Vďaka svojmu dobrému tvaru sa dá pohodlne nosiť v topánke.

Malleo Sensa pomáha pri nasledujúcich ťažkostiach


- pocit nestability
- stavy podráždenia po operácii a zranení
- chronické stavy podráždenia
- kĺbové výrony a opuchy (napr. pri artróze a artritíde)
- podráždenie mäkkého tkaniva (tendomyopatie)
- slabosť väziva


Takto pôsobí Malleo Sensa

- stabilizuje členkový kĺb
- zlepšuje prekrvovanie a funkciu kolena
- podporuje regresiu opuchov a výronov
- zmierňuje bolesti

Tabuľka veľkostí Malleo Sensa 50S5

Strana	Veľkosť	Obvod (cm)
Ľ/P	XS	17–19
Ľ/P	S	19–21
Ľ/P	M	21–23
Ľ/P	L	23–25
Ľ/P	XL	25–27
Ľ/P	XXL	27–29

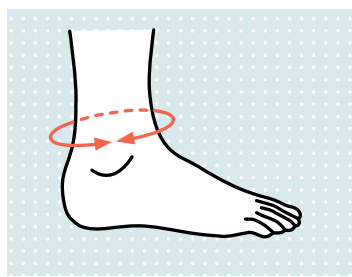

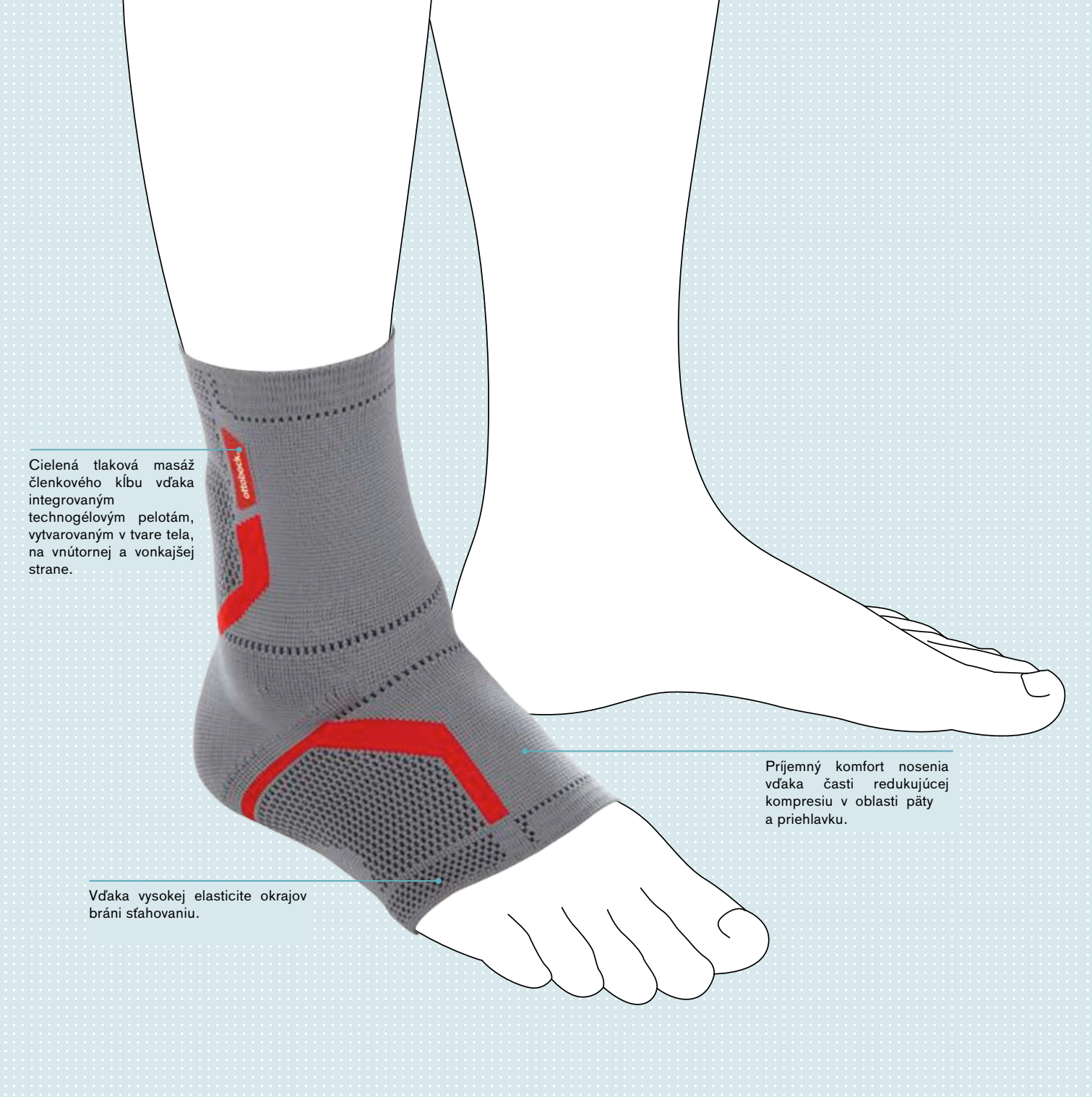

Cielená tlaková masáž členkového kĺbu vďaka integrovaným technogélovým pelotám, vytvarovaným v tvare tela, na vnútornej a vonkajšej strane.

Vďaka vysokej elasticite okrajov bráni sťahovaniu.

Príjemný komfort nosenia vďaka časti redukujúcej kompresiu v oblasti päty a priehlavku.

Bandáž Achilovej šľachy

Achillo Sensa

Stabilizuje a aktivizuje svalstvo

Achillo Sensa v kombinácii s pätným klinom odľahčuje Achilovú šľachu. Pritom podporuje senzomotoriku, a tým aktivizuje svalovú stabilizáciu.

Achillo Sensa pomáha pri nasledujúcich ťažkostiach


- pooperačné a postraumatické stavy podráždenia
- achilodýnia
- doliečovanie natrhnutia Achilovej šľachy


Takto pôsobí Achillo Sensa

- odľahčuje Achilovú šľachu
- zlepšuje prekrvovanie
- aktivizuje svalovú stabilizáciu
- podporuje regresiu opuchov a výronov

Tabuľka veľkostí Achillo Sensa 50S6

Strana	Veľkosť	Obvod (cm)
L/P	XS	17–19
L/P	S	19–21
L/P	M	21–23
L/P	L	23–25
L/P	XL	25–27

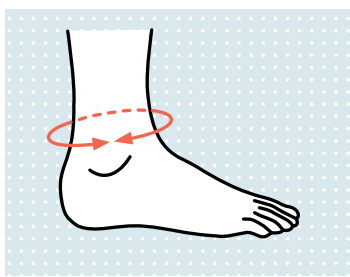



Rovnomerná tlaková masáž
Achilovej šľachy vďaka
pelotám so stabilným
tvárom v tvare motýľa.

Pätňý klin z technogélu
na optimálnu podporu
Achilovej šľachy.

Príjemný komfort nosenia
vďaka časti redukujúcej
kompresiu v oblasti päty
a priehlavku.

Bandáž drierkovej chrbtice Lumbo Sensa

Odláhčuje drierkovú chrbticu

Kód ŠÚKL : J81774

Chrbtová bandáž Lumbo Sensa odláhčuje drierkovú chrbticu a podporuje správne držanie tela. Kľče sa citeľne uvoľnia a bolesti sa účinne zmiernia. Bandáž dostať v rovnom vyhotovení aj vo vyhotovení so zúženým pásom.

Lumbo Sensa pomáha pri nasledujúcich ťažkostiach


- bolesti v oblasti drierkovej chrbtice (lumbálny syndróm, lumbalgia)
- bolesti chrbta s vystreľovaním do nohy (pseudoradikulárna lumboischialgia)
- slabosť chrbtového svalstva v oblasti drierkovej chrbtice (svalová nerovnováha)
- prejavy opotrebovania drierkovej chrbtice (napr. osteochondróza, spondylartróza, Facetov syndróm)
- podráždenie krížovo-drierkového kĺbu (sakroiliakálny kĺb)

Takto pôsobí Lumbo Sensa

- podporuje anatomicky správne držanie tela
- odláhčuje drierkovú chrbticu
- vďaka masážnej, priedušnej pelote podporuje prekrvovanie a funkciu svalov
- citeľne uvoľňuje kľče
- zmierňuje bolesti

Tabuľka veľkostí Lumbo Sensa 50R10 / Lumbo Sensa Women 50R11

Veľkosť	Obvod (cm)
XS	70–80
S	80–90
M	90–100
L	100–110
XL	110–120
XXL	120–130

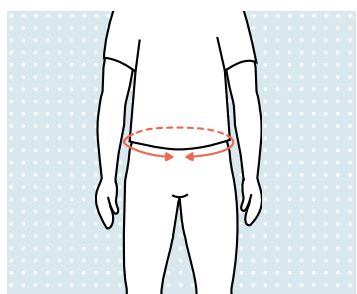



• **Masážny účinok:**

Priedušná pelota jemne masíruje oblasť driekovej chrbtice, pričom sa povzbudzuje prekrvovanie, podporuje sa funkcia svalov a uvoľnia sa kŕče.

Vďaka vysokej elasticite okrajov bráni stahovaniu

Vďaka plynulo nastaviteľnému uzáverom s veľkými vreckami sa pohodlne zakladá



Lakťová bandáž Epi Sensa

Stabilizuje lakťový kĺb

Kód ŠÚKL : J81787

Lakťová bandáž Epi Sensa stimuluje prekrvovanie a podporuje resorpciu opuchov a výronov. Súčasne zlepšuje funkciu lakťového kĺbu a zmierňuje bolesti.

Epi Sensa pomáha pri nasledujúcich ťažkostiach


- tenisový/golfový lakeť (Epicondylitis humeri radialis/ulnaris)
- stavy podráždenia (pooperačné, posttraumatické a chronické)
- kĺbové výrony a opuchy (napr. pri artróze alebo artritíde)
- podráždenia mäkkých tkanív (tendomyopatie) a iné ochorenia mäkkých tkanív


Takto pôsobí Epi Sensa

- komprimuje a stabilizuje lakťový kĺb
- zlepšuje funkciu lakťového kĺbu
- podporuje resorpciu opuchov a výronov
- zmierňuje bolesti

Tabuľka veľkostí Epi Sensa 50A7

Veľkosť	Obvod (cm)
XS	17–19
S	19–21
M	21–23
L	23–25,5
XL	25,5–28
XXL	28–31

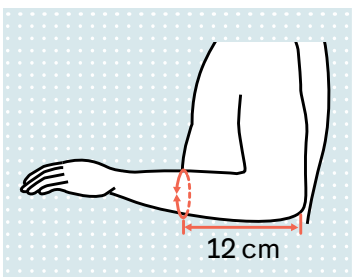

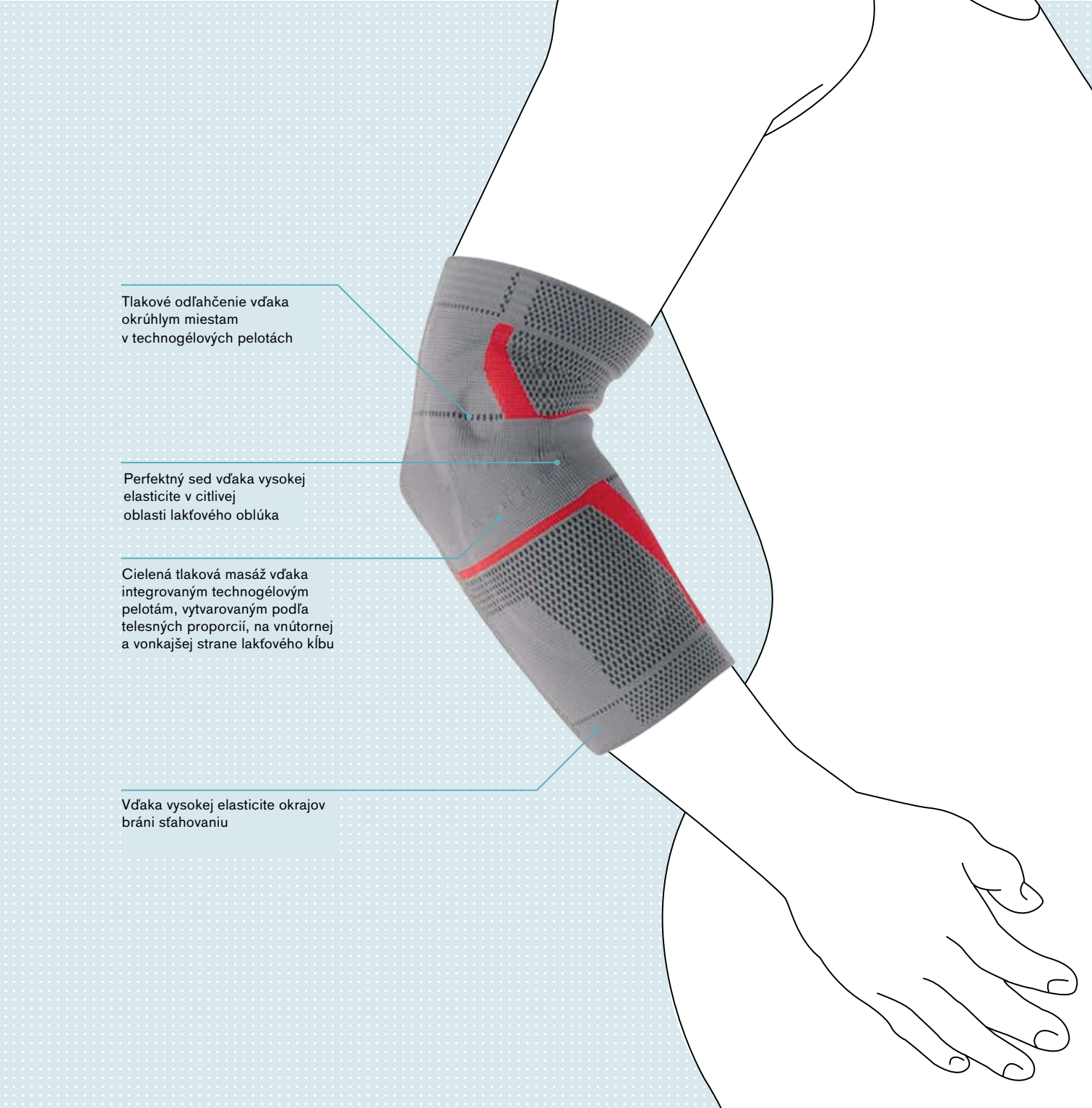

Tlakové odľahčenie vďaka okrúhlym miestam v technogélových pelotách

Perfektný sed vďaka vysokej elasticite v citlivej oblasti lakťového oblúka

Cielená tlaková masáž vďaka integrovaným technogélovým pelotám, vytvarovaným podľa telesných proporcií, na vnútornej a vonkajšej strane lakťového kľbu

Vďaka vysokej elasticite okrajov bráni sťahovaniu

Bandáž na zápästie

Manu Sensa

Stabilizuje zápästný kĺb

Kód ŠÚKL : J83703

Manu Sensa spôsobuje stálu a príjemnú tlakovú masáž okolo celého zápästia. Plastová dlaha zabezpečuje optimálne polohovanie ruky, a tým zabraňuje neželaným pohybom.


Manu Sensa pomáha pri nasledujúcich ťažkostiach

- akútne a chronické stavy podráždenia, napr. zápal šlachovej pošvy (tendovaginitída), podráždenia mäkkých tkanív (tendomyopatie), bolesti kĺbov
- stavy podráždenia po operáciách a zraneniach
- distorzie zápästného kĺbu
- reumaticky podmienený zápal kĺbu (reumatoidná artritída)
- syndróm karpálneho tunela
- ťažkosti zápästného kĺbu v dôsledku jeho opotrebovania (napr. artróza)
- pocit nestability (napr. pružný lakeť)


Takto pôsobí Manu Sensa

- konštantná, príjemná tlaková masáž, ktorá je najsilnejšia v oblasti zápästného kĺbu
- sťahuje a stabilizuje zápästný kĺb
- obmedzuje pohyb zápästného kĺbu
- zmierňuje bolesti

Manu Sensa 50P13

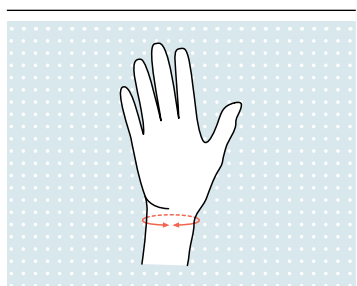


Strana	Veľkosť	Obvod (cm)
L/P	XS	14–15
L/P	S	15–16
L/P	M	16–17
L/P	L	17–18
L/P	XL	18–19
L/P	XXL	19–20

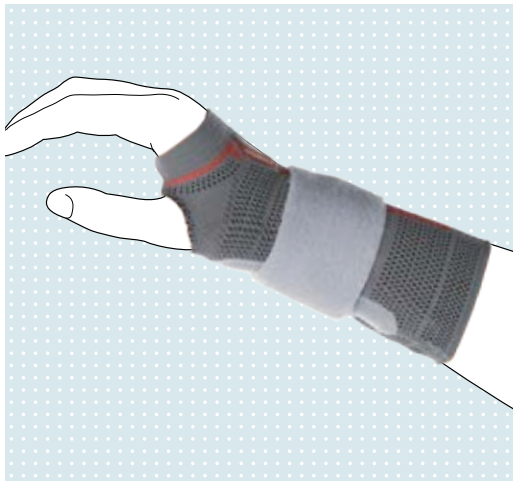

• **Väčšia stabilita:**

Na dodatočnú stabilizáciu zápästného kĺbu sa dá pripnúť aj jeden elastický pás

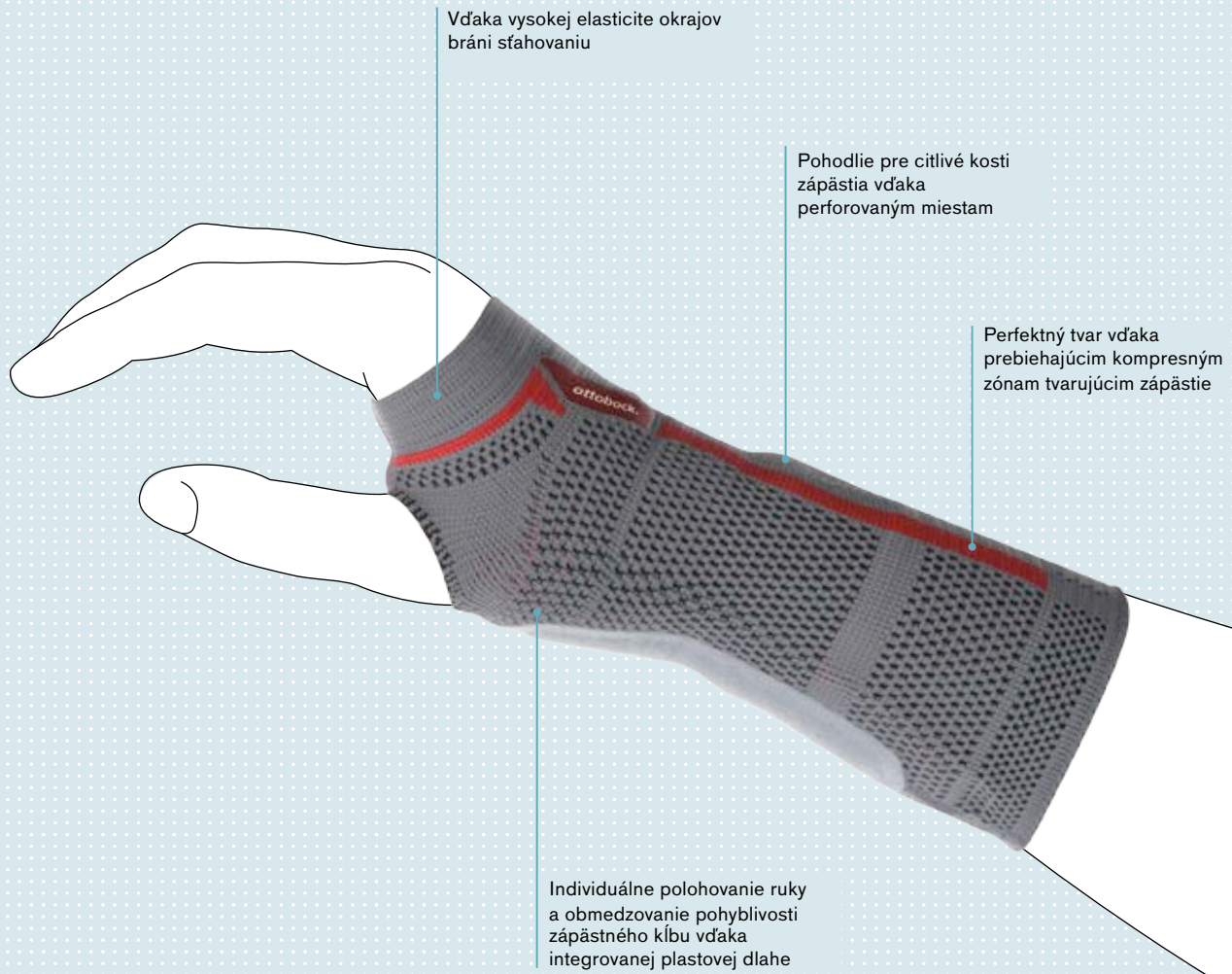

Váš regionálny predajca :



Distribútor :

Otto Bock Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26, Bratislava 5, 851 01
info@ottobock.sk · www.ottobock.sk
T +421 2 32782070
Infolinka : 0915 090 060

Objednávky :

info@ottobock.sk