

ottobock.

**exopulse suit.**  
Pour la fibromyalgie.

Information destinée au grand public

 **EXOPULSE**

# Découvrez la combinaison.

## Un soulagement ciblé.

### Une approche non-pharmacologique pour la gestion des symptômes de la fibromyalgie.

Trouver un traitement efficace peut s'avérer être un parcours long et difficile pour les personnes atteintes de ce syndrome complexe. *exopulse suit* est une solution qui peut vous aider à gérer ces symptômes, il s'agit d'une combinaison quasi intégrale personnalisable équipée d'un système de neuromodulation procurant un soulagement de la douleur, cliniquement prouvé avec des effets durables dans le temps.



# Des résultats cliniquement prouvés durables dans le temps.

### Une utilisation régulière donne de meilleurs résultats.

64 % des patients indiquent une amélioration globale de leur état de santé après 2 semaines d'utilisation quotidienne.

78% des patients indiquent une amélioration globale de leur état de santé après 4 semaines d'utilisation.



### Une étude récente montre que :



#### Moins de douleur, de fatigue

Une stimulation quotidienne et régulière avec la combinaison peut aider à soulager à la fois les symptômes physiques et psychologiques liés à la fibromyalgie.



#### Après 2 semaines

Après seulement 2 semaines de stimulation quotidienne, des effets significatifs sur la douleur et la fatigue apparaissent.



#### Des résultats dès 60 minutes

Avec 60 minutes de stimulation par jour, il ne faut que 2 à 4 semaines aux utilisateurs pour ressentir une amélioration significative de leur douleur liée à la fibromyalgie.



#### Après 4 semaines

Après 4 semaines de stimulation quotidienne, les utilisateurs font état d'une amélioration encore plus importante de leurs symptômes, ainsi que d'une amélioration de leur état général.

# Une stimulation ciblée et personnalisée.

## Comment la neuromodulation aide à soulager les symptômes de la fibromyalgie.

La neuromodulation est une forme de stimulation électrique légère qui vise à soulager la douleur et les autres symptômes liés à la fibromyalgie en activant les mécanismes du système nerveux qui bloquent la transmission des signaux de la douleur. Ces mécanismes peuvent aider à bloquer les symptômes invalidants avant qu'ils n'atteignent le système nerveux central.



## Chaque parcours avec la fibromyalgie est unique.

Voici comment la combinaison est conçue pour s'adapter à vous.



### Stimulation personnalisée

Les 50 électrodes intégrées de la combinaison offrent une stimulation précise et adaptée à vos besoins.



### Solution non-pharmacologique

La combinaison peut être associée aux traitements médicamenteux ou de rééducation en cours.



### Solution non-invasive

L'utilisation de la combinaison est simple et non-invasive. Il suffit d'enfiler la combinaison et de démarrer la stimulation depuis votre smartphone.

# Dernières nouveautés.

## Nouveau design & nouvelles fonctionnalités.


## Découvrez de plus près la combinaison entièrement repensée :

- 1 Encore plus de précision :** 50 électrodes intégrées dans la combinaison permettant une stimulation ciblée sur les 43 groupes musculaires.
- 2 Encore plus de confort :** La veste et le pantalon sont fabriqués dans un tissu extensible et respirant alliant confort et praticité.
- 3 4 Encore plus de simplicité :** Les unités de contrôle se connectent en Bluetooth à une application dédiée pour un réglage simple et adapté. Quelques clics suffisent !



### L'application vous offre encore plus de possibilités :

- Activez, contrôlez et ajustez le programme en toute simplicité.
- Une application intuitive vous permet de personnaliser les réglages de stimulation.

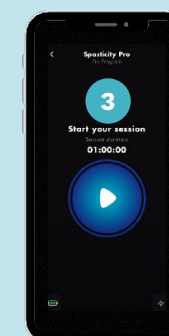

# Contre-indications.

## NE PAS utiliser *exopulse suit* :

- En association avec des équipements électroniques à haute fréquence ou de maintien en vie
- En association avec des équipements d'ECG

La combinaison peut perturber le fonctionnement des équipements ci-dessus.

## Avant toute prescription médicale, une vigilance particulière doit être accordée pour les personnes présentant :

- Maladies cardiaques ou affections associées
- Pathologies malignes (cancer)
- Maladies infectieuses
- Fièvre
- Épilepsie
- Maladies cutanées, éruptions ou autres problèmes dermatologiques
- Utilisation concomitante avec un autre dispositif médical
- Utilisation en association avec un autre traitement médical (par exemple médicamenteux)

**i** L'utilisation de la combinaison dans les situations décrites ci-dessus peut exposer l'utilisateur à un risque injustifié. Toute utilisation se fait sous la seule responsabilité de l'utilisateur.

# Questions fréquentes.

## Y a-t-il des effets secondaires au port de la combinaison ?

Dans de rares cas, les patients portant la combinaison ont rencontré des effets secondaires légers et temporaires, typiquement associés à une stimulation électrique : irritation cutanée mineure, rougeurs superficielles et légères brûlures.

## Puis-je poursuivre mes autres traitements pour la spasticité ?

Dans la plupart des cas, oui, mais consultez votre médecin pour vous assurer qu'ils sont compatibles avec le port de la combinaison. Avec l'accord de votre médecin, *exopulse suit* doit de préférence être utilisée conjointement à une rééducation, à un entraînement ou à une activité physique. Parlez-en avec votre médecin si vous recevez actuellement des injections de toxine botulique ou si vous prenez des médicaments par voie orale contre la spasticité. N'utilisez pas la combinaison si vous êtes équipé d'un dispositif médical implanté.

## De quel type de matériau est fait la combinaison ?

La veste et le pantalon sont faits de matières synthétiques lavables, extensibles et confortables (mélange de polyamide et d'élasthanne). Les vêtements ne contiennent ni produits ni fibres d'origine animale.

## La combinaison est-elle prise en charge par une assurance ou par la sécurité sociale ?

La combinaison n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Rapprochez-vous de votre Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) pour une demande de prestation de compensation du handicap.



Pour plus d'informations

## La combinaison a-t-elle fait l'objet d'études cliniques ?

L'efficacité du dispositif a été évaluée dans plusieurs programmes de recherche clinique, y compris des études indépendantes et parrainées par Ottobock.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les résultats de ces études, nous vous invitons à nous contacter. Vous trouverez les informations de contact au dos de la brochure.



### Lavable en machine

La veste et le pantalon peuvent être lavés jusqu'à 60 fois en machine.



### NE PAS laver les unités de contrôle

Cela pourrait annuler la garantie de deux ans de la combinaison.

# Contactez-nous.

La combinaison est actuellement disponible au sein des agences **Ottobock Care**, ainsi que dans certaines cliniques et centres de rééducation.



Pour en savoir plus sur **exopulse suit**  
et nous contacter, scannez le QR code.

**Avertissement :** les informations contenues dans ce document sont uniquement destinées à un public hors des États-Unis.  
Veuillez noter que les produits qui y sont décrits ne sont pas approuvés par la FDA.  
Tous les produits et services ne sont pas enregistrés ou disponibles à la vente dans tous les pays.

Fabricant Otto Bock Healthcare.  
Ces dispositifs médicaux sont des produit de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demander conseil auprès d'un professionnel de santé.  
Lire attentivement la notice d'utilisation.

Ottobock France  
4, rue de la Réunion, CS 900011 · 91978 Courtaboeuf Cedex  
T +33 1 69 18 88 30 · F +33 1 69 07 18 02  
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr