

# トーションアダプター

## 調整方法と手順 - 医療従事者用資料 -

### 【調整箇所】



調整スクリューを回転することにより、回旋抵抗が調整できます。

時計回り : 回旋抵抗が増大

反時計回り : 回旋抵抗が減少

※回旋を完全に止めることはできません。

\* 赤塗りのゾーンまで回すと内部機構が破損します。  
必ず目盛り内（矢印の間）でのみ調整してください！

### 【トーションアダプターとは】

回旋の動きを補うアダプター

回旋角度：±20°

					
品番	4R39	4R40	4R85	4R86	2R67
チューブ径	30mm径	---	30mm径	34mm径	34mm径
体重制限	125kg	125kg	100kg	110kg	125kg
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	チタン	アルミ/ステンレス
重さ	500g	340g	350g	340g	520g
実長	457mm * 納品時	47mm	82mm	92mm	300mm * 納品時