



Meridium 編 操作マニュアル

connectgoユーザーアプリ v1.0

2026年7月版



【目次】

1. はじめに
2. 稼働環境
3. 初期設定
4. 接続
5. 基本画面
6. 差高の調整
7. 設定値の微調整
8. 接続パーツの追加と削除

1. はじめに

connectgoユーザーアプリは、オットーボックのコンピュータ制御膝継手/足部の充電残量や歩数を確認することができるアプリです。

2. 稼働環境

1) Android環境

Android 12.0 以上（2026年7月現在）



2) iOS環境

iOS 17 以上（2026年7月現在）



【注意】


本体内部に「DUAL」印が**アル**個体は、iOS、Androidともに接続可能です。
ナイ個体は、Androidとのみ接続が可能です。

3. 初期設定



アプリを起動します。

初めて接続する場合は、インターネット環境が必要です。

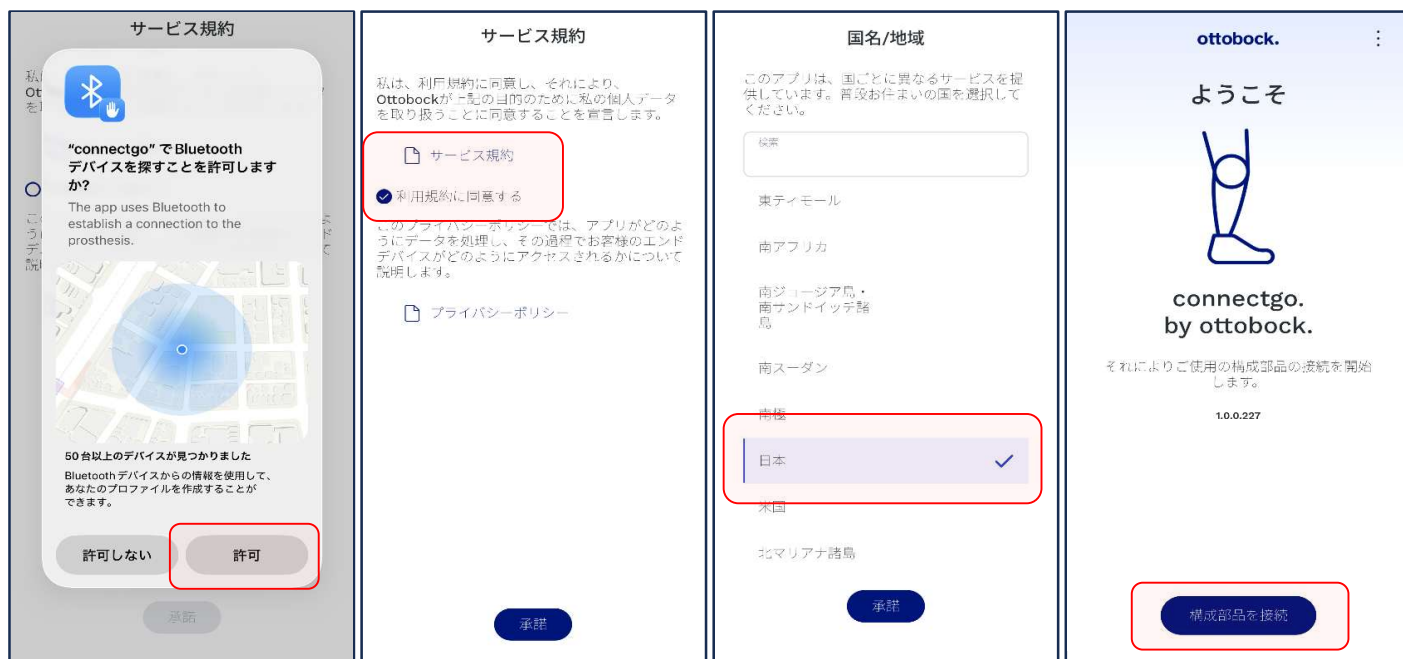


「許可」を選択

サービス規約を読み
「利用規約に同意する」
を選択

日本語を選択

「構成部品と接続」
を選択

4. 接続

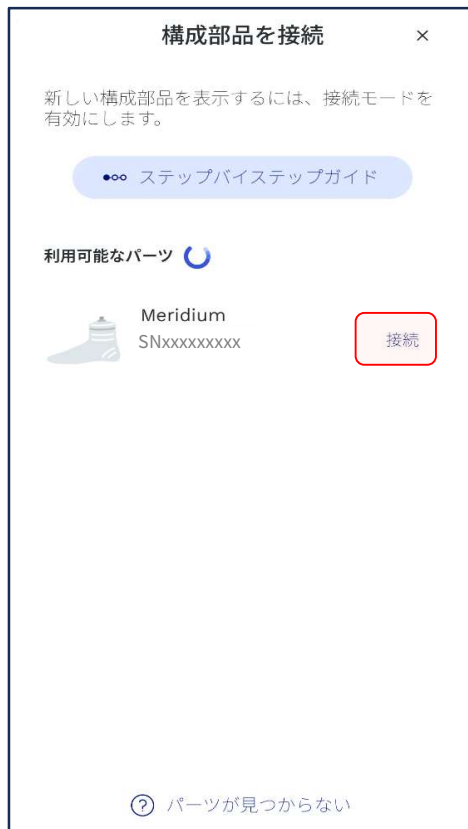


シリアル番号を確認し「接続」を選択

該当するKenevoが表示されない場合

- Kenevoのブルートゥースを起動する
→ 充電器の取付け/取外し
→ 義足を360°回転させフィードバック音を確認
- タブレットのブルートゥースを起動する



4桁のPINコードを入力

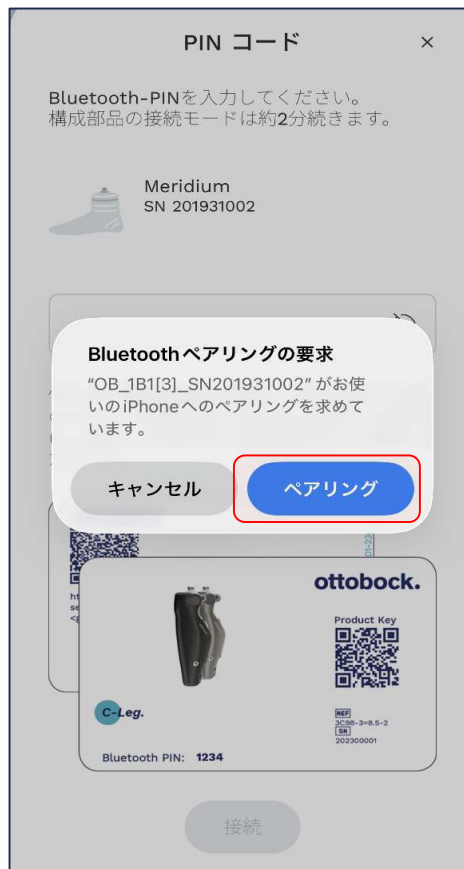

「ペアリング」を選択



接続が開始されます

5. 基本画面



- ① 本体の充電残量
- ② 選択したマイモード
差高の異なる靴を履く場合に調整をします
- ③ 差高を設定
- ④ 歩数



- ⑤ オーディオ設定



- ⑥ パーツの状態


Kenevo本体のBluetoothをOFFにすることができます。
例えば飛行機に乗る場合など、必要に応じてOFFにできます。



- ⑦ 構成部品の管理

アプリに接続する膝継手の追加削除が可能です。
例えば両側で使用している場合など、アプリとの接続切替えができます。



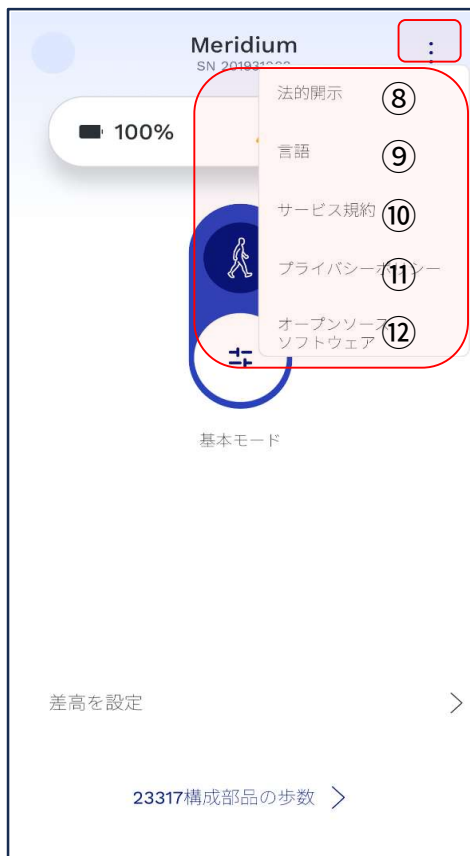

メニュー

⑧ 法的開示

アプリのバージョンが確認できます。
必ず最新バージョンを使用してください。
version 1.0 (2026年7月現在)



⑨ 言語

アプリに表示させる言語の選択ができます。

⑩ サービス規約


⑪ プライバシーポリシー

⑫ オープンソースソフトウェア

【通知】

本体の充電中は、アプリとの接続ができません。

メンテナンス時期になると、通知がされます。
担当の義肢装具士にお問合せください。

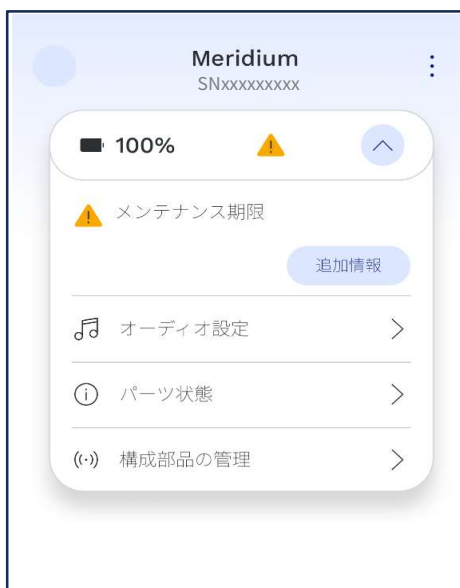

6. 差高の調整




差高の異なる靴を履く場合は、差高調整を実施してください。

【注意】

安全を確保してから実施してください。

「差高の設定」を選択

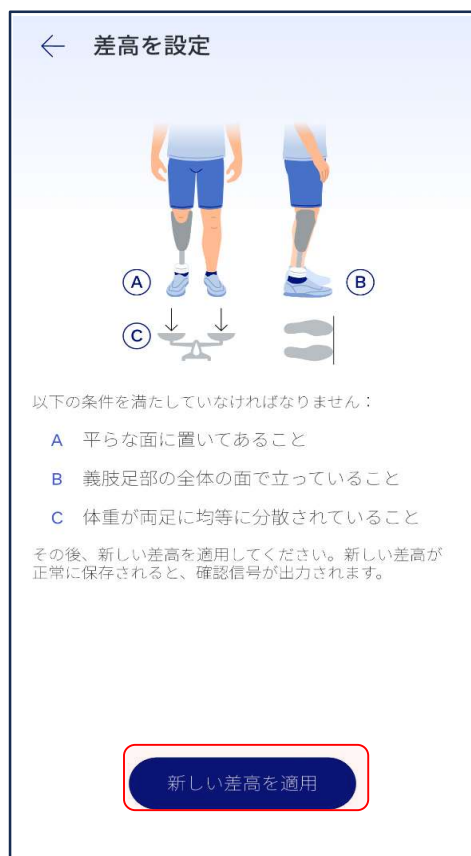

立位をとります

- ・平らな面で立位
- ・つま先を揃える
- ・体重を均等にかける

正しい姿勢が取れたら「新しい差高を適応」をタップします。
1回ビーブ音が鳴った後、差高調整は完了します。

7. 設定値の微調整

7-1. 通常モード



義肢装具士が調整アプリで設定した項目の微調整、ON/OFFが可能です。

【注意】 恒久的に値を変更して使用する場合は、担当の義肢装具士に調整依頼してください。

赤枠のマークをタップすると、微調整が可能な項目が表示されます。



【補足】

機能の詳しい内容は、担当の義肢装具士にご確認ください。

- ① かかとの抵抗
踵接地時の底屈抵抗
- ② ロールオーバー抵抗
踏返し時の背屈抵抗
- ③ 階段機能
階段下りを検知すると、背屈方向への動きが大きくなる機能



7-2. マイモード

【補足】機能の詳しい内容は、担当の義肢装具士にご確認ください。


・立位



・クロストレーナー

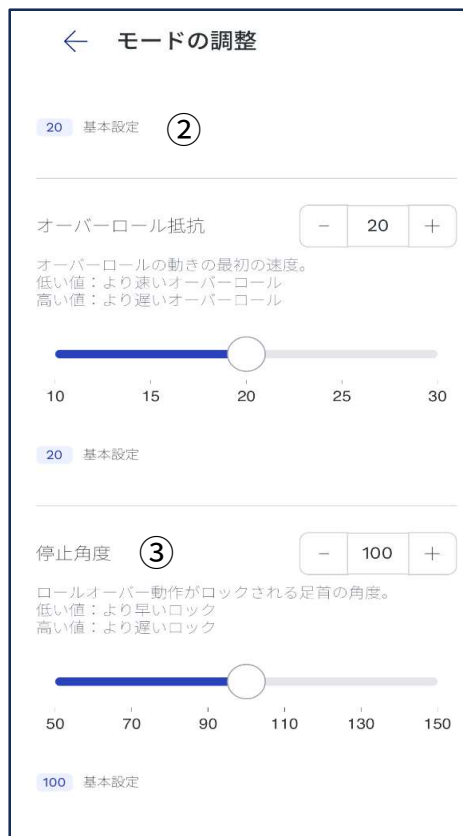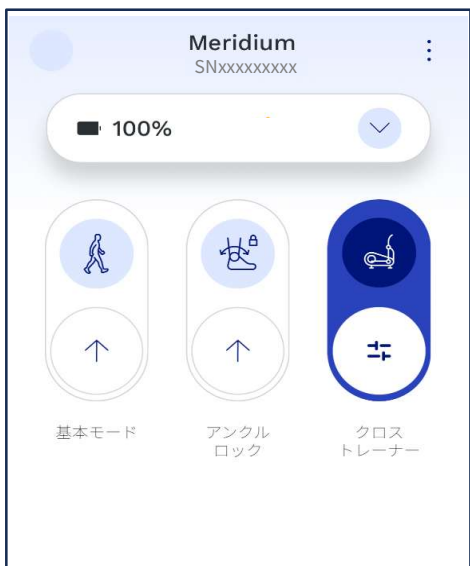

- ① かかとの抵抗
踵接地時の底屈抵抗
- ② ロールオーバー抵抗
踏返し時の背屈抵抗
- ③ 停止角度

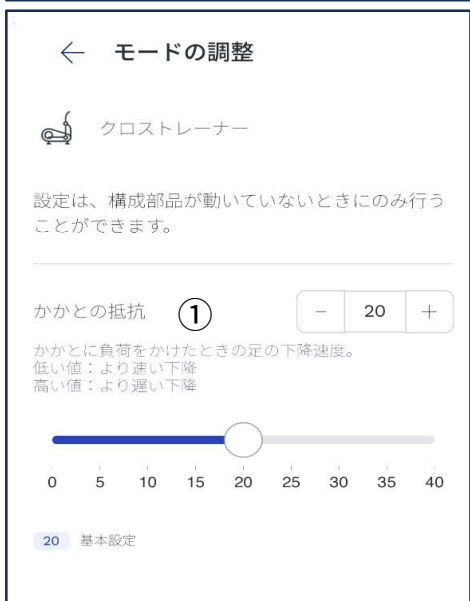

8. 接続パーツの追加と削除

8-1. 接続パーツ

メニューから「構成部品の管理」を選択



「接続完了」接続中の個体



8-2. 接続パーツの切替え



「接続」を選択して切替えます。

8-3. 接続パーツの追加



接続をする個体が「利用可能なパーツ」に表示されたら「接続」を選択します。

本手順書「4. 接続」手順を実施し接続。

8-4. 接続パーツの削除



「編集」を選択するとゴミ箱マークが表示される。
接続を削除するパーツのゴミ箱マークを選択し、削除します。

ottobock.

掲載内容の無断使用禁止

掲載されている内容、文章、画像については、無断で使用もしくは転載する事を禁止します。

オットーボック・ジャパン 株式会社
www.ottobock.com/ja-jp

2026年7月版