

Bei
Fibromyalgie

ottobock.

exopulse suit.

Schmerzen reduzieren.
Energie freisetzen.

Informationen für Anwender

 **EXOPULSE™**





Neuer innovativer Ansatz.

Jede Fibromyalgie-Erkrankung hat eine eigene Charakteristik. Der **exopulse suit** ist so konzipiert, dass er sich nahtlos an Ihr spezifisches Krankheitsbild anpassen lässt.

Wie der **exopulse suit** Schmerzen lindert.

In den Anzug sind 50 Elektroden eingebettet, die sanfte, kaum wahrnehmbare Impulse senden und somit die Mechanismen des Nervensystems aktivieren, die die Übertragung von Schmerzsignalen blockieren. Diese „Schmerztore“ können dazu beitragen, Symptome zu stoppen, bevor sie das zentrale Nervensystem erreichen.

Es wird empfohlen den **exopulse suit** alle zwei Tage für eine Stunde zu verwenden, sofern nicht anders vom Arzt verordnet.*

* Studien zeigen, dass der Anzug bei Fibromyalgie-Patienten signifikante, sofortige (nach nur einer einzigen Sitzung) und kumulative Schmerzlinderung bewirkt, wenn der Anzug täglich für eine Stunde verwendet wird (nach 2 und 4 Wochen).

”

*Der exopulse suit
war ein Rettungsanker
für mich – ein Moment
der Hoffnung in der
Dunkelheit.*

Elisa

Entdecken Sie Funktionen und Möglichkeiten.

- **Präzise Stimulation**

50 eingebettete Elektroden ermöglichen eine präzise Stimulation, die individuell auf Ihre Symptome abgestimmt werden kann.

- **Angenehmes Tragegefühl**

Jacke und Hose bestehen aus einem elastischen, einlagigen Stoff (atmungsaktive Polyamid-Elasthan Mischung), der das An- und Ausziehen des Anzuges erleichtert und für eine bessere Passform sowie ein angenehmes Tragegefühl sorgt.

- **Smarte kleine Steuereinheit**

Jacke und Hose werden jeweils mit einer Steuereinheit verbunden, die die elektrischen Impulse erzeugt. Das Stimulationsprogramm wird von einem Techniker für Sie erstellt. Beide Steuereinheiten verfügen über Bluetooth-Technologie und wiederaufladbare Akkus.

- **Intuitive Anwender-App**

Mit einer App auf Ihrem Mobiltelefon können Sie die Stimulation ganz einfach starten und anhalten. Bei Bedarf können Sie die Intensität der Stimulation leicht an Ihre Tagesform anpassen.

- **Maschinenwaschbar**

Beide Kleidungsstücke (ohne die Steuereinheit) können bis zu 60 Mal in einer haushaltsüblichen Waschmaschine mit Feinwaschmittel und dem Zusatz von Sagrotan™ Wäsche-Hygienespüler gereinigt werden. Mittels Handwäsche ist die Reinigungshäufigkeit unbegrenzt.

Klinisch belegte Schmerzlinderung.

Der **exopulse suit** kann dazu beitragen, Ihre Symptome in praktisch allen Bereichen zu lindern. Ergebnisse klinischer Studien belegen dies. Dabei macht ein regelmäßiger Gebrauch für die meisten Anwender einen großen Unterschied¹:



Weniger Schmerzen, Ermüdung und andere Symptome

Bei täglichem Gebrauch kann der Anzug zur Linderung der physischen wie auch der psychischen Symptome der Fibromyalgie beitragen.¹



Ergebnisse nach 60 Minuten

Einige Anwender berichteten, dass sie nach nur einer einzigen einstündigen Anwendung des Anzugs deutlich weniger Schmerzen verspürten.²



Echte Linderung in 2 Wochen

Nach nur 14 täglichen Sitzungen berichteten die Anwender über eine deutliche Verbesserung der Schmerzen, der Ermüdung sowie der Lebensqualität.¹



Noch bessere Wirkung nach 4 Wochen

Vier Wochen tägliche Stimulation können dazu beitragen, Schmerzen und Ermüdung sowie Fibromyalgie-bedingte Depressionen und Ängste weiter zu lindern.²

Referenzen:

1. Ayache S. A Multisite Stimulation Approach on Motor Functions and Pain in Multiple Sclerosis (MS) and Fibromyalgia – the French Experience. Vortrag auf: OTWorld; 14. Mai 2024; Leipzig, Deutschland.
2. Riachi N, Chalah MA, Ahdab R, Arshad F, Ayache SS. Effects of the TENS device, Exopulse Mollii Suit, on pain related to fibromyalgia: An open-label study. Neurophysiol Clin. 2023 Aug;53(4):102863.



Exopulse Hotline – Ihr Support rund um die Exopulse® App

Für alle Fragen zu
Einrichtung, Nutzung
und Benutzerkonto –
schnell, persönlich und
kompetent.

Hotline Details

T +49 5527 8483037
Montag bis Freitag von
8:30 – 17:00 Uhr
in Deutsch und Englisch

