

オモニューレクサ プラス装着手順 ～装着介助する場合～

オモニューレクサ プラスは、リハビリの早期段階での使用開始を推奨しています。

初期は、義肢装具士による適合調整ののち、医師や理学療法士をはじめとする医療従事者によって装着を行います。



① 麻痺側に通した上腕カフを
肩関節まで引き上げ固定する




② ベルトを腋窩に通し、胸部前後
の長さを調整し仮留めする




③ 上腕骨頭を持ち上げるように装具を引き上げ、
上肢を挙上させながら、胸部ベルトを締込む




④ 前腕カフの肘部分の開口部を、**肘頭**が出る位置に
合わせ固定する

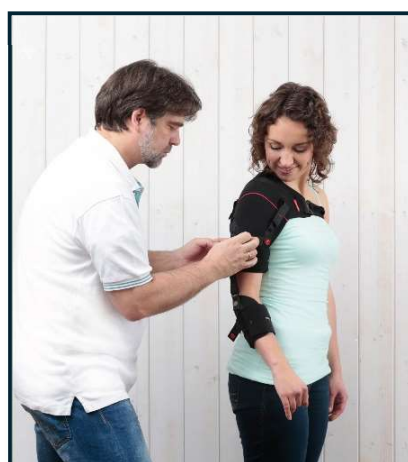

⑤ 黒-黒、赤-赤の**同じ色**の懸垂ストラップを繋げる

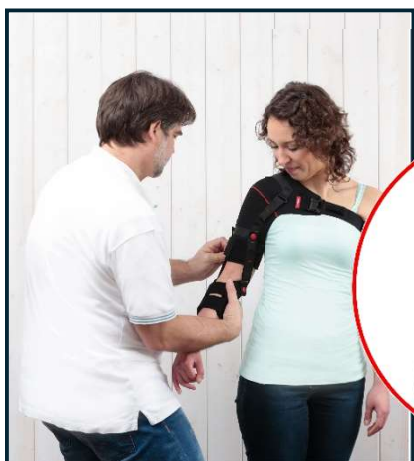

⑥ ストラップの**走路はねじれる**
上肢外旋位になるようにデザインされています

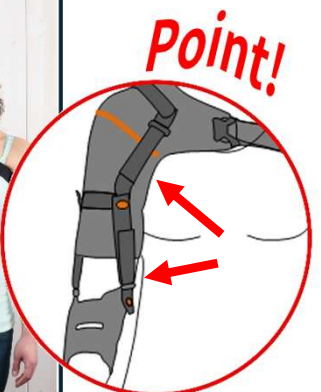

装着方法の動画を
ご覧いただけます

www.ottobock.com/ja-jp/technical

