

8060 ゲニュ インモビル 0°（膝伸展位固定用）

取扱手引書

義肢装具士の方へ

本製品を安全にお取り扱いいただくために、使用前に本書をお読みください。また、必要な際に参照できるようお手元に保管してください。


装着者の方へ、装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などをご案内ください。

使用目的

膝関節固定帯『8060 ゲニュ インモビル 0°』は、膝の機能回復を目的とした、屈曲角度 0°（8060 伸展位）での保持・固定のために使用されます。

適応・用途

筋・靭帯損傷後、膝関節の術前・術後の疼痛症状、膝蓋骨脱臼などに使用します。
特定な適応の場合には、医師からの診断を必ず受けてください。

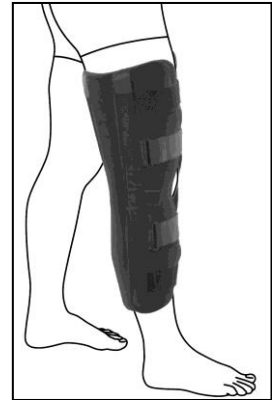

構造および構成パーツ

本製品は、本体パッド（写真 1-A）とステーが内蔵された左右のステーカバー（写真 1-B）で構成されています。

各ステーカバーは面ファスナーにより取り外しが可能で、必要に応じて位置と周径の調整ができます。

アルミニウム製のステーが内蔵されており、前面のベルトを調整することで固定します。

また、肌に触れる本体内部には綿パイル生地（素材：ナイロン、ポリウレタン、綿）を使用しています。

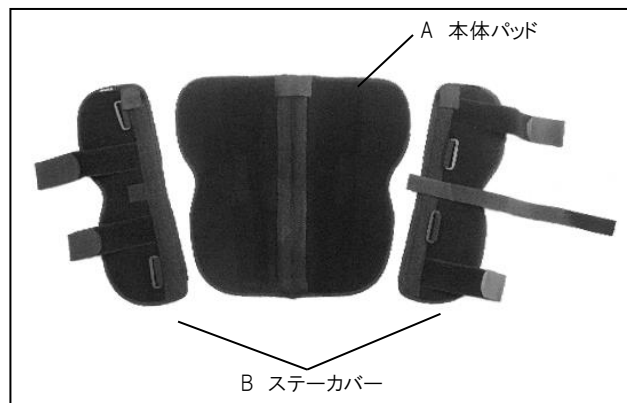


写真 1

サイズの選択

本製品は 4 種のサイズより選択することができます。左右兼用です。

発注品番	サイズ	全長 (cm)	適用範囲	
			大腿周径(cm)	下腿周径(cm)
8060=S	S	40	42～62	35～55
8060=M	M	50	48～68	40～60
8060=L	L	60	52～72	42～62
8060=XL	XL	70	55～75	45～65

装着方法

- ◆ 初めて装着する際は、必ず医師・義肢装具士のもと行ってください。

- 1) 全てのベルトを外してください。
本体前面の開放部が、膝蓋骨に位置するように装着してください。
浮腫などにより患部の周径サイズが大きい場合、ステーカバーとベルト位置の調整を行うことで、より良い適合が得られます。
- 2) ベルトをプラスチックカンに通し、折り返して引っ張りながら面ファスナーに留めます(写真 2)。余分なベルトはカットすることができます。
全体を強く締めすぎないように注意し、正しく装着されていることを確認してください。

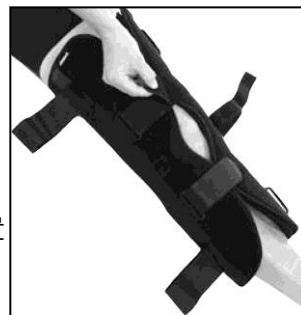


写真 2

<オプション>

冷却パックを併用し固定する場合は、膝蓋骨上中央に幅狭のストラップを取り付けて使用してください(写真 3)。
ステーカバーに挿入されているステーはカバーから取り外し、必要に応じて大腿部・下腿部の形状に合わせて曲げ加工することができます。




写真 3

注意事項

- ◆ 適応方法に関してのお問い合わせやご相談は、医師または義肢装具士にご連絡ください。
- ◆ 本製品は不燃性ではありません。本体を火気に近づけたり、120℃を超える場所に放置したりしないでください。
- ◆ 本体の調整は、医師または義肢装具士のみが行えます。
- ◆ 本製品の機能変更、または機能が損なわれる加工は行わないでください。製品は本来の目的及び、適用範囲にのみご使用ください。
- ◆ ネオプレン素材を使用している製品に関して、4 時間を超える連続使用は避けてください。
その他の素材を用いている製品の使用に関して、医師または義肢装具士からの指示などが無い限り、8 時間を超える連続使用は避けてください。
- ◆ 使用されている素材に対しアレルギーがある方は、製品を使用する前に医師にご相談ください。本製品に使用されている素材の内容は、上記に記載されています。
- ◆ 本製品を廃棄する際には、各自自治体の廃棄区分に従ってください。

お手入れ方法

- ◆ すべての面ファスナーを閉じてください。本体より可能な限りステーは取り外してください。
- ◆ 洗濯の際には 40℃ 以下の水と中性洗剤を使用し、手洗い、陰干しをしてください。
- ◆ 陰干しする際、製品のシワを軽く伸ばしてください。
- ◆ 塩素系漂白剤、洗濯機、脱水機、乾燥機、アイロン、ドライクリーニングなどの使用は行わないでください。

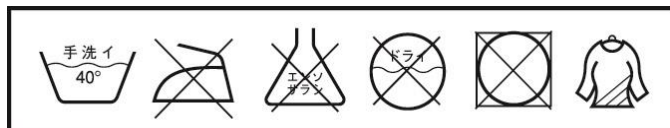

お問い合わせ窓口:

輸入元: オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.com/ja-jp

〒105-0012 東京都港区芝大門 1-9-9 野村不動産芝大門ビル 4F TEL: 03-6739-4090(代表)