

膝関節軟性装具 [軟性] ゲニユ ディレクサ (8353)

1. 側方安定性の向上

内外側のアルミ製 2 軸ジョイントヒンジが側方安定性を高めます。

2. 快適性

3 相構造伸縮素材は、フィット感がよく、通気性にも優れています。

3. 簡単装着

装着が簡単なフロントオープンタイプのため、無理な姿勢をすることなく楽に固定できます。



Quality for life

適応

- ▶ 軽度から中程度の不安定性や疼痛
- ▶ 外傷や手術後の支持
- ▶ 初期から中期の関節症

膝関節軟性装具 [軟性]

ゲニュ ディレクサ
(8353)

幅広伸縮
ストラップベルト



▶ 特長

通気性のある3層構造伸縮素材を使用した本体に、大腿・下腿部を周回する伸縮ストラップベルトと、内外側の2軸ジョイントヒンジにより、膝関節の前後・内外側方向への支持を行います。

▶ お客様の声

- ・幅広の伸縮ストラップベルトでしっかりと固定される
- ・フロントが開くので装着が容易
- ・通気性が良く、肌触りも良いので快適

▶ 簡単装着

3
ステップ



① 全ての面ファスナーを開け、膝の後面より本装具をあてます。



② 遠位の面ファスナー、次に近位の面ファスナーを留めます。



③ 2本の周回ベルトを遠位、近位の順で留めます。

屈曲フリー構造の2軸ジョイントヒンジ




▶ 試用用デモ機

装着効果やサイズの確認にご使用いただけるよう全サイズをご用意しています。

- * 右のサイズ表を参考にサイズ選択してください。
- * 義肢装具製作施設からのお貸出しとなります。

▶ 製品サイズ

サイズの測り方

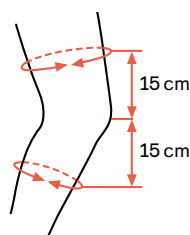

イラストのように膝蓋骨中心から上下15cmの大腿部、下腿部の周径を測ります。

発注品番	サイズ	適用範囲	
		大腿周径 (cm)	下腿周径 (cm)
8353=XXS-7	XXS	36~40	29~32
8353=XS-7	XS	40~44	32~35
8353=S-7	S	44~48	35~38
8353=M-7	M	48~52	38~41
8353=L-7	L	52~56	41~44
8353=XL-7	XL	56~61	44~48
8353=XXL-7	XXL	61~67	48~51

- 左右兼用
- 本体全長は約36cm



ホームページ



フェイスブックでオットーボック製品や活動などご紹介！

検索サイトまたはQRコードにてご覧いただけます。

ゲニュ ディレクサ 8353



フェイスブック QRコード



お問合わせ先

- ・本カタログの適応は海外で認可されたものです。
- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。
- ・本カタログの内容は2018年4月現在のものです。

オットーボック・ジャパン株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F
www.ottobock.co.jp TEL 03-3798-2111 (代表) FAX 03-3798-2112