

Taleo Vertical Shock 1C51

Könnyedén a mindennapokban.

A Taleo Vertical Shock ideális választás azoknak az aktív életvitelű felhasználóknak, akik változatos kültéri és beltéri tevékenységeikhez igénylik a könnyed, erőfeszítések nélküli járást. A talaj felől érkező erők csillapításának és a torziós mozgás lehetővé tételének köszönhetően megnő a protézisviselők komfortérzete.

Előnyök:

- +/- 10° torziós elmozdulás csökkenti a csont felszínén keletkező terhelést és max. 15 mm ütés-csillapítás a talaj felől érkező erők enyhítésére.
- A kettős karbon rugók és a hosszú karbon alaprugó sima átgördülést és dinamikus járást biztosít bármilyen járássebességnél.
- A karbon rugók közötti egyedi, rugalmas kapcsolat a protézisláb előláb részén, amely a változó talajviszonyokhoz való gyors alkalmazkodást segíti.
- Három féle sarokék gondoskodik az egyedi igényekhez igazítani az ütécscillapítás mértékét.

More than a foot.
A foundation.



Műszaki információ

Aktivitási szint	3–4
Terhelhetőség	150 kg
Méret	22–30 cm
Súly kozmetikai borítás nélkül*	751 g
Kozmetikai borítás	Keskeny forma (S) 15 +/- 5 mm sarokmagassághoz (22 – 25 cm méret) Normál forma (N) 10 +/- 5 mm sarokmagassághoz (24 – 30 cm méret)
Súly kozmetikai borítással*	980 g
Rendszermagasság*	185 mm
Egyéb jellemző	+/- 10° elfordulási tartomány, 15 mm függőleges elmozdulással

*A műszaki adatok a 26 cm-es méretre vonatkoznak.



Taleo Vertical Shock

ottobock.

Kiválasztási segédlet a karbonláb keménységének meghatározásához

1 A testsúly és az aktivitási szint alapján

Testsúly (kg)	Normál aktivitási szint	Magas aktivitási szint
Up to 51	1	2
52-58	2	3
59-67	3	4
68-77	4	5
78-88	5	6
89-100	6	7
101-115	7	8
116-130	8	9
131-150	9	-

2 Láb méret kiválasztása

Keménység Láb méret	Keménység								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22									
23									
24									
25									
26								*	
27								*	
28								*	*
29								*	*
30								*	*

Keskeny kozmetikai borítás (15 ± 5 mm sarokmagasság)
 Mindkét kozmetikai borítással rendelhető
 Normál kozmetikai borítás (10 ± 5 mm sarokmagasság)

* Az Ottobock térdizületekkel való együttes használat esetén kérjük, olvassa el a Használati utasítás ajánlásait.

Rendelési példa 1C51=R26-4-P/4N

Cikkszám	Oldal	Méret	- Keménység	- P /	Szín	Forma
1C51=				- P /		
	Oldal	Méret [cm]	Színek		Forma	
	Jobb R	22, 23, ..., 30	Bézs 4		Keskeny S 22-25 cm	
	Bal L		Világos barna 15		Normál N 24-30 cm	

Mellékelt tartozékok: 2C15 kozmetika, fekete Spectra zokni, 2F50 sarokék szett (3 különböző keménységi fokozatban), 2Z362 funkcionális gyűrű és a cseréhez szükséges alkatrészcsomag.

