

1C56 Taleo Adjust. Chodidlo připravené žít.

Taleo Adjust jsme vyvinuli pro aktivní uživatele, kteří se pohybují v tom nejrůznějším prostředí uvnitř i venku a chtějí chodit bez námahy všude tam, kam je život zrovna zavede. Jediným stisknutím tlačítka si navíc mohou nastavit vhodnou výšku podpatku od 0 do 7 cm.

Vyvinuté pro život

- Karbonové chodidlo s nastavitelnou výškou podpatku
- Snadné a plynulé nastavení výšky podpatku v rozsahu 0–7 cm umožňuje uživatelům měnit různé typy obuvi.
- Optimální stavba protézy zůstane po změně výšky podpatku zachována.
- Hladký odval od došlapu paty až po odraz ze špičky umožňuje snadnou a pohodlnou chůzi bez hluchých míst (v závislosti na zvolené obuvi).
- Nastavitelná úroveň tlumení rázů a dynamiky chůze díky třem různým patním klínům
- Odolné proti sladké, slané i chlorované vodě
- Otvory vespod kosmetického krytu chodidla zabraňují hromadění vody v protéze.



Stupeň aktivity	2–3
Max. tělesná hmotnost	115 kg
Strana	levá (L), pravá (R)
Velikosti	22–28 cm
Hmotnost bez kosmetického krytu*	680 g
Kosmetický kryt chodidla	normal (2C8=*), normal low cut (2C15=*N-L), slim low cut (2C15=*S-L)
Barva kosmetického krytu	běžová (4), světle hnědá (15)
Hmotnost s normálním kosmetickým krytem*	930 g
Stavební výška s normálním kosmetickým krytem*	118 mm
Výška podpatku*	0–7 cm

* Pro velikost 26 cm

Výrobek je zdravotnickým prostředkem, určeným výhradně k exoprotetickému vybavení dolních končetin. Přečtěte si pečlivě návod k použití.



Snadné nastavení výšky podpatku

Karbonová základna z osvědčeného Taleo Low Profile

Možná změna typu obuvi

1C56.

Objednávkový formulář.

Zákazník

Zákazník č.	
Firma	
Ulice	
PSČ	Obec
Ortotik-protetik	

Adresa dodání (je-li odlišná od adresy zákazníka)

Zákazník č.	
Firma	
Ulice	
PSČ	Obec
Telefon	

Výběr tuhosti v závislosti na:

1. Tělesné hmotnosti a aktivitě a také

Tělesná hmotnost (kg)	Nízká aktivita	Normální aktivita
do 51	1	2
52–58	2	3
59–67	3	4
68–77	4	5
78–88	5	6
89–100	6	7
101–115	7	–

2. Velikosti chodidla

Velikost	Tuhost						
	1	2	3	4	5	6	7
22	bez omezení					–	–
23	bez omezení					–	–
24	bez omezení					–	–
25	bez omezení					–	–
26	bez omezení					–	–
27	–	–					
28	–	–					

Příklad pro objednání s krytem 2C8*:

1C56=R26-4-P/4

Obj. č.	Strana	Velikost	Tuhost	Barva
1C56	=		-	P /

Strana	Velikost (cm)	Tuhost	Barva	Strana
R Pravá	22, 23, ..., 28	1, 2, ..., 7	4 Běžová	R Pravá
L Levá			15 Světle hnědá	L Levá

Příklad pro objednání s low cut krytem 2C15*:

1C56=R26-4-P/4N-L

Obj. č.	Strana	Velikost	Tuhost	Barva	Tvar
1C56	=		-	P /	

Strana	Velikost (cm)	Tuhost	Barva	Tvar
R Pravá	22, 23, ..., 26	1, 2, ..., 7	4 Běžová	N-L Normal low cut (24–26 cm)
L Levá			15 Světle hnědá	S-L Slim low cut (22–23 cm)



Rozsah dodávky zahrnuje chodidlo 1C56, kosmetický kryt chodidla 2C8 vč. krytky, nebo 2C15, sadu patních klínů 2F50 (3 různé stupně tvrdosti) a jednu černou punčochku Spectra.

Doporučené kombinace*

TT	TF
4R140 Jednocestný ventil + 453A30/40 Nákolenka ProFlex Plus + 6Y95 Caleo 3D 4R180 Harmony P4 + 453A30/40 Nákolenka ProFlex Plus + 6Y512=* Uneo 3D	7T451=1 SiOCX TF Pro 6Y110 Skeo Sealing + 21Y21 Click Valve
4R11=* Quickchange adaptér	3C60* Kenevo, 3R85* Dynion, 3C98* C-Leg, 3B1* Genium nebo 3B5* Genium X3 4R57=WR Voděodolný otočný adaptér 4R11=* Quickchange adaptér
	3F1=* + 99B120=* Funkční kosmetika

* Veškeré komponenty jsou prodávány jednotlivě. Kompatibilita s chodidlem 1C56 *Taleo Adjust* zajišťuje optimální výkon pomůcky. Ortotici-protetici musí komponenty vybírat na základě individuálních kritérií uživatele.