

ottobock.

# カーボン製 短下肢装具 ウォークオン シリーズ

トリマブル(28U23)

リアクション(28U24)

リアクション ジュニア(28U25)



# WalkOn®

## シンプルなデザインで軽量の "カーボン製短下肢装具" がなめらかな歩行を小児から成人まで補助します。

### たわみ・反発力

カーボン素材でできた足底部のたわみ・反発力は自然な踏み返しを補助します。つま先離れの時には、反発力は推進力となり、滑らかに次の一步を踏み出すことができます。



### 軽量性

カーボンは耐久性に優れ、とても軽量の素材です。そのため足に掛かる重さを気にすることなく、なめらかに足を振り出すことができます。


- ・トリマブル (28U23) 重さ:約170g\*
  - ・リアクション (28U24) 重さ:約210g\*
  - ・リアクション ジュニア (28U25) 重さ:約90g\*
- \* カフバンド含むSサイズの重量

### Trim + able (簡単トリミング)

足底部にひと回り大きいゴム底をつけることで、ハサミなどでトリミングを行っていただけます。作業には、グラインダーなどの工作機を使わないため、カーボン切削する手間を軽減でき、作業時間を短縮することができます。



### ウォークオン トリマブル (28U23)

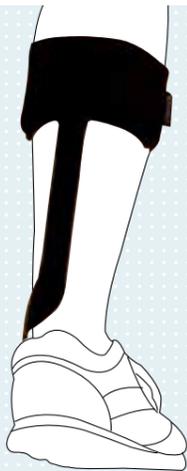

#### 目立ちにくいデザイン

内側から立ち上がった支柱は、ふくらはぎの後方を走行し、正面からは目立ちにくいデザインとなっています。

足底部が薄く、多くの靴に対応しやすくなっています。また、インソールを併用していただくことにより、快適なフィット感で歩行していただけます。



### ウォークオン リアクション (28U24)



#### 高い支持性

下腿を支える前面支持部が膝伸展筋の機能をサポートします。ウォークオン トリマブル (28U23) に比べ、より大きな反発力を生み出し、歩を進めやすい構造になっています。

#### アライメント調整

標準で付属している補正用ウェッジ(次ページ③)を加工、使用することで、下肢のアライメント調整をおこなえます。



内外側方向への調整

前後方向への調整

### ウォークオンリアクション ジュニア(28U25)



#### ウォークオン リアクションに KIDS サイズ登場

#### カーボンのたわみと反発力

カーボン素材でできた足底部のたわみ・反発力は自然な踏み返しを補助します。

立脚後期では背屈制動をするとともに、つま先離れの際の反発力を生み出します。

反発力は推進力となり、滑らかに次の一步を踏み出すことができます。



## 製品規格 下記のサイズ表からお選び下さい。

### ウォークオン トリマブル (28U23)

発注品番	左右	サイズ	適用範囲	
			靴サイズ(cm)	装具高さ(cm)
28U23=R36-39-SHORT		S-SHORT	22.5 ~ 24.0	32
28U23=R36-39		S	22.5 ~ 24.0	35
28U23=R39-42	右	M	24.0 ~ 26.5	36
28U23=R42-45		L	26.5 ~ 29.5	37.5
28U23=R45-48		XL	29.5 ~ 31.0	39
28U23=L36-39-SHORT		S-SHORT	22.5 ~ 24.0	32
28U23=L36-39		S	22.5 ~ 24.0	35
28U23=L39-42	左	M	24.0 ~ 26.5	36
28U23=L42-45		L	26.5 ~ 29.5	37.5
28U23=L45-48		XL	29.5 ~ 31.0	39

### ウォークオン リアクション (28U24)

発注品番	左右	サイズ	適用範囲	
			靴サイズ(cm)	装具高さ(cm)
28U24=R36-39		S	22.5 ~ 24.0	35
28U24=R39-42	右	M	24.0 ~ 26.5	36
28U24=R42-45		L	26.5 ~ 29.5	37.5
28U24=R45-48		XL	29.5 ~ 31.0	39
28U24=L36-39		S	22.5 ~ 24.0	35
28U24=L39-42	左	M	24.0 ~ 26.5	36
28U24=L42-45		L	26.5 ~ 29.5	37.5
28U24=L45-48		XL	29.5 ~ 31.0	39

### ウォークオンリアクション ジュニア (28U25)

発注品番	左右	サイズ	適用範囲	
			靴サイズ(cm)	装具高さ(cm)
28U25=R24-27		S	16.0-18.0	20.5
28U25=R27-30	右	M	18.0-20.0	24.5
28U25=R30-33		L	20.0-22.0	27
28U25=R33-36		XL	22.0-24.0	29.4
28U25=L24-27		S	16.0-18.0	20.5
28U25=L27-30	左	M	18.0-20.0	24.5
28U25=L30-33		L	20.0-22.0	27
28U25=L33-36		XL	22.0-24.0	29.4

共通 ・サイズの選択は、普段の靴サイズを目安にしてください。  
 ・2つのサイズにまたがる場合は、装具高さを考慮してお選びください。

#### お問い合わせ先

オットーボック・ジャパン株式会社 [www.ottobock.com/ja-jp](http://www.ottobock.com/ja-jp)  
 〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル4F  
 TEL. 03-6739-4090(代表) FAX. 03-6739-4097

## 製品構成



#### 側方回内牽引パーツについて

(発注品番 28Z10/28Z10=1 左右兼用)  
 このパーツを用いることにより、装具との一体感を高めることができます。薄手の素材は靴を履いたときの不快感を最小限に抑えます。



- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本カタログの内容は 2024 年 11 月現在のものです。