



ottobock.

Páciens tájékoztató felkar-amputáltaknak

Ottobock Mobilitás Központ:
optimális protetikai megoldások

Quality for life

Az Ön mobilitása fontos számunkra

Az amputáció hatalmas változást jelent nemcsak az érintettek, hanem hozzátartozóik életében is. Az új élethelyzet rengeteg kérdést vet fel – a hivatás, a hétköznapi élet, a szabadidő és az egész társadalmi környezet új kihívások elé állítja Önt. Az Ottobock Mobilitás Központja ezzel a kiadvánnyal is segíti és támogatja Önt, hogy visszanyerhesse mobilitását és elinduljon az önálló élet felé vezető úton.

Az Ottobock a kiemelkedő minőségű, csúcstechnológiát képviselő rehabilitációs eszközök gyártója. Több mint 90 éve a protetikai ellátás élvonalába tartozunk. Elkötelezetten támogatjuk embertársainkat abban, hogy fenntarthassák, vagy visszanyerjék mozgásszabadságukat.

A Mobilitás Központ az Ottobock közvetlen betegellátással foglalkozó részlege, amely támaszkodik a nemzetközi anya-

vállalat tudásanyagára. A rehabilitáció folyamata során a páciensek egyedi protetikai ellátása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a személyes konzultációra, hiszen a bizalom és a megbízhatóság az alapja tevékenységünknek.

Az Ottobock Mobilitás Központok egész hálózatát működteti szerte a világon. Célunk az ellátás egységes, magas színvonalának biztosítása.

A megfelelő protézis ellátás kiválasztása

A modern protézisek magas technológiai színvonalú, mindennapi használatra alkalmas termékek, amelyek lehetővé teszik az Ön számára, hogy hétköznapjait a korábban megszokotthoz hasonló módon élje. Számunkra a legfőbb prioritás, hogy Ön hivatása gyakorlásában, a hétköznapokban és szabad idejében önálló életet élhessen.

Alapigazság azonban, hogy olyan protézis, amely mindenkinek jó, nem létezik. Ami az egyik embernek megnyugtató biztonságot nyújt, másoknak korlátozza a mobilitását. Ezért alapvető fontosságú a személyes konzultáció a Mobilitás


Központban, az Önnek leginkább megfelelő protézis kiválasztásában ugyanis fontos szerepet játszik az Ön:

- egészségi állapota,
- erőnléte,
- a csonk állapota,
- személyes céljai,
- otthoni környezete és körülményei,
- a hivatása támasztotta követelmények.

Ezeket a tényezőket az Ottobock Mobilitás Központban részletesen megvizsgáljuk, hogy végül eljussunk az optimális ellátáshoz.

Célunk az is, hogy minél hamarabb elkezdhesük a

közös munkát és az ideális ellátás tervezése és megvalósítása céljából Önnel, a kezelőorvosával és gyógytornászával rehabilitációs csapatot alkothassunk. Az ellátás menetének világos meghatározása az egyenletes minőség záloga. A rehabilitáció egyes szakaszai mindig a páciensek egyedi igényeihez igazodnak. A rehabilitációs team professzionális segítségére és az Ottobock által kialakított biztonságos struktúrára ügyfeleink bátran támaszkodhatnak.

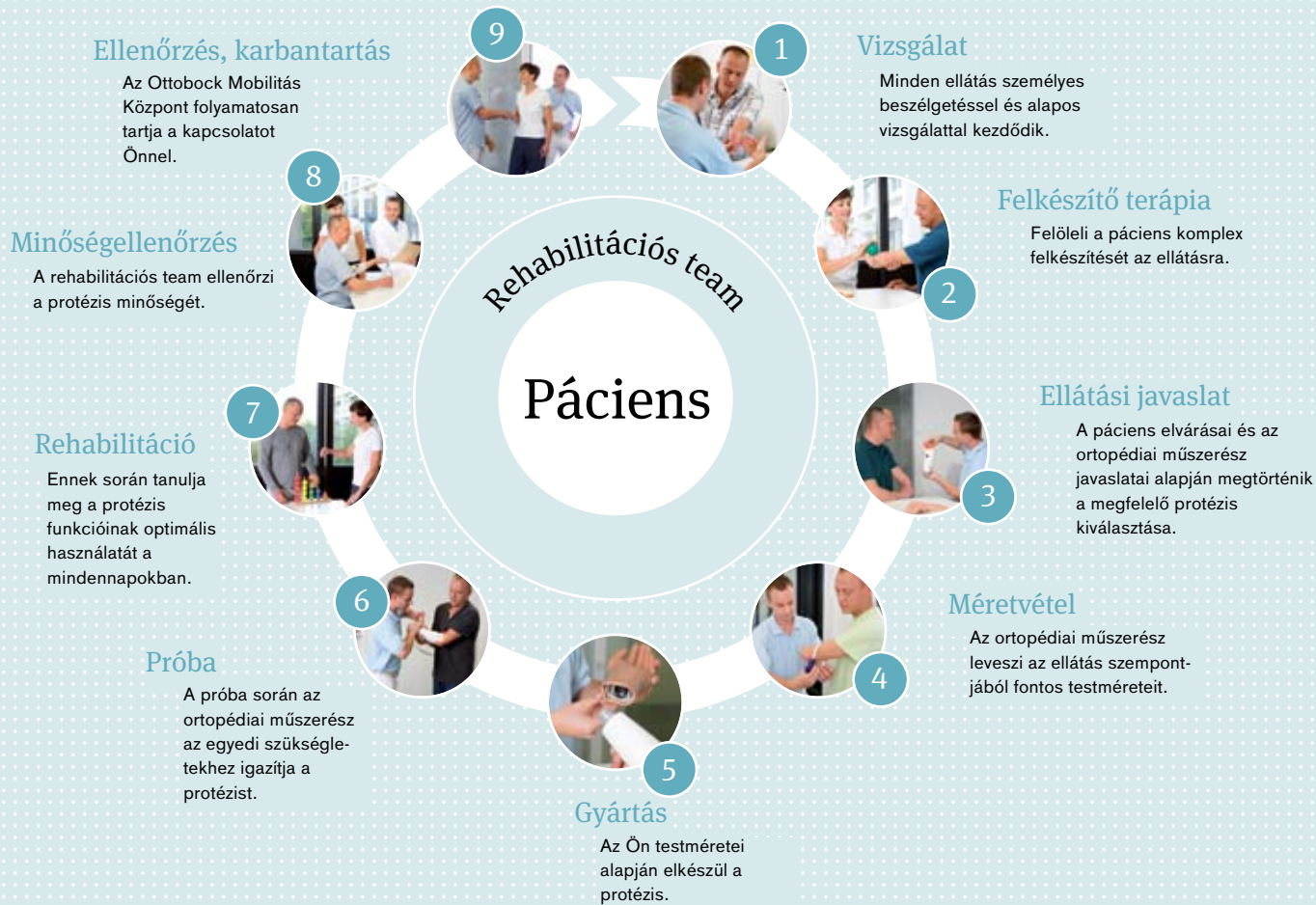

Ideiglenes és végleges protézis

A végleges protézis ellátás előtt az ortopédiai műszerész először ideiglenes protézist készít Önnek, amivel amilyen hamar csak lehet megkezdheti a fogás gyakorlását és a protézis mozgatását.

Az ideiglenes protézis ellátás során az Ottobock Mobilitás Központban többféle protézis alkatrészt is kipróbálhat. Ez azért is fontos, hogy pontosabb képet kaphassunk az Ön fizikai állapotáról és egyedi szükségleteiről. A próbák alatt az ortopédiai műszerész számos változtatást hajthat végre annak érdekében, hogy

protézise végül az Ön életvitelének leginkább megfelelő komponensekből és egyedi beállításokkal készüljön el.

Végleges protézise moduláris felépítésű lesz. Protézistokból, könyökízületből, csuklóízületből, protéziskézből, valamint adapterekből és összekötő elemekből épül fel.

A moduláris felépítésnek köszönhetően az egyes szerkezeti elemeket egyedileg lehet adaptálni az Ön szükségleteihez.

A protézis felépítése

Felkarprotézis esetén a rehabilitációs team a következő protézis típusokból választhat: myoelektromos, vállhúzós és kozmetikai karprotézisek. Az egyes protézis típusokon belül az Ön szükségletei és igényei szerint lehetőségek széles skálája elérhető.

- 1 **Protézistok (egyedi méretvétel alapján)**
- 2 **Könyökízület**
- 3 **Csuklóízület**
- 4 **Protéziskéz**

Az egyes termékekről részletes információt talál honlapunkon:
www.ottobock.hu





A tok

A protézistok teremt meg a kapcsolatot a csont és a protézis között. Meghatározó eleme a protézisnek, hiszen jelentős mértékben ettől függ, hogy a protézis viselése mennyire lesz kényelmes. Ennek érdekében mindig egyedi méretvétel alapján készül. Személyes konzultáció során az ortopédiai műszerész tájékoztatni fogja a felhasznált anyagokkal, technikákkal ill. tokformákkal kapcsolatos tudnivalókról.

Könyökízület

A könyökízület feladata a protéziskéz funkcionalitásának kiegészítése, a végrehajtott mozgások komplexebbé tétele, ami elősegíti a sokoldalú felhasználást. A megfelelő ízület kiválasztása befolyásolja a kar hajlítását és nyújtását, nehezebb tárgyak felemelését és megtartását. Az ortopédiai műszerész segíteni fog az optimális könyökízület kiválasztásában.

Csuklóízület

A csuklóízület arra szolgál, hogy a protéziskéz helyzete optimálisan igazodjék a megfogandó tárgyhoz. A protézis csuklóízületét kozmetika borítja, így megjelenése természetes hatást kelt.

Protéziskéz

A megfelelő protéziskéz kiválasztásának központi jelentősége van. A kéz természetes funkciója rendkívül komplex. Összesen 27 csontnak, 39 izomnak és 36

ízületnek kell tökéletesen együttműködni az egészen hétköznapi dolgok elvégzéséhez is. A protézis viselője számára az egyik legnagyobb kihívást éppen ezek a hétköznapi tevékenységek jelentik.

Az amputált kéz funkcióinak átvételére természetes kinézetű protéziskezek, elektromotoros munkakezek vagy a ma már ritkán alkalmazott kampók használatosak. A protéziskéz nyitható vagy zárható, meg lehet vele fogni tárgyakat, sőt terhet is fel lehet emelni vele. Személyes konzultáció során az ortopédiai műszerész részletesen tájékoztatni fogja a különböző ellátási lehetőségekről.

Ellátás myoelektromos karprotézissel

A modern myoelektromos karprotézisek magas funkcionalitásúak és minden korcsoportban az aktív életvitelű protézisviselőket támogatják. Akkumulátorral működő protézisekről van szó, nem viselőjük izomereje, hanem elektromotorok mozgatják. Elektródák érzékelik a csonk izmainak megfeszülését, és az elektromos jelet továbbítják a protézis elektronikájába.

A mai protézisek optimálisan egyesítik a funkcionális és esztétikai szempontokat. Viselője az aktuális helyzetnek megfelelően pontos erősséggel megfoghat bármit és a fogást biztonságosan fenntarthatja. Ellátástól függően a protéziskéz különféle fogási módokra és kézpozíciók felvételére képes.

A myoelektromos karprotézisek visszaadják a természetes testtartást, és fenntartják a kétkezes életmód lehetőségét.





Ellátás vállhúzó karprotézissel

Legyen szó erő kifejtést követelő munkákról, vagy szennyeződéssel járó tevékenységekről: a vállhúzó protézisek megbízható és hosszú élettartamú ellátást jelentenek. A vállhúzó karprotéziseket viselőjük a saját erejével mozgatja. Az erőt a vállon át

vezető húzóbandázs továbbítja a protéziskézhez. Felkar protéziseknél egy háromhúzó bandázs teszi lehetővé a karhajlítást, a könyök rögzítését, a váll célzott mozgása pedig a protéziskéz záródását és nyitását vagy a fogást.

Ellátás kozmetikai karprotézissel

Azoknak a protézisviselőknél, akiknek az ellátásnál fontos szempontot jelent az esztétikum, a kozmetikai karprotézisek kínálják a lehető legjobb megoldást. A modern méretsorozatos kozmetikai borítások nagyon természetes hatást keltenek, miként a tükrözési elvet követő protézisek is, melyek az ép kar

hasonmásai. Az esztétikai előnyön túlmenően ez a protézis segíti a hétköznapi funkciókat is. Meg lehet vele támasztani tárgyakat és terhelésnek lehet kitenni. További fontos előnye, hogy elősegíti az egészséges testtartást. Javítja az egyensúlyt, megelőzve ezzel a rossz tartás okozta egészségkárosodást.



A protetikai ellátás mindig egyedi. Készséggel várjuk Önt személyes konzultációra az Ottobock Mobilitás Központban. Tapasztalatunkkal, termékismeretünkkel és világszerte működő szervizhálózatunkkal állunk rendelkezésére. Egyeztetesen velünk időpontot, munkatársaink várják hívását.

Szolgáltatásaink iránt érdeklődők számára előzetes időpont egyeztetés szükséges. Kérjük keressék munkatársainkat és kérjenek időpontot a tanácsadásra!

Megközelítés



Gépkocsival A Mobilitás Központ Budapesten a XIII. kerületben, a Reitter Ferenc utcával párhuzamos 2. utcában található a Fáy utca és a Zsinór utca között. Az épület előtt ingyenes parkoló áll rendelkezésre.

Tömegközlekedéssel a Keleti pályaudvarról a 30, 30A és 230 jelzésű buszokkal a Fáy utcai megálló, majd 5 perc séta.

Nyitva tartás

Hétfő-Csütörtök: 8.00 – 16.30, Péntek: 8.00 – 14.00

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vagy további információra lenne szüksége, keressen bennünket.

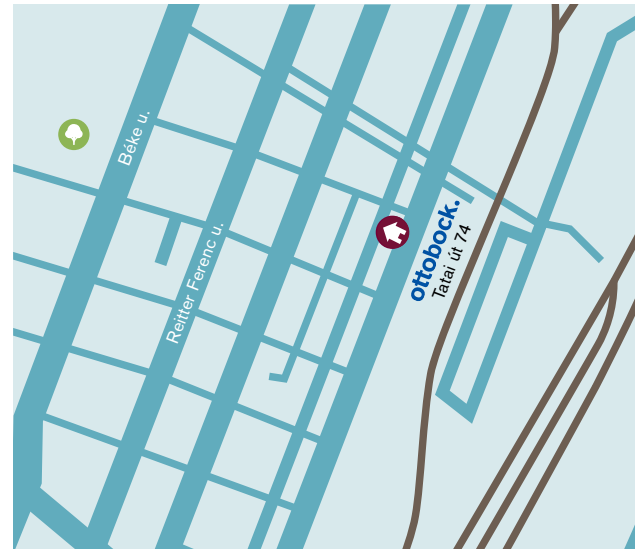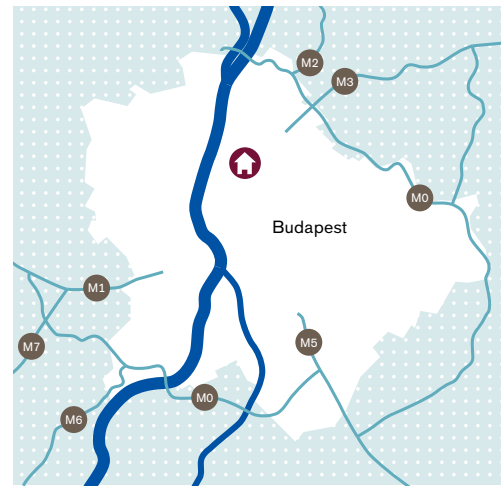

Otto Bock Hungaria Kft.
1135 Budapest · Tatai út 74.
T 06 1 451 1020 · F 06 1 451 1021
info@ottobock.hu · www.ottobock.hu/mobilitaskozpont