

5A60 cupa protetică Varos / 6Y200 manșonul de bont Varos

Încă de la început.

Flexibil, personalizat și ușor

Cupa protetică Varos și manșonul Varos sunt recomandate ca o combinație pentru o adaptare provizorie și definitivă fiabilă, destinată utilizatorilor cu amputație transfemurală – încă de la început. Cupa protetică prefabricată permite o asamblare rapidă și o adaptare personalizată. Acest lucru reduce semnificativ atât numărul, cât și durata vizitelor necesare pentru ajustarea protezei. Cupa protetică Varos este combinată cu un manșon special, care distribuie uniform presiunea pe bont.

Ca rezultat, combinația dintre cupa protetică Varos și manșonul Varos oferă utilizatorilor avantajele unei flexibilități și funcționalități superioare în comparație cu cele convenționale. De exemplu, utilizatorul poate pune și da jos cupa protetică cu ușurință – chiar și atunci când este așezat. Datorită sistemului Boa Fit, utilizatorii pot regla singuri cupa protetică Varos și o pot adapta la variații volumetrice ale bontului și la activități diverse, dacă este nevoie.



Rezumat – condiții prealabile:

Nivelul amputației:

Transfemural (unilateral/bilateral)

Forma bontului:

Cilindrică sau conică

Starea bontului:

- Fără modificări cutanate
- Fără tulburări senzoriale
- Fără contracturi cicatricele pronunțate

Dexteritate:

Suficientă pentru manipularea Sistemului Boa Fit

Specificații tehnice

Cupa protetică Varos	Varos S	Varos SC	Varos M	Varos MC	Varos L
Denumire articol	5A60=(L/R)-S	5A60=(L/R)-SC	5A60=(L/R)-M	5A60=(L/R)-MC	5A60=(L/R)-L
Parte	Stânga (L) / Dreapta (R)	Stânga (L) / Dreapta (R)	Stânga (L) / Dreapta (R)	Stânga (L) / Dreapta (R)	Stânga (L) / Dreapta (R)
Conexiune distală	Conexiune cu patru șuruburi	Conexiune cu patru șuruburi	Conexiune cu patru șuruburi	Conexiune cu patru șuruburi	Conexiune cu patru șuruburi
Lungime bont	200-320 mm	200-320 mm	200-320 mm	200-320 mm	200-320 mm
Circumferința distală a bontului	320-390 mm	320-390 mm	350-440 mm	350-440 mm	400-490 mm
Circumferința proximală a bontului	410-510 mm	460-580 mm	460-580 mm	520-650 mm	520-650 mm
Grad de mobilitate	Grad de mobilitate 1-4	Grad de mobilitate 1-4	Grad de mobilitate 1-4	Grad de mobilitate 1-4	Grad de mobilitate 1-4
Masa corporală maximă	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	125 kg
Masa	1.320 g*	1.320 g*	1.320 g*	1.320 g*	1.320 g*

* înainte de a fi scurtată

Manșonul de bont Varos

Denumire articol	6Y200=S-1	6Y200=SC-1	6Y200=S-2	6Y200=SC-2	6Y200=M-1	6Y200=MC-1	6Y200=M-2	6Y200=MC-2	6Y200=L-1	6Y200=L-2
Circumferința distală a bontului	310-350 mm	310-350 mm	330-370 mm	330-370 mm	360-410 mm	360-410 mm	390-440 mm	390-440 mm	400-450 mm	430-490 mm
Circumferința proximală a membrului rezidual	420-490 mm	480-550 mm	450-520 mm	510-580 mm	480-550 mm	530-610 mm	510-580 mm	560-650 mm	530-610 mm	560-650 mm
Parte	Utilizare bilaterală	Utilizare bilaterală	Utilizare bilaterală	Utilizare bilaterală	Utilizare bilaterală	Utilizare bilaterală	Utilizare bilaterală	Utilizare bilaterală	Utilizare bilaterală	Utilizare bilaterală