

## Hjælpemiddel til udvælgelse af patienter til C-Brace®

Dette hjælpemiddel til udvælgelse kan hjælpe med at afgøre, om en patient er egnet til en C-Brace®. Dette dokument bør dog kun betragtes som et hjælpemiddel. For at træffe den endelige beslutning skal patienten udstyres med en diagnostisk prøveortose (DTO).

### Kognitive krav

Patienten skal være i stand til at håndtere, pleje og anvende ortosen korrekt (f.eks. høre akustiske signaler).

### Funktionsbegrænsninger

Neuromuskulær instabilitet i knæleddet i sagittalplanet

Diagnose (stillet af lægen):

.....

Berørt side:

.....

### Udelukkelseskriterier

Hvis nogen af følgende kontraindikationer gælder din patient, kan han/hun ikke udstyres med en C-Brace® på nuværende tidspunkt:

Ikke muligt at starte svingfasen fra stående stilling

Legemsvægt på over 125 kg

Svær spasticitet

Benet er mere end 15 cm kortere

Fleksionskontraktur i knæet og/eller hofteleddet på over 10°

Utilstrækkelig neuromuskulær stabilitet i torso til prøvefasen

Sygdomme, der udelukker brug af en ortose (f.eks. ødem, omfattende hudirritation)

Ortopædisk protese

O&P Professional		Customer	
Name	<input type="text"/>	Company	<input type="text"/>
Telephone	<input type="text"/>	Branch	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>	City	<input type="text"/>