



FOR KIDS!

小児用カーボン製短下肢装具

ウォークオンリアクション ジュニア (28U25)

ottobock.



Quality for life

軽くて丈夫! カーボン製短下肢装具 ウォークオンリアクション ジュニア

ウォークオン リアクションに KIDS サイズができました!


製品ポイント

- 軽くて丈夫なカーボン製
- シンプルなデザインで外観が良い
- カーボン支柱のたわみと反発力で歩きやすい
- 付属パーツでユーザーに合わせた調節が可能

適応例

主には下垂足のお子様
(二分脊椎、脳性麻痺、小児性片麻痺など)

※ 軽量で足関節筋力の弱いお子様に適しています。

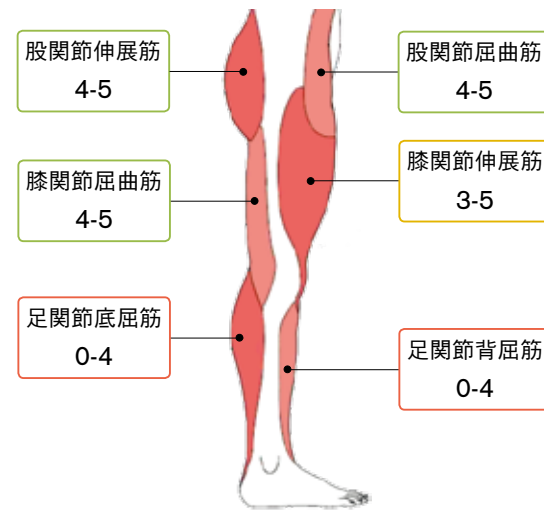

MMT による下肢筋力のイメージ図

MMT を計測したときの、適応筋力のイメージです。



カーボンのたわみと反発力

カーボン素材でできた足底部のたわみ・反発力は自然な踏み返しを補助します。

立脚後期では背屈制動をするとともに、つま先離れの際の反発力を生み出します。

反発力は推進力となり、滑らかに次の一步を踏み出すことができます。

各部の特長

ソフトカバー

柔らかい布地のカバーです。
取り外して洗濯可能。


前面支持部

前面支持であるため、後方から足を簡単に入れることができます。大きな支持面は、床反力を利用した調整の際に、下腿を誘導するのに適しています。



補正用ウェッジ

付属のウェッジを足底部に使用し、ユーザーに合わせた調節が可能です。

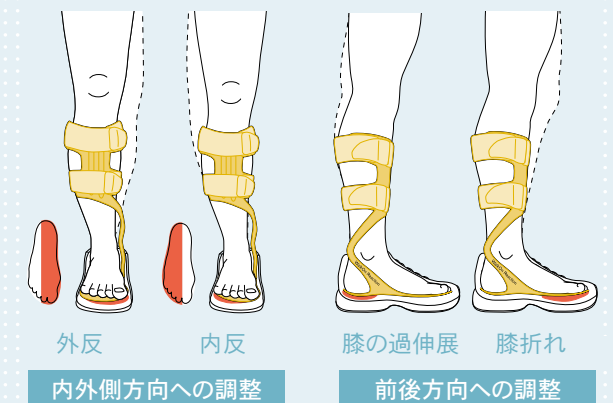


カーボン製の支柱 + α

カーボン製の支柱は立脚期に底背屈制動します。表面が白くなっているのは、高強度ポリエチレン繊維の層です。表面一層に巻き、しなりに強い構造になっています。

足底部

足底部もカーボン製で、踏み返しをサポートします。足の大きさに合わせて加工しやすいよう、カーボンより一回り大きいゴム底がついています。

インソールを併用した足部補正も可能です。

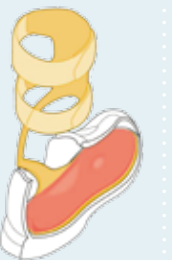

試してみてね

試着用デモ機のご用意があります。
担当の義肢装具士にご相談ください。



『みなさん、はじめまして! タバルガです』

タバルガはドイツのロックミュージシャンによって 1983 年に生み出されたキャラクターです。グリーンランドの王子として敵国から守るため、空を駆け抜け、火を吹き奮闘するお話は、ミュージカルやアニメ、絵本にもなってドイツの子供たちに愛され続けています。オットーボックは 2017 年よりタバルガを小児製品のキャラクターとして迎えました。



製品同梱 付属パーツ内容

お買い上げ頂きますと本体の他に下記パーツと一緒にお届けします。



付属パーツ

- ① ソフトカバー
- ② 補正用ウェッジ
- ③ 脛骨用クッションパッド
- ④ 側方回内牽引パーツ ※
- ⑤ ④のためのノリ付き面ファスナー

※ 側方回内牽引パーツ使用方法

内反位の足部を装具に固定することができます。
(痙性が高い場合には向いていません)



タバルガの
バッグでお届け



発注品番

発注品番	左右	サイズ	参考靴サイズ (cm)	装具高さ (cm)
28U25=R24-27	右	S	16.0-18.0	20.5
28U25=R27-30		M	18.0-20.0	24.5
28U25=R30-33		L	20.0-22.0	27
28U25=R33-36		XL	22.0-24.0	29.4
28U25=L24-27	左	S	16.0-18.0	20.5
28U25=L27-30		M	18.0-20.0	24.5
28U25=L30-33		L	20.0-22.0	27
28U25=L33-36		XL	22.0-24.0	29.4

お問い合わせ先



- ・本カタログは医師や理学療法士、義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本カタログの内容は 2017 年 07 月現在のものです。