

Skeo Up Daily Assist.

14Y4=*

Skeo Up Daily Assist 14Y4 це пасивний водонепроникний функціональний пристрій, виготовлений із силікону. Він одягається як лайнер і дозволяє користувачеві тримати предмети. Силіконовий контур відповідає чотирьом пальцям, а вставлений пластиковий затискний адаптер 9S405=1 (завжди входить до комплекту 14Y4=*) дозволяє затискати предмети товщиною до 4 см (наприклад, зубні щітки, бритви). Функціональний пристрій особливо підходить для використання у вологих приміщеннях, наприклад, для процедур особистої гігієни.

Кількість	Назва	Номер артикулу
1	Інструкція з використання	-
1	Skeo Up Daily Assist	-
1	Затискний інструмент	9S405=1

Доступні розміри

Виріб доступний у таких розмірах (обхват кінцівки в мм): 140, 160, 180, 200, 220

Показання

- Рекомендовано при довжині кінцівки більше ніж 10 см
- Трансрадіальна ампутація або дисмелія
- Одностороння або двостороння ампутація

Протипоказання


- Остеоінтеграція
- Шкірні захворювання, травми шкіри, запалення, рельєфні рубці з набряком, почервонінням і перегріванням в оброблюваній ділянці тіла

Важливі вказівки щодо використання

Цей виріб призначений для використання у вологих приміщеннях при щоденному використанні протягом 2 годин. Зверніть увагу, що цей виріб не призначений для використання в компресійній терапії.


Перше використання

Виріб слід носити максимум 30 хвилин. Після цього слід оглянути кінцівку на наявність стиснень або слідів. Якщо не виявлено жодних проблем, час носіння можна збільшувати з кожним наступним використанням.

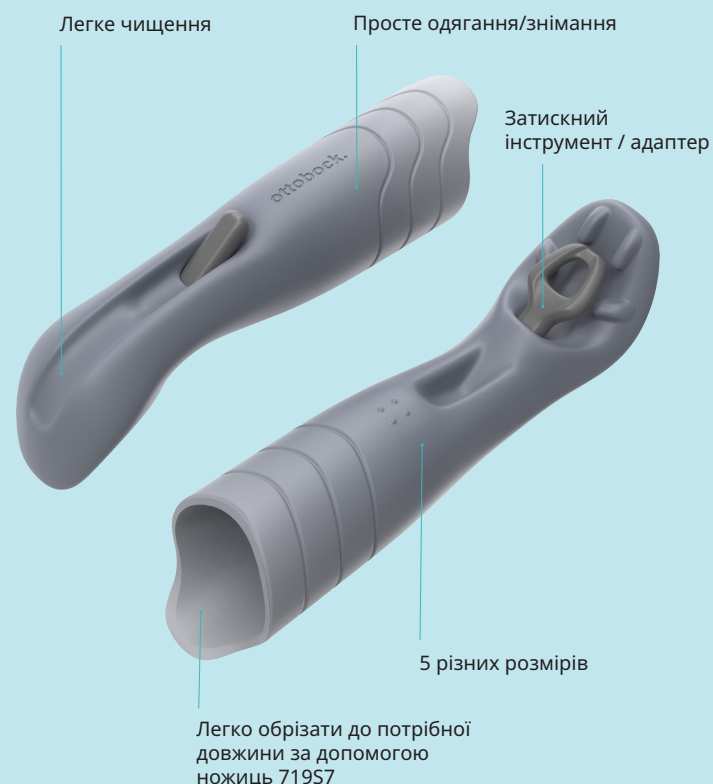


Skeo Up Daily Assist.

14Y4=*

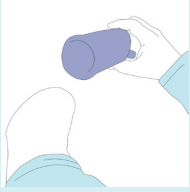

Одягання

Виверніть силіконовий матеріал навиворіт або згорніть його в рулон, покладіть на кінець кукси та вирівняйте його. Переверніть кінцівку без зміщення м'яких тканин та повітряних кишень. Коротко підніміть проксимальний край, щоб зняти напругу в шкірі.

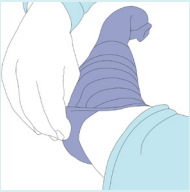


Знімання

Виверніть силіконовий матеріал навиворіт і зніміть функціональний пристрій із кінцівки. Для цього обережно потягніть за клапан. limb. To do this, pull carefully on the flap.




Водонепроникний і легко чиститься

Виріб особливо підходить для використання у вологих приміщеннях, наприклад, для процедур особистої гігієни. Для очищення виробу ми рекомендуємо мити його зсередини й зовні вручну теплою водою з нейтральним милом. Залишки мила слід ретельно змити чистою водою. Для сушіння функціонального засобу всередину можна покласти рушник, який потім слід покласти на сушарку для одягу.

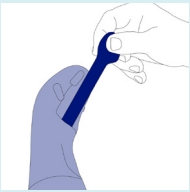

Затискний інструмент / адаптер


Затискний інструмент має характерну форму й достатньо міцно прилягає до силікону виробу. Його можна легко зняти для чищення або заміни.

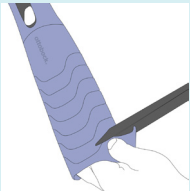


Обрізка по довжині

Щоб обрізати виріб до потрібної довжини, скористайтесь ножицями 719S7. Лінії виробу можна використовувати як контур. Переконайтеся, що край відрізу рівний, щоб запобігти розриву.

Приклади використання:

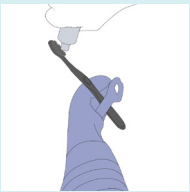

Затиснути предмет у руці, наприклад, зубну щітку, бритву

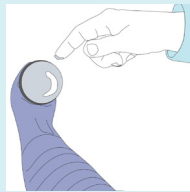

Взяти предмет у руку, наприклад, баночку з кремом



Підтримка у двосторонніх діях, наприклад, затискання журналу