

4R11 着脱アダプター

ottobock.

4R11 着脱アダプターは、ソケットの遠位をワンタッチで取り外すことができるアダプターです。

メリット

- ・ズボンの着替えや靴の脱ぎ履きなどの動作が改善
- ・長時間の着席時に断端への負担を軽減
- ・スポーツ義足と日常用義足の付け替えが簡単

製品機能

- ・ユーザー自身が操作
- ・本体を回旋させてロック・ロック解除
- ・小児パーツにも対応(4X907=1を使用)
- ・海水、塩素水に対する防水性



防水

テクニカルデータ

				
組合せ	4R11=P-1-1 4R11=R-3-2	4R11=R-1-1 4R11=R-3-2	4R11=ST-1-1 4R11=R-3-2	4R11=ST-2-1 4R11=R-3-2
適応	成人 / 小児：下腿義足、膝義足、大腿義足、股義足(成人のみ)			
モビリティグレード	1-4			
体重制限	150 kg			
体重制限 (スポーツでの使用)	125 kg			
実長	44 mm	55 mm	41 mm	41 mm / 43 mm with 4X907=1
重さ	370 g	370 g	330 g	325 g
接続	ピラミッド / レシーバー	レーザー / レシーバー	スクリュートップ / レシーバー	スクリュートップ (小児) / レシーバー



簡単操作

4種類のコネクターから選択

小児パーツにも対応

4R11 着脱アダプター

使用例



長時間の移動やデスクワークに

ソケットより遠位を外すことで、義足の重さが断端にかからず、負担を軽減できます。これにより、長時間の着席が楽になります。



着替えに

足部を外すと、細いズボンを簡単に履くことができます。



スポーツ用と日常用の義足の付け替えに

ひとつのソケットで、目的に合わせた義足への付け替えが可能です。

狭い座席に

ソケットから遠位を外すと、狭い座席でも快適に座れます。車の後部座席や飛行機などで便利です。

靴の脱ぎ履きに

ブーツなど、義足をつけたままでは履きにくい靴の脱ぎ履きに便利です。

構造



コネクションパーツの溝が着脱アダプター本体のバーに嵌まります。着脱アダプター本体を回旋させてロック・ロック解除します。

それぞれ必要な部品をご注文ください

発注品番	イメージ	品名
4R11=R-3-2		着脱アダプター 本体
4R11=P-1-1		コネクションピラミッド
4R11=R-1-1		コネクションレシーバー
4R11=ST-1-1		コネクションスクリュートップ
4R11=ST-2-1		コネクション小児スクリュートップ
4X907=1		小児用リデューサー (レシーバー用)

⚠ 使用上の注意

- ロック後は、荷重しながら増し締めを行ってください。
- 子どもがアダプターをロックする際は、大人が手伝ってください。
- 長期間ロックしたままの場合、ロックを解除しても取り外しができない場合があります。その場合は下記の手順を行ってください。
 1. 安全を確保しロックを解除する。
 2. 義足側を少し開く。
 3. 外れるまで、義足足部の内側で床を軽くたたく。

— お問い合わせ先 —