

オットーボック装具 取扱引書 ②（製品篇）

4085 サムフォーム ロング

義肢装具士をはじめとする医療従事者の方々へ

このたびは本製品をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。本製品を安全にお取扱いいただくために、ご使用前に必ず取扱引書①（基本篇）と取扱引書②（製品篇）をよくお読みいただき、使用される方に装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などを必ずご案内ください。
また取扱引書①②は、必要な際にいつでも参照できるようにお手元に大切に保管してください。

【適応・用途・特徴】

『4085 サムフォーム ロング』は、拇指の CM 関節および中手指節関節の支持と保護をする装具です。

個々に合わせて成形した熱可塑性のプラスチックシート（成形できる支持体）を拇指ポケットに内蔵することで、拇指 CM 関節周囲を広くサポートすることができます。本体にはネオプレン素材を採用し、伸縮性と保温性が得られます。

手関節まで覆える長さですので、より広い範囲でしっかりとサポートできます。



4085 サムフォーム ロング



注意

● 適応については、必ず医師の診断を受けてください。

【サイズの選び方】

各製品ごとに、左右、サイズを選択してください。

（一箱：1 個入り）

発注品番	右左/サイズ		適用範囲	計測位置
			手首周径(cm)	
4085=R-XS	右	XS	13～14	 【サイズの測り方】 イラストのように手首の周径を測ります。
4085=R-S		S	14～16	
4085=R-M		M	16～18	
4085=R-L		L	18～20	
4085=R-XL		XL	20～22	
4085=L-XS	左	XS	13～14	
4085=L-S		S	14～16	
4085=L-M		M	16～18	
4085=L-L		L	18～20	
4085=L-XL		XL	20～22	

・ 計測値が 2 サイズにまたがる場合は、大きい方のサイズをお選びください。

【調整方法と装着手順】



注意

- 本製品を初めて装着される際には、必ず医師、義肢装具士をはじめとした医療従事者による調整と装着手順の指導が必要となります。

装着前に取扱引書①基本篇の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読み、また、医療従事者による装着手順の指導に従って、正しく装着してください。

本体は、付属の熱可塑性プラスチックシートを拇指 CM 関節周囲に合わせて支持体として成形し、内蔵することができます。下記手順を参考に成形を行ってください。



①



②

- ① 全ての面ファスナーを外し、拇指ポケットに付属の熱可塑性プラスチックシートを挿入してください。
- ② 拇指ポケットに75℃程度のお湯を注ぎ、熱可塑性プラスチックシートを柔らかくします。



③ - 1



③ - 2

- ③ 少し冷ましてからお湯を捨て、本体を装着し面ファスナーを留めます。温度に注意し、やけどしないように気を付けてください。

上から軽く押さえ成形します。硬化したら成形完了です。



④ - 1 手の甲側



④ - 2 手掌側

- ④ 写真の通り、正しく装着できているかを確認し、必要に応じ、ズレ、ゆれ、締め付けすぎなどがないように装着状態を調整してください。

【お手入れ方法と注意事項】



注意

- お手入れをされる場合には、取扱引書 ①【お手入れ方法と注意事項】を必ずご覧ください。

・お手入れ前に、すべての面ファスナーを閉じてください。

【品質表示】

本体：ネオプレン、ナイロン / 熱可塑性プラスチックシート：サーボキャスト

掲載内容の無断使用禁止

掲載されている内容、文章、画像については、無断で使用もしくは転載することを禁止します。

お問い合わせ先

輸入販売元

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.com/ja-jp

〒105-0012 東京都港区芝大門 1-9-9 野村不動産芝大門ビル 4F TEL: 03-6739-4090(代表) FAX: 03-6739-4097

O-IFU-4085-202304-PITIN