

5055 アクロ コンフォート

取扱手引書

義肢装具士の方へ

本製品を安全にお取り扱いいただくために、使用前に本取扱手引書をお読みください。また、必要な際に参照できるようにお手元に保管してください。

装着者の方へ、装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などをご案内ください。

使用目的：

伸展屈曲構造により、肩関節の安定を維持します。 本体は、肩関節の解剖学的構造に基づいて設計されています。
本体素材には、マイクロカプセルによる温度調整素材を応用し、温度を常に快適な状態にコントロールし、優れた装着感を得ることが可能です。

適応・用途：


肩の不安定性、過剰動揺性など
※適用については、必ず医師の診断を受けてください。

素材：

ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル

サイズの選び方：

本製品は、以下のサイズより選択することができます。左右兼用です。

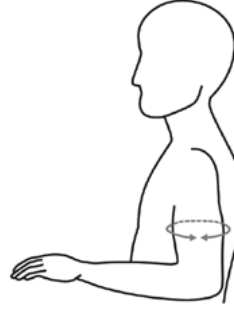発注品番	サイズ	適用範囲	計測位置
		上腕周径(cm)	
5055=XS	XS	24～28	
5055=S	S	28～32	
5055=M	M	32～35	
5055=L	L	35～38	
5055=XL	XL	38～42	

イラストのように上腕の最大周径を測ります。

使用上の注意

- ◆ 装着方法等のお問い合わせやご相談は、医師または義肢装具士にご連絡ください。
- ◆ 本製品は不燃性ではありません。本体を火気に近づけたり、120℃を越える場所に放置したりしないでください。
- ◆ 本体の調整は、医師または義肢装具士をはじめとする医療従事者が行えます。
- ◆ 本製品の機能変更、または機能が損なわれる加工は行わないでください。製品は本来の目的及び、適用範囲にのみご使用ください。
- ◆ ネオプレン素材を使用している製品に関して、4時間を超える連続使用は避けてください。
その他の素材を用いている製品の使用に関して、医師または義肢装具士からの指示などが無い限り、8時間を超える連続使用は避けてください。
- ◆ 使用されている素材に対しアレルギーがある方は、製品を使用する前に医師にご相談ください。本製品に使用されている素材の内容は、上記に記載されています。
- ◆ 本製品を廃棄する際には、各自治体の廃棄区分に従ってください。

装着方法


初めて装着する際は、必ず医師・義肢装具士のもと行ってください。

- 1) 本体に腕を通し、肩の位置まで調整します(写真 1)。
- 2) ベルトを健常側の腋下に回し、胸の上で面ファスナーを留めます(写真 2)。
ベルトに通されている小さなパッドは、ベルトが直接皮膚に接触することで発生する痛みから保護するためのものです。パッドは、スライドさせて適当な位置に調整することができます。
- 3) 異常な運動を抑制するために、肩部分の細いストラップをそれぞれ調整してください(写真 3)。
- 4) 全体を強く締めすぎないように注意し、正しく装着されていることを確認してください。



お手入れの方法

- ◆ すべての面ファスナーを閉じてください。
- ◆ 洗濯の際には 40℃ 以下の水と中性洗剤を使用し、手洗い、陰干しをしてください。
- ◆ 陰干しする際、製品のシワを軽く伸ばしてください。
- ◆ 塩素系漂白剤、洗濯機、脱水機、乾燥機、アイロン、ドライクリーニングなどの使用は行わないでください。

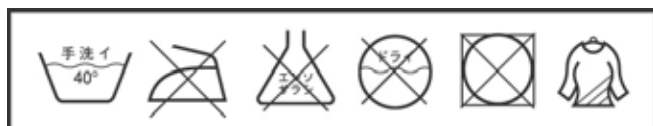

お問い合わせ窓口：

掲載内容の無断使用禁止

掲載されている内容、文章、画像については、無断で使用もしくは転載することを禁止します。

輸入元：オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.com/ja-jp

〒105-0012 東京都港区芝大門 1-9-9 野村不動産芝大門ビル 4F TEL: 03-6739-4090 (代表)