

Kompresivní oblečení *MyActive*.

Pro aktivní zlepšení rovnováhy a kontroly pohybů.

Rodina produktů *MyActive* přináší individuální kompresivní oblečení určené ke zlepšení kontroly pohybu a rovnováhy u lidí s deficitem neuromotorické kontroly. Hlavním účinkem této produktové řady je poskytnutí dostatečné podpůrné funkce bez omezení pohybu a funkce svalů, která pozitivně ovlivní držení těla. Maximálního efektu a vysokého komfortu nošení dosahuje mimo jiné i díky individuálnímu tvarovému obepnutí.

Ortotické vybavení většinou optimalizuje polohu. Koncept kompresivního oblečení *MyActive* se naopak zaměřuje na zlepšení možností funkčního pohybu – dynamické ortézy podporují aktivní pohyb a kontrolu držení těla.

Indikace

Kompresivní oblečení je indikováno pro děti a dospělé s neuromotorickými a muskuloskeletálními deficity, které zhoršují dynamickou stabilitu, posturální aktivaci a kontrolu pohybu.

Kompresivní oblečení může pozitivně ovlivnit tyto symptomy:

- Mírná až těžká (axiální) hypotonie
- Deficity v dynamické stabilizaci, kolísání tonu a nepředvídatelné ovládní pohybu v důsledku dyskineze
- Střední až těžká hypertonie
- Deficity smyslového vnímání celého těla.

Výrobek je zdravotnickým prostředkem, určeným pro zlepšení tělesného pocitu uživatele (well-being), zmírnění spasticity, případně splnění jiných požadavků v závislosti na indikaci. Přečtěte si pečlivě návod k použití.



Kompresivní oblečení *MyActive.*

Účinek

- Kompresivní oblečení má různé síly komprese v závislosti na tělesné partii
- Prostřednictvím hlubokého tlaku a přesného kontaktu zlepšuje vnímání polohy končetin, trupu a středu těla
- Potřebná somatická informace, přenášená prostřednictvím komprese přes hluboké receptory, zdokonaluje funkční pohyb a kontrolu těla
- Zvýšený nitrobřišní tlak zajišťuje stabilizaci a napřímení páteře

Fit Kit 654K3

Protože nelze vždy odhadnout, bude-li mít kompresivní oblečení na uživatele pozitivní vliv, nabízíme testovací Fit Kit obsahující *MyActive Top* ve třech velikostech, které ještě můžete suchými zipy individuálně přizpůsobit.

Pomocí Fit Kitu můžete otestovat, zda bude mít komprese v oblasti trupu a pánve požadovaný vliv na klinický obraz uživatele.

Finální produkt samozřejmě vyrábíme přesně pro konkrétního uživatele na základě 21 získaných měř v případě *MyActive Top*, respektive 34 měř u *MyActive Leggings*.



Testovací Fit Kit verze kompresivního oblečení *MyActive*



MyActive Top
654K1

MyActive Top 654K1

- Oblast trupu: 1vrstvá/2vrstvá
- Rukáv: dlouhý/krátký (možný i rukáv bez lemu)
- Zip: pod prsa, do pasu, průběžný
- Spodní zakončení: silikonové pásky, tříselný díl
- Abdominální zesílení



MyActive Leggings
654K2

MyActive Leggings 654K2

- Kalhoty: 1vrstvé/2vrstvé
- Nohavice: dlouhé/krátké (možné i nohavice bez lemu pro kombinaci s AFO/DAFO ortézou)
- Rozkrok: standardní, zip, pánský klín



Nefyziologické držení těla bez *MyActive*



Zlepšené držení těla s *MyActive*



Více informací a dostupnost na produktové stránce.