

オットーボック装具 取扱手引書

317L20 E-MAG 用 バッテリーチャージャー

義肢装具士をはじめとする医療従事者の方々へ

このたびは本製品をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。本製品を安全にお取扱いいただくために、ご使用前に必ず取扱手引書をよくお読みいただき、使用される方に装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などを必ずご案内ください。また取扱手引書は、必要な際にいつでも参照できるようにお手元に大切に保管してください。

【内容】

- ・チャージャー本体
- ・プラグコネクター

【テクニカルデータ】

動作電圧	100-240V
充電電流	約 250mA、パルス充電・トリクル充電
重量	190g
充電時間	空充電からおおよそ 8-10 時間
動作温度	0 ~ 40°C
環境温度	-10°C ~ +50°C



317L20



【製品】

『E-MAG 用バッテリーチャージャー』は 317B20 E-MAG 用バッテリーを充電するためのチャージャーです。それ以外の用途では使用できません。

【製品寿命】

適切な使用方法にて使用し、3年間使用できるようにデザインされています。

【安全性】

 注意	機械部分の破損：機能の変化や喪失による怪我の恐れ ●扱うときは注意しながら作業してください。 ●充電されているか、また機能するか確認してください。 ●機能の喪失や低下が認められた場合、使用をやめ担当の有資格者またはオットーボックに連絡してください。
 注意	不適切なアライメント、組み立てまたは調整：機能の変更または損失によるけがの危険性 ●組み立て、調整、メンテナンス作業は有資格者のみが行うことができます。 ●アライメント、組み立て、調整の説明書を守ってください。
注 記	過酷な環境にさらして使用する：電子機器部分の破損の恐れ ●適度に乾燥した安定した環境で使用する。 ●液体などがかからないようにする。
注 記	接続部が汚れたり損傷した状態でバッテリーを充電する：充電・バッテリー機能の不足 ●接続部が常に清潔で、グリースがないことを確認してください。 ●接続部を糸くずの出ない布で定期的に清掃してください。 ●鋭利なもので接続部を傷つけないように注意してください。
注 記	バッテリーを充電し続けることは避ける：破損の原因 ●2日以上連続して充電し続けることを避けてください。

注 記

バッテリーチャージャーの誤動作
 ●チャージャーのLEDはバッテリー挿入前は点灯しません。

- 1) バッテリーチャージャーのプラグをコンセントにつなぎます。
- 2) 317B20 E-MAG 用バッテリーを1つもしくは2つ挿入します。
 ※ LED ライトは充電開始からのプロセスを表示し、2つのスロットそれぞれ対応しています。
 空の状態から満充電まで8-10時間かかります。

LED ライト点灯の意味

サイン	意味	備考
継続点灯	充電中	
早い点滅	充電中	
遅い点滅	充電完了	バッテリーを外してください。

故障したかもしれないと思ったとき

>もしバッテリーが充電されないなどあったときは、下記を確認してください。

サイン	考えられる原因	備考
バッテリーを挿入してもLEDライトが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ・バッテリーチャージャーや、コネクタが電源に接続されていない。 ・バッテリーチャージャーの故障 	電源の接続を確認し、それでもライトが点灯しない場合は、担当の義肢装具士にご連絡ください。
1つバッテリーを挿入したがLEDライトが1つしか点灯しない	バッテリーを入れ替えて挿入してみる a) 同じ側のLEDのみ点灯： バッテリーチャージャーの故障 b) 反対側のLEDのみ点灯： バッテリーの故障	バッテリーもしくはバッテリーチャージャーの状況を担当の義肢装具士にご連絡ください。
空バッテリー挿入後すぐにライトが点滅	バッテリーの故障	バッテリーの状況を担当の義肢装具士にご連絡ください。
8時間の充電後点滅しなくなった	バッテリーの故障	バッテリーの状況を担当の義肢装具士にご連絡ください。
バッテリーを外しても、LEDライトが点灯している	バッテリーチャージャーの故障	バッテリーチャージャーの状況を担当の義肢装具士にご連絡ください。

【修理】

電子機器部分に損傷が見られたら、製品ごと取り替える必要があります。

【メーカー責任】

オットーボック社はメーカーとして、本手引書で指定された取扱方法に従って製品を使用し、ならびに適切なお手入れ方法に従って定期的にメンテナンスした場合にのみ、その責任を負います。オットーボック社はまた、本手引書の指示に従って製品の定期的なお手入れと確認を行なっていただくことをお勧めいたします。

お問い合わせ先**掲載内容の無断使用禁止**

掲載されている内容、文章、画像については、無断で使用もしくは転載することを禁止します。

輸入販売元

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.com/ja-jp

〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル 4F TEL. 03-6739-4090 (代表) FAX. 03-6739-4097

O-IFU-C-317L20-202407