

膝関節固定装具〔軟性〕

ゲニュ インモビル 0° (8060)

1. 幅広い周径に適応

3 枚のパーツで構成しており、大腿部と下腿部の周径差が大きい場合にも対応できます。

2. 快適な装着感

肌に触れる内側は綿パイル生地を採用

3. 冷却パック併用固定

膝蓋骨部の細いストラップを利用して、冷却パックを固定することができます。

Quality for life



適応

- ▶ 筋・靱帯損傷
- ▶ 膝関節 術前術後の疼痛
- ▶ 膝蓋骨脱臼

膝関節固定装具〔軟性〕

ゲニユ インモビル 0°
(8060)



▶ 特長

周径調整を容易にする3枚構造

「ゲニユ インモビル 0°」は膝関節を伸展位で保持します。ステアー内蔵のパーツが着脱でき取付位置を調整できるため、大腿部と下腿部の周径差が大きい場合などにも幅広く対応できます。

▶ お客様の声

- ・ 吸汗性に優れ、手洗いもできるから良い
- ・ 太ももとふくらはぎの太さが違ってもしっかりフィット！
- ・ 冷却パックを固定することができて便利です

▶ 簡単装着

3
ステップ



① 前面解放部が、膝蓋骨に位置するように合わせ下部のベルトを閉めます。



② 順番にベルトを閉めれば、装着完了。



③ 冷却パックを併用する場合、膝蓋骨中央のストラップを使用してください。



3枚の構成パーツ



冷却パック併用


▶ 試用用デモ機

装着効果やサイズの確認にご使用いただけるよう全サイズをご用意しています。

- * 右のサイズ表を参考にサイズ選択してください。
- * 義肢装具製作施設からのお貸出しとなります。

▶ 製品サイズ

サイズの測り方

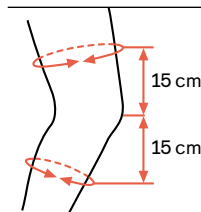

| 発注品番 | サイズ | 全長 (cm) | 適用範囲 | |
|---------|-----|------------|-----------|-----------|
| | | | 大腿周径 (cm) | 下腿周径 (cm) |
| 8060=S | S | 40 | 42~62 | 35~55 |
| 8060=M | M | 50 | 48~68 | 40~60 |
| 8060=L | L | 60 | 52~72 | 42~62 |
| 8060=XL | XL | 70 | 55~75 | 45~65 |

- 左右兼用



ホームページ



フェイスブックでオットーボック製品や活動などご紹介！

検索サイトまたはQRコードにてご覧いただけます。

ゲニユ インモビル 8060



フェイスブック QRコード



お問合わせ先

- ・ 本カタログの適応は海外で認可されたものです。
- ・ 本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・ 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・ カatalogの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。
- ・ 本カタログの内容は2018年7月現在のものです。

オットーボック・ジャパン株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F
www.ottobock.co.jp TEL 03-3798-2111 (代表) FAX 03-3798-2112