

胸椎装具 [軟性]

ドルソ カレッツァ ポスチャー (50R49)



ポイント 1 スパイラルステーの優しい姿勢補助

ポイント 2 伸縮素材による高いフィット性


ポイント 3 目立たないスリムなデザイン

## 特長


背部に内蔵した2本のスパイラルステーにより、体幹のカーブにフィットしながら姿勢を保持します。肩周りを広く開放し、上肢の動きの妨げを最小限にしています。

矯正ほどの圧迫感はなく、そっと支え、姿勢改善を促します。矯正の苦しさを感じにくく、装着を継続しやすくなっています。

- 通気性に優れ、肌触りの良い素材を採用し快適
- 面ファスナーで調整できるため、個別の調節が簡単
- 服を着ても目立ちにくい薄型設計、夏でも目立たない
- 手洗い可能なため、衛生的

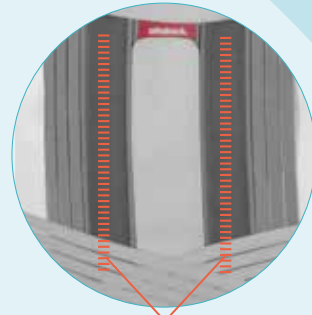

2本のスパイラルステー

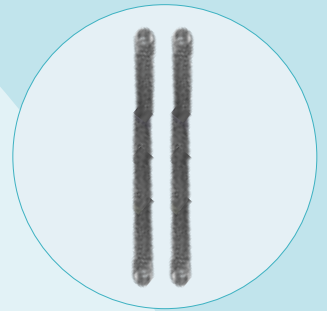

## 適応


- 姿勢不良（ショイエルマン病や脊椎後湾症など）
  - 胸部背痛
- 適応症例は、海外で認可されたものです。

## 簡単装着

3  
ステップ



- ① リュックサックを背負う要領で腕を通します。

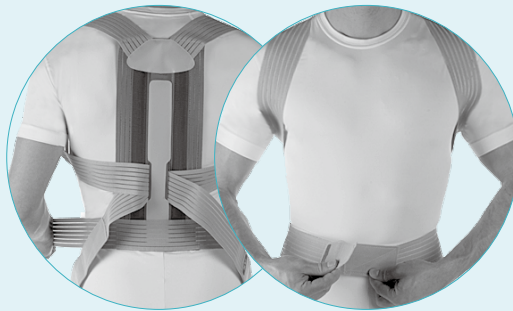

- ② 腹部のベルトを引っ張り、前面で留めます。



- ③ 胸部のベルトを留めて装着完了です。

## 試着用デモ機

装着効果やサズの確認にご使用いただけるようデモ機をご用意しています。

- \* 右のサイズ表を参考にサイズ選択してください。
- \* 義肢装具製作施設からのお貸出しとなります。

## 製品サイズ

サイズの測り方	発注品番	サイズ	適用範囲
			ウエスト周径 (cm)
	50R49=XXS	XXS	60~70
	50R49=XS	XS	70~80
	50R49=S	S	80~90
	50R49=M	M	90~100

《サイズの測り方》イラストのようにウエスト周径を測ります。

ホームページ



製品名 製品番号



ドルソ カレッツァ ポスチャー 50R49



オットーボック製品や活動などご紹介  
フェイスブック QR コード



お問い合わせ先

- 本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- 本誌掲載の製品を使用される際には、必ず義肢装具士および医師が調整を行ってください。
- 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログの内容は 2024 年 3 月現在のものです。