

iconiq.

A kényelem új szintje.

Az **iconiq** liner egy egyedi gyártású szilikon liner, amelynél a digitális munkafolyamatokat (szkenelés és 3D nyomtatás) kombinálják az innovatív alapanyag használatával, a személyre szabott, gyors és hatékony protetikai ellátás érdekében.

Az **iconiq** linerek tökéletesen illeszkednek, hiszen teljesen megfelelnek a felhasználó egyéni anatómiai adottságainak. Az eredmény egy biztonságos, kényelmes felület, amely megbízható felfüggesztést és optimálisan terhelhető felszínt biztosít a mindennapi protézis használat során.

Előnyök a felhasználók számára

- A tökéletes illeszkedés nagyobb komfortérzetet nyújt
- Az egyenletes kompresszió fokozza a stabilitást és megkönnyíti az egésznapos viseletet
- A texturált belső felület biztos tartást eredményez
- Könnyen fel- és levehető
- Egyszerűen tisztítható
- Édes, sós és klóros víz ellen védett
- Egyszerre kényelmes, rugalmas és tartós szilikon anyag

Előnyök az ortopédiai műszerészek számára

- Alkalmas comb-, térdexartikulált és lábszáramputált páciensek számára
- Alkalmas gyermekek és felnőttek számára is bármilyen aktivitási szint esetén
- A falvastagság kialakítható egyenletesen vagy kúpos profillal (3 - 7 mm)
- Egyedi disztális párnamagasság (5 - 13 mm)
- Három anyagkeménységi szint a felhasználó egyéni igényeinek megfelelően
- Tiszta, gipszmentes folyamat
- Könnyen reprodukálható ismétlődő ellátás esetén



Hatékony digitális folyamat.

1

A csont szkennelése

Végezze el a méretvételt egy az ortopédtechnikában gyakran használt szkennerral. Győződjön meg róla, hogy a folyamat befejeződött, és .stl, .ply vagy .obj kiterjesztésű fájlként exportálható.

2

Rendelés

Jelentkezzen be az Ottobock azonosítójával (Ottobock ID) a **custom fabrication** felületre. Töltse fel a szkennelt fájlt, adja meg a páciens adatait, és konfigurálja a linert.


3

Gyártás és szállítás


A liner gyártása 4-8 munkanapot vesz igénybe. A szállítási idő a szállítási helytől függően változik.

A liner egyedi felülete.

Az **iconiq** selymesen sima bevonattal vagy textil külső borítással is rendelhető. A textil változat könnyen fel- és levehető, miközben további stabilitást és kényelmet nyújt. Teljesen vagy részben textillel fedett változatban is elérhető. A textil nélküli változat egyrészt könnyű, könnyen tisztítható, gyorsan szárad, másrészt biztosítja a csont „láthatóságát”, a vizuális ellenőrzés lehetőségét.

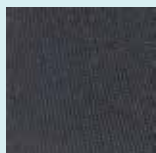

Fekete textil

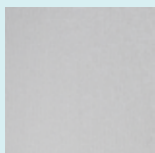

Szürke textil



Bézs textil



Sima szilikon



Texturált belső felület

Műszaki adatok

Cikkszám	Amputációs szint	Függesztési forma	Külső felszín	Szín
6Y800=C-W-W-99	TT, Syme	Vákuum	Szilikon	Átlátszó
6Y801=C-T-W-7	TT, Syme	Vákuum	Textil	Fekete
6Y801=C-T-W-0	TT, Syme	Vákuum	Textil	Bézs
6Y801=C-T-W-1	TT, Syme	Vákuum	Textil	Szürke
6Y830=C-W-W-99	TF, KD	Vákuum	Szilikon	Átlátszó
6Y831=C-T-W-7	TF, KD	Vákuum	Textil	Fekete
6Y831=C-T-W-0	TF, KD	Vákuum	Textil	Bézs
6Y831=C-T-W-1	TF, KD	Vákuum	Textil	Szürke

Rendelési példa

Cikkszám	Függesztési forma	Külső felszín	Adalékanyag	Szín
6Y800	TT	W	W	99
6Y801	TT	T		7
6Y830	TT	W		1
6Y831	TT	F		0



Create your **custom fabrication** account now.
lifelounge.io/custom-fabrication