

股関節装具（内転制限）

コサ アクティブ（28L101）

コサ ジュニア（28L100）

1. パンツに内蔵されたパッドで股関節の内転を制限

脳性麻痺の多くに見られるはさみ足歩行において、膝の交差を防止し、より安定した立位および座位が可能。

2. 体幹の安定性が向上

骨盤のアライメントが補正され、体幹の安定性や歩容が改善。

3. 伸縮性素材で高いフィット感

伸縮性の高い素材でできたパンツは、履きこみ式で簡単に装着。



適応

- 対麻痺
 - 先天性股関節亜脱臼
 - 二分脊椎
 - 股関節異形成
- などの股関節内転制限を必要とする疾患
※股関節脱臼には不向き

股関節装具 (内転制限)

コサ アクティブ (28L101)

コサ ジュニア (28L100)

クロスストラップ
個人に合わせた効果的な設定位置で、
付加する力を調整

伸縮性に富んだ軟性素材

内転防止のパッド
切削加工により厚さが調整可能



◆ 特長


パッドが足を抑え内転位になることを防いでいるため、骨盤のアライメントが補正されます。それにより、体幹の安定性や歩容の改善が見込まれます。

◆ お客様の声

- ・履きやすく、スポーティーで目立たいのが好き
- ・車いすでも、体幹が安定し座位がとりやすくなりました
- ・成長に応じてサイズが豊富なのは、先々安心だわ！

◆ 簡単装着

3
ステップ

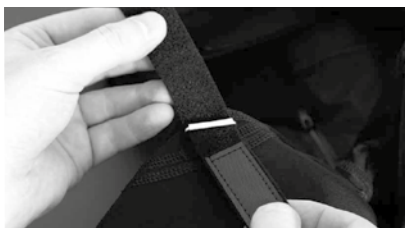

- 1 パッドを取付け、腰ベルトを開きます。(コサ アクティブはジッパーも開きます。)
- 2 パンツを履き、腰ベルトを閉じます。(コサ アクティブはジッパーを閉じます。)
- 3 パッドの位置を確認し、外転調節用ベルトが適切か確認します。



非装着時



装着時

◆ 試用用デモ機

装着効果やサイズの確認にご使用いただけるよう全サイズをご用意しています。

- * 右のサイズ表を参考にサイズ選択してください。
- * 義肢装具製作施設からのお貸出しとなります。

◆ 製品サイズ

	発注品番	ヒップ 周径	大腿部 周径	身長 (参考)	洋服サイズ (参考)
コサ ジュニア	28L100=80	57-59	26-32	74-86	80
	28L100=92	59-62		86-98	92
	28L100=104	62-64	32-36	98-110	104
	28L100=116	64-68		110-122	116
コサ アクティブ	28L101=128	68-72	36-44	122-134	128
	28L101=140	72-78		134-146	140
	28L101=152	78-86	44-54	146-158	152
	28L101=S	86-96		158-170	164 レディース5号 / メンズXS
	28L101=M	96-105		-	レディース7,9号 / メンズS,M
28L101=L	105-109	54-62	-	レディース11,13号 / メンズL,LL	
				-	レディース15,17号 / メンズ3L

お問い合わせ先

- ・本カタログの適応は海外で認可されたものです。
- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。
- ・本カタログの内容は 2024 年 11 月現在のものです。

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.com/ja-jp
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル4F
TEL. 03-6739-4090(代表) FAX. 03-6739-4097