

## 頸椎装具 [ 軟性 ]

スマートスパイン ユニバーサル カラー (50C91)

### 1. 大きい背面支持部


大きな背面支持部で、頸椎をしっかりサポートできます。

### 2. 取外し可能なパッド

面ファスナーで簡単に取外しできるため、洗濯などのお手入れが簡単にできます。

### 3. 医療現場に即した仕様 (MRI 検査に対応)

気管部分の大きな開口は気管切開に適し、また金属を用いていないため MRI 検査を受けることも可能です。

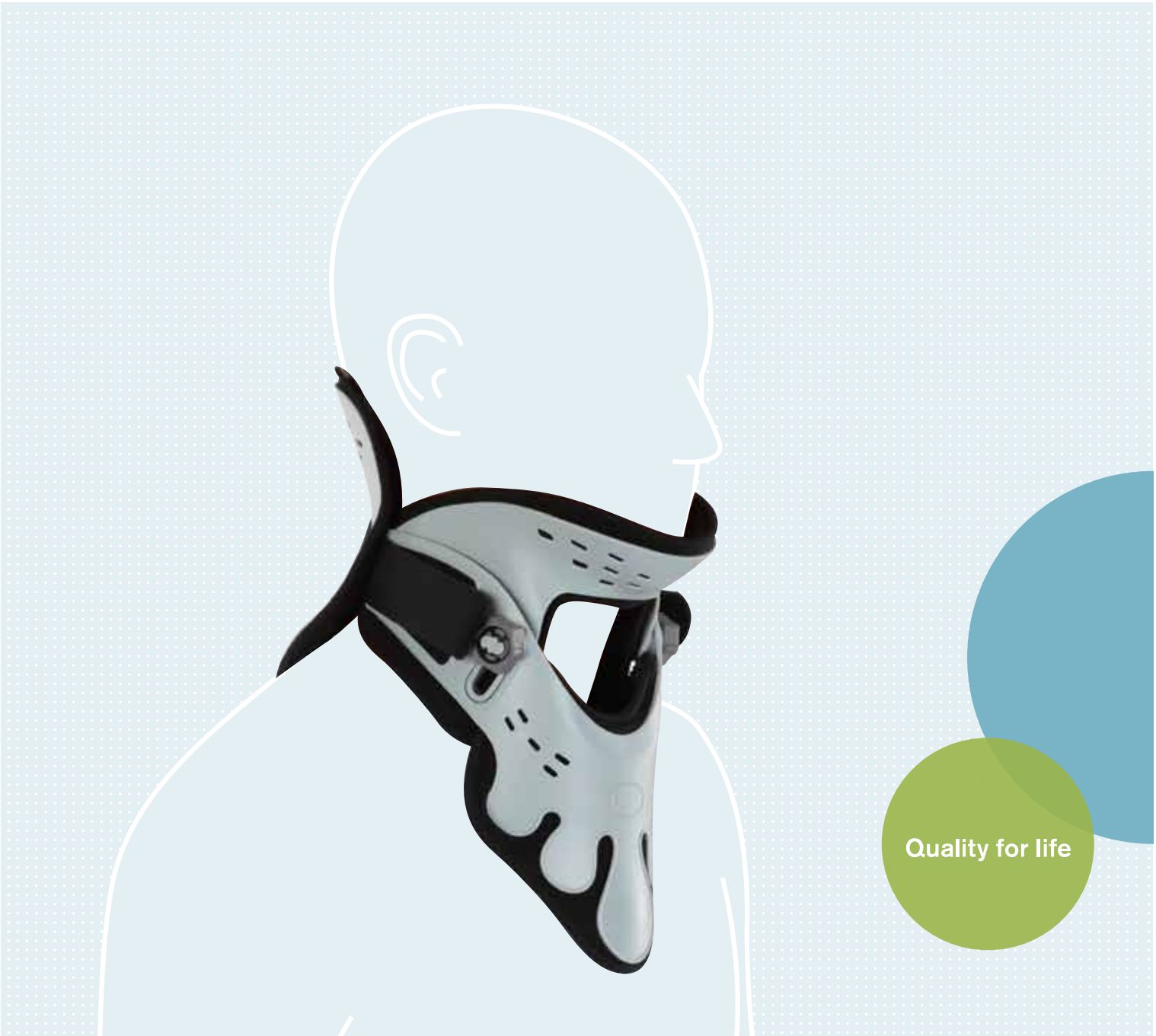

# 頸椎装具 [ 軟性 ]

## スマートスパイン ユニバーサル カラー (50C91)

### ▶ 特長

頸部全体を覆う構造になっており、しっかりと頸椎をサポートすることができます。

素材に金属を使用していないので、MRI 検査時にも装着したままの状態での検査を受けることが可能です。気道開口部により、気管切開にも対応するなど医療現場のニーズに即した仕様となっています。



### ▶ 義肢装具士による調整方法

- ① ロックがフリー(開)の状態であることを確認
- ② 角度を9段階で左右同じように設定
- ③ 両側のロックを時計回りにロック(閉)の位置まで回します。  
矢印を水平方向に合わせます。※

※注: 強い力で回し、プラスチックをかみ込ませるようにしますが、繰返し調整を想定していないため、何度も回すと破損する恐れがありますのでご注意ください。

- ④ 片側の面ファスナーを開きます。前面部を前から首に当て、顎をくぼみに合わせます。
- ⑤ 後方から後面部を当て、再び面ファスナーを閉じます。
- ⑥ 面ファスナーは短く切って必要な長さにします。




### ▶ 試用用デモ機

装着効果やサイズの確認にご使用いただけるよう全サイズをご用意しています。

- \* 右のサイズ表を参考にサイズ選択してください。
- \* 義肢装具製作施設からのお貸出しとなります。

### ▶ 製品サイズ

#### サイズの測り方

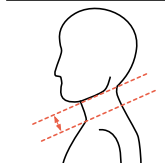

発注品番	サイズ	適用範囲
		顎先から胸骨上端 (cm)
50C91	フリーサイズ(ユニバーサル仕様)	6.4~12.7
29C21	交換用パッド	

イラストのように首の高さを測り、サイズを選択します。



ホームページ



フェイスブックでオットーボック製品や活動などご紹介!

検索サイトまたはQRコードにてご覧いただけます。 [スマートスパイン ユニバーサル カラー](#)



フェイスブック QR コード



#### お問い合わせ先

- ・本カタログの適応は海外で認可されたものです。
- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。
- ・本カタログの内容は2019年1月現在のものです。

オットーボック・ジャパン株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F  
www.ottobock.co.jp TEL 03-3798-2111 (代表) FAX 03-3798-2112