

## Procomfort Gel. 633S2.

Procomfort Gel je speciální aplikační gel určený k usnadnění nasazování protézy nebo epitézy a je nezbytnou součástí jejich každodenního používání. Je vhodný pro všechny typy pahýlových lůžek, kde účinně snižuje tření mezi pahýlem a lůžkem při nasazování i snímání protézy.

Gel se snadno aplikuje, dobře se roztírá a je praktický pro použití v domácím i klinickém prostředí. Díky vodní bázi umožňuje pohodlné a šetrné vklouznutí pahýlu do lůžka či silikonové protézy/epitézy, podporuje bezpečné a dlouhodobé nošení a pomáhá chránit měkké tkáně pahýlu před podrážděním či poškozením. Navíc nezanechává mastný film, který by mohl způsobit sklouznutí protézy nebo degradování materiálu vnitřního lůžka.

### Vlastnosti a výhody

- Usnadňuje nasazování a snímání protézy nebo epitézy
- Snižuje tření mezi pahýlem a pahýlovým lůžkem
- Podporuje šetrné a bezpečné nošení protézy
- Zlepšuje přilnutí protézy či epitézy k pahýlu
- Vhodný pro všechny typy pahýlových lůžek
- Použitelný pro protézy horních i dolních končetin
- Vodní báze – rychle se vstřebává a nezanechává mastný film na pokožce
- Vhodný pro použití v domácím i klinickém prostředí
- Objem balení: 250 ml



## Procomfort Gel. 633S2.



### Postup aplikace

Na čistý a suchý pahýl naneste přibližně 3–5 ml gelu (odvíjí se dle velikosti pahýlu). Gel rovnoměrně rozetřete po pokožce. Následně nasadte protézu nebo epitézu – gel umožní snadné a pohodlné vklouznutí do lůžka. Po nasazení se gel rychle vstřebá do pokožky a nezanechá mastný film.

### Upozornění

Běžné kosmetické či dermatologické krémy, zanechávající na pokožce mastný film, nejsou vhodnou náhradou – mohou vyvolat podráždění pokožky nebo alergickou reakci, způsobit sklouznutí protézy nebo degradaci materiálu vnitřního pahýlového lůžka. Takto vzniklé poškození bohužel nemůže být předmětem případné reklamace.