

オットーボック装具 取扱手引書 ②（製品篇）

28L101 コサ アクティブ / 28L100 コサ ジュニア

義肢装具士をはじめとする医療従事者の方々へ

このたびは本製品をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。本製品を安全にお取扱いいただくために、ご使用前に必ず取扱手引書①（基本篇）と取扱手引書②（製品篇）をよくお読みいただき、使用される方に装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などを必ずご案内ください。

また取扱手引書①②は、必要な際にいつでも参照できるようにお手元に大切に保管してください。

【適応・用途】

股関節装具「28L101/100 コサ アクティブ / ジュニア」は股関節を内転制限するために使用する装具ですが、股関節脱臼には不向きです。両側性麻痺や、股関節亜脱臼、股関節異形成などに、股関節内転制限を目的として使用してください。



注意

● 適応については、必ず医師の診断を受けてください。

【特徴 / 構造】

本製品は、伸縮性の高いパンツと、適度な弾力性のあるパッドを組み合わせて使用します。


- パンツ大腿部は2重ポケットになっており、パッドを挿入できます。付属のカンと外転調節用ベルトにて外転する力を調節できます。
- 筋神経性疾患の場合、横になった時、座位時、立位時、また歩行時に内転制限としてパッドが作用します。
- 座位時・立位時においては体幹の安定性が増し、体幹コントロール向上も見込めます。
- 歩行可能なユーザーにおいては、骨盤左右対称性が上がり、膝をより自由に使用することができます。
- 挟み足歩行現象は抑えられ、より自然な歩行へ近づきます。



2重ポケット部分にパッドを挿入

【サイズの選び方】

サイズ表を参考に、適切なサイズを選択してください。

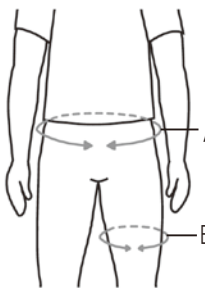	発注品番	ヒップ周径(cm) A	大腿部周径(cm) B	身長(cm) (参考)	洋服サイズ (参考)	サイズの測り方	
コサ ジュニア	28L100=80	57-59	26-32	74-86	80		
	28L100=92	59-62		86-98	92		
	28L100=104	62-64	32-36	98-110	104		
	28L100=116	64-68		110-122	116		
コサ アクティブ	28L100=128	68-72	36-44	122-134	128		図のように、ヒップの周径と 大腿部周径を測ります。
	28L100=140	72-78		134-146	140		
	28L100=152	78-86	44-54	146-158	152		
	28L101=S	86-96		158-170	164 レディース5号 メンズXS		
				—	レディース7,9号 メンズS, M		
	28L101=M	96-105	54-62	—	レディース11,13号 メンズL, LL		
	28L101=L	105-109		—	レディース15,17号 メンズ3L		

【調整方法と装着手順】



注意

- 本製品を初めて装着される際には、必ず医師、義肢装具士をはじめとした医療従事者による調整と装着手順の指導が必要となります。

装着前に取扱手引書①基本篇の【使用上の注意—必ずお読みください—】をよく読み、また、医療従事者による装着手順の指導に従って、正しく装着してください。

備考

- 装着者が安全に、かつ適切に装着するために、イスに浅く腰かけて、以下の装着手順を行ってください。

【内容物の確認】

本製品 1 箱には以下のものが含まれます。



パンツ本体 2 枚



付属パーツ
・ 折り付き面ファスナー
・ カン
・ 面ファスナー



外転調節用ベルト 4 本




外転パッド 1 組

※収納用に白メッシュ地の巾着袋が付属しています。

【調整方法】

1. パッドの調整

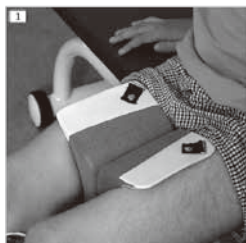

写真①



写真②

- パッドをカンがついている方を近位にし、大腿部にあて大きさを確認してください。（写真①）

- 股関節の外転角度を確認し、必要であればパッドの厚みを調節します。パッドを貼り付ける際は、まず表面を荒らしてから貼り付けてください（写真②）



写真③

- 削る場合はパッドについている矢印マークより深く削らないように注意してください（写真③）

2. パンツのサイズ、腰ベルト取り付け




写真④

- パンツを試着し、ベルトの長さを印します（写真④）。



写真⑤

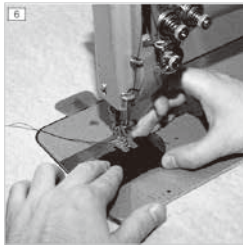


写真⑥

- 腰ベルトの長さで縫う個所を確認し、縫製します（写真⑤、⑥）。

3. 外転調節用ベルトの取り付け、調節




写真⑦

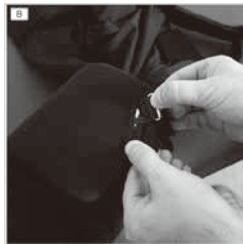

写真⑧

- カンが近位方向になるように、パッドをパンツのポケットへ挿入します（写真⑦）。
- パンツ大腿部にあるカン用の穴からカンを引き出します（写真⑧）。

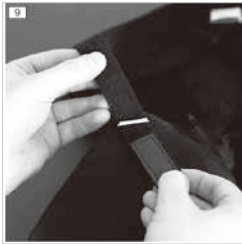

写真⑨



写真⑩

- パンツ大腿部下縁の面ファスナーを留めます。
外転調節用ベルトを前後で交差するように取り付けます（写真⑨）。

- 試着して確認します（写真⑩）



写真⑪



写真⑫

- 交差している外転調節用ベルトの位置を決めます。
付属しているノリ付き面ファスナーを仮止めとして使用することもできます（写真⑪）。

- 縫い付ける箇所に印をつけておきます（写真⑫）



写真⑬

- 外転調節用ベルトの引っ張り具合を確認します（写真⑬）。



写真⑭



写真⑮

- 外転調節用ベルトは左右対称にとりつけるようにします（写真⑭）。
外転調節用ベルトを縫い付けます（写真⑮）。

【装着方法】

- 腰ベルトを開きます。
(コサ アクティブはジッパーも開きます。)
- パンツをはきこみ、腰ベルトを閉じます。
(コサ アクティブはジッパーを閉じます。)
- パッドの位置を確認し、外転調節用ベルトが適切かどうか確認します。



非装着時



装着時

【お手入れ方法と注意事項】



注意

- お手入れをされる場合には、取扱手引書 ①【お手入れ方法と注意事項】を必ずご覧ください。

- お洗濯される場合は、パッドを取り出し、面ファスナーをすべて閉じておいてください。
- 洗濯機に入れる場合は洗濯ネットなどに入れて、40 度のぬるま湯で中性洗剤を使用し洗ってください。
- 柔軟剤は使用しないでください。
- 直射日光の当たらない風通しのいいところで陰干しをしてください。
- 装着する際にはパッドを戻し使用してください。

【品質表示】

ポリアミド、エラストン（ポリウレタン）、ポリウレタンフォーム

お問い合わせ先

掲載内容の無断使用禁止

掲載されている内容、文章、画像については、無断で使用もしくは転載することを禁止します。

輸入販売元

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.com/ja-jp

〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル 4F TEL: 03-6739-4090 (代表) FAX: 03-6739-4097