

ottobock.

# Tus guías de selección.

## Ictus. Matriz de Indicaciones.

### Miembro Inferior.

Referencia	Reemplazo funcional						
	Uso temporal						
	Uso permanente						
	<b>0165</b> Genu Neurexa	<b>28U50</b> Malleo Neurexa pro	<b>28U99<sup>1</sup></b> Antiequino	<b>28U70</b> GoOn	<b>28U22<sup>2</sup></b> WalkOn Flex	<b>28U11<sup>3</sup></b> WalkOn/ <b>28U23<sup>3</sup></b> WalkOn Trimable	<b>28U24<sup>3</sup></b> WalkOn Reaction/ <b>28U25<sup>3</sup></b> WalkOn Reaction plus
Indicaciones							
Hiperextensión y dolor en la rodilla debido a trastornos neurológicos	•						
Pie pendular, especialmente asociado con la supinación aguda del pie debido a la espasticidad		•					
Pie pendular de ligero a moderado (dorsiflexión débil) sin espasticidad o con espasticidad leve, especialmente apropiado para caminar distancias cortas			•				
Pie pendular ligero causado por el síndrome de fatiga crónica, problemas de equilibrio, demencia, enfermedad de Parkinson, derrame cerebral, traumatismos craneoencefálicos, esclerosis múltiple, atrofia neuromuscular. No hay estabilización en el área M-L de la articulación del tobillo				•			
Pie pendular de ligero a moderado (dorsiflexión débil) sin espasticidad o con espasticidad leve					•		
Pie pendular de ligero a moderado (dorsiflexión débil) sin espasticidad o con espasticidad leve. Estabilización de las desviaciones de valgo/varo en el tobillo						•	
Pie pendular pronunciado con: 1. Deterioro de la musculatura de la flexión plantar y/o deterioro leve de la extensión de la rodilla. 2. Debilidad moderada de la extensión de la rodilla sin espasticidad o con espasticidad de leve a moderada. Actúa sobre la articulación de la rodilla en las direcciones A-P y M-L.							•

### Miembro Superior.

Referencia	Reemplazo funcional			
	Uso temporal			
	Uso permanente			
	<b>28P30</b> Manu Neurexa plus	<b>28P30 Manu Neurexa plus/28P31</b> Férula de soporte para la mano	<b>5065N</b> Omo Neurexa plus	<b>5065N Omo Neurexa plus/ 28P30 Manu Neurexa plus</b>
Indicaciones				
Paresis de los músculos del antebrazo, parálisis flácida o espasticidad leve	•		•	•
Adecuado para el posicionamiento nocturno en combinación con la férula de soporte para la mano			•	
Dolor y disfunción del hombro incluyendo la subluxación debida a trastornos neurológicos. La ortesis puede ser colocada por el paciente			•	•

<sup>1</sup> Disponible en transparente o negro <sup>2</sup> Suela para ser recortada con tijera <sup>3</sup> Suela para ser recortada con lijador.

© Ottobock 6467340 Estado: Abril 2024

www.ottobock.es

## Omo Neurexa plus

Órtesis estabilizadora de hombro



ottobock.

**Ottobock Ibérica S.A.**  
Calle Majada, 1  
28760 Tres Cantos (Madrid)  
T +34 91 806 30 00  
F +34 900 31 42 53  
info@ottobock.es  
[www.ottobock.es](http://www.ottobock.es)

## Familia WalkOn. Matriz de selección

### Evaluación de la fuerza muscular según Daniels y Worthingham

- 0 No hay contracción muscular visible y/o palpable
- 1 Contracción muscular visible y/o palpable sin efecto motor
- 2 Tensión muscular pronunciada, el movimiento es posible si se elimina la fuerza de gravedad
- 3 Movimiento contra la gravedad posible
- 4 Movimiento contra la resistencia basí a media posible
- 5 Movimiento con fuerza normal

Pronación de la correa/  
Correa de corrección de  
la supinación  
28Z10

Incrustaciones  
generalmente  
recomendables

Referencia	Izq.	Drch.	Talla de calzado (E)
WalkOn 28U11	= L36 - 39	= R36 - 39	36-39
	= L39 - 42	= R39 - 42	39-42
WalkOn Flex 28U22	= L24 - 39	= R24 - 39	24-39
	= L39 - 48	= R39 - 48	39-48
WalkOn Trimable 28U23	= L36 - 39	= R36 - 39	36-39
	= L39 - 42	= R39 - 42	39-42
WalkOn Lateral 28U33	= L42 - 45	= R42 - 45	42-45
	= L36 - 39	= R36 - 39	36-39
WalkOn Reaction Lateral 28U34	= L39 - 42	= R39 - 42	39-42
	= L42 - 48	= R42 - 48	42-48
WalkOn Reaction 28U24	= L36 - 39	= R36 - 39	36-39
	= L39 - 42	= R39 - 42	39-42
WalkOn Reaction <sup>™</sup> 28U25	= L36 - 39	= R36 - 39	36-39
	= L39 - 42	= R39 - 42	39-42