


C-Brace Interim. Versorgungsweg.

ottobock.



Der Versorgungsprozess mit einer Interimversorgung.

ottobock.

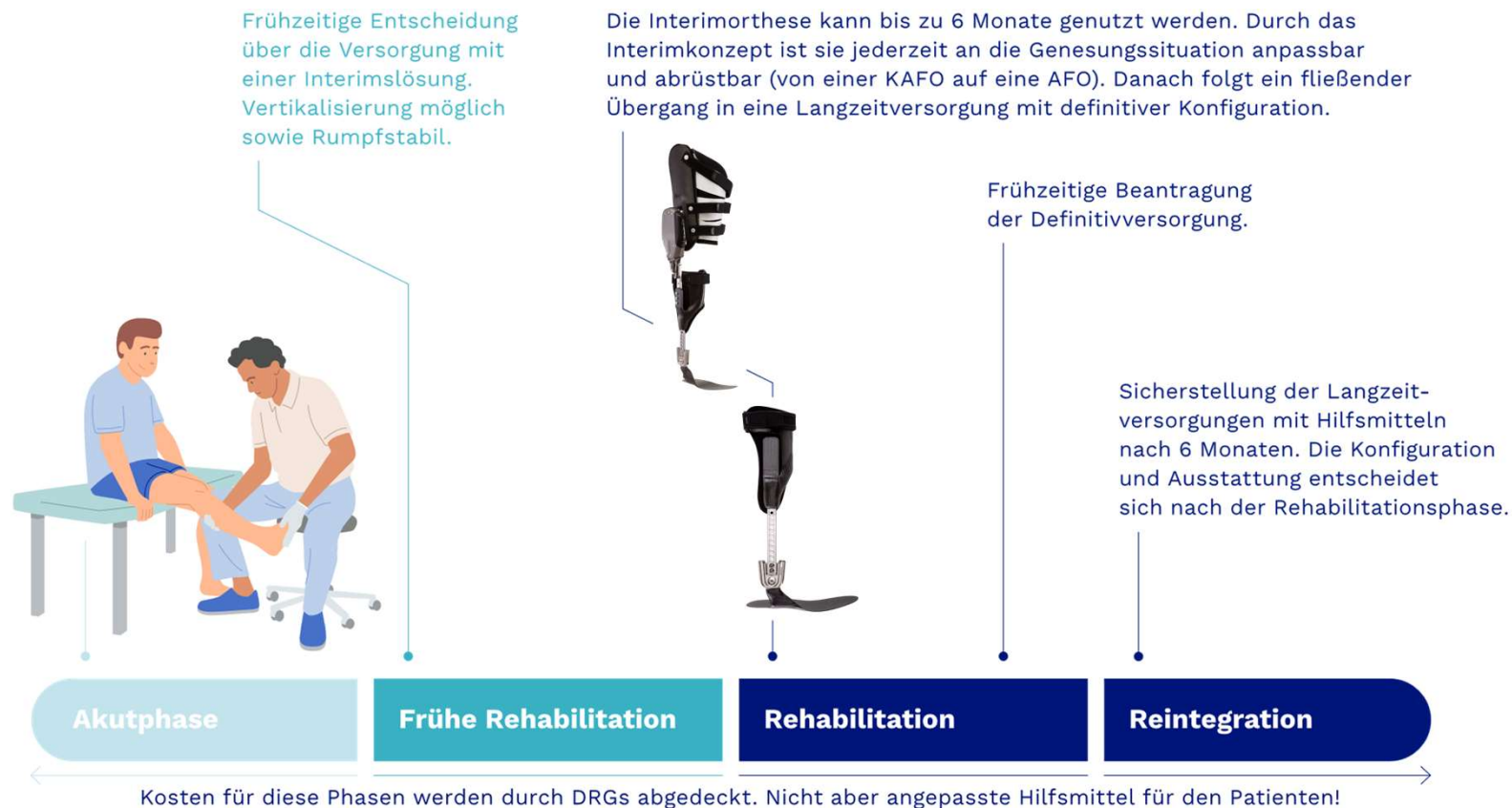

Kontrollierte Therapie und stationäre Rehabilitation.

ottobock.

In regelmäßigen Zeitabständen werden durch Timed Up and Go Test, 10 Meter Gehstest und Berg Balance Test die Fortschritte und Einschätzungen dokumentiert.



Wie kann *C-Brace Interim* die Rehabilitation unterstützen?

ottobock.

Frühreha

Rehabilitation

Re-Integration

Vertikalisierung



- Gesperrter Stand für Stabilität der unteren Extremität
- Fokus auf Rumpfttraining in aufrechter Position
- Erhalt der Gelenksbeweglichkeit
- Erhalt der anatomischen Strukturen von Knie- und Sprunggelenk

Transfers



- Hält das betroffene Bein stabil und sicher
- Patient:innen können, falls machbar, eigenständig trainieren
- Unterstützt den eigenständigen Transfer Schritt für Schritt
- Vertrauen in das betroffene Bein zurückgewinnen:
C-Brace Technologie bietet hohe Sicherheit

Stand, Gleichgewicht, Erste Schritte



- Anpassbares Unterstützungsniveau entsprechend der Muskelkontrolle =
“So viel Unterstützung wie nötig, so wenig wie möglich”
- Unterstützt während Balance und Gewichtsverlagerungsübungen

Gehen & weitere ADLs



- Trainingsmodus, um Gehen in der Ebene zu unterstützen
- Treppentraining möglich, das dem natürlichen Gangmuster entspricht (alternierend)
- Zusätzliche Funktionen für personalisierten Support
- Unterstützt die Gehdistanz und Ausdauer zu erhöhen (Training außen)



C-Brace Interim.

ottobock.

Die **C-Brace Interim** Orthese besteht aus drei Komponenten und einem **C-Brace** Loanergelenk.

Interim Kniepassteil

Varianten: 0°/3°/6°/9°

Interim Oberschenkelschale

Seiten: links/rechts

Größen: S/M/L

Interim AFO

Seiten: links/rechts

Größen: S/L

Hinweis: Die Orthese kann je nach Zustand des Patienten bis zur AFO abgerüstet werden.



C-Brace Loanergelenk

