


BELANGRIJK :

Voor een insuline pen (HumaPen Luxura HD®, HumaPen Savvio®, Humalog KwikPen®, Abasaglar KwikPen® en Lyumjev KwikPen®):

- De naald moet vervangen worden bij elke injectie (want een naald die meerdere keren gebruikt wordt, kan verstopen).
- De naald mag nooit bevestigd blijven op de pen tussen twee injecties.
- De pen mag niet bewaard worden in de koelkast eens in gebruik, en zeker niet met een naald erop bevestigd.
- De pen moet ontluicht worden zoals hieronder afgebeeld:

Het kan zijn dat een nieuwe patroon verscheidene keren moet worden ontluicht voordat u insuline op de punt van de naald ziet.

Stel 2 eenheden in.

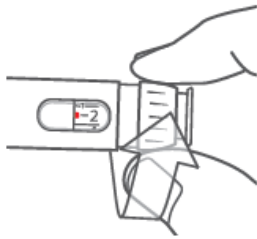


Houdt de pen omhoog gericht. Tik tegen de patroon zodat de lucht zich bovenin verzamelt voor verwijdering



Druk op de injectieknop en houdt deze 5 seconden ingedrukt. Kijk of er insuline op de punt van de naald is. Ontluicht de pen nog een keer wanneer er geen insuline te zien is.



Als u niet ontluicht dan kunt u de verkeerde dosis krijgen.

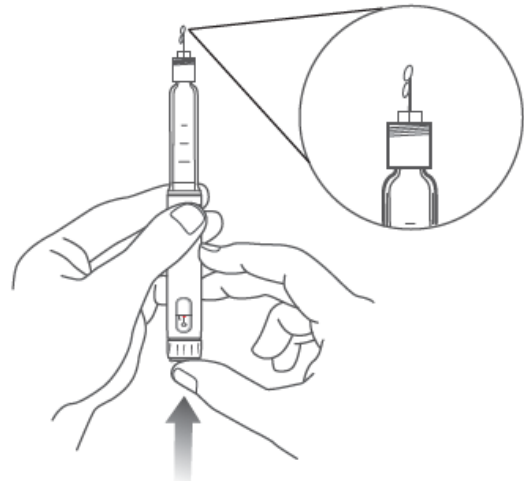

Als er na verscheidene malen ontluichten nog geen insuline te zien is, dan kan de naald verstopt zijn. Bevestig een nieuwe naald en herhaal de ontluichtingsstappen.

Het naleven van deze 4 regels maakt het mogelijk om de meeste problemen op te lossen. Indien u het probleem niet hebt kunnen oplossen na het naleven van deze regels, gelieve ons te contacteren : 02 548 84 84.