




**IMPORTANT :**

Pour stylo injecteur d'insuline (HumaPen Luxura HD®, HumaPen Savvio®, Humalog KwikPen®, Abasaglar KwikPen® et Lyumjev KwikPen®):

- Il faut changer d'aiguille à chaque injection (car une aiguille qui est utilisée plusieurs fois peut finir par se boucher).
- Il ne faut jamais laisser l'aiguille sur le stylo entre deux injections.
- Il ne faut jamais conserver le stylo au frigo une fois entamé, et surtout pas avec une aiguille attachée.
- Il faut purger le stylo comme illustré ci-dessous :

**Lors de la première utilisation d'une cartouche, plusieurs purges peuvent être nécessaires avant que de l'insuline apparaisse à l'extrémité de l'aiguille.**

Sélectionnez 2 unités

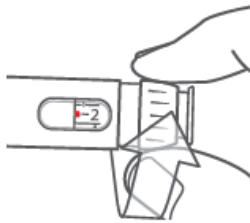

Pointez le stylo vers le haut. Tapotez la cartouche pour faire remonter les bulles d'air à la surface afin de les éliminer.



Appuyez sur le bouton d'injection. Vérifiez que de l'insuline apparaît à l'extrémité de l'aiguille. Si vous ne voyez pas apparaître d'insuline, répétez la purge.

**⚠ Si vous ne purgez pas, vous pourriez vous injecter une dose incorrecte.**



**⚠ Si après plusieurs essais, il n'y a toujours pas d'insuline qui apparaît, l'aiguille sur votre stylo peut être bouchée. Fixez une nouvelle aiguille et répétez les étapes de purge.**

Le respect de ces 4 règles permet de résoudre la majorité des problèmes. Si malgré le respect de ces règles, vous n'avez pas pu résoudre le problème, veuillez nous contacter : 02 548 84 84.

**PP-BV-BE-0010**