

FILTRES POUR MASQUE

Le filtre peut être remplacé et jetable

1/2

- Maison // Marché // Commerce // Structure sans contact direct



À partir d'une boîte

Boîte de 10 filtres

Filtre : Nanofibre changeable

Chaque masque est livré avec un filtre

2 Tailles

Adulte : 24 x 15 cm

Enfant : 19 x 12 cm

Avertissement :

Attention : ce filtre/masque n'est ni un dispositif médical, ni un équipement de protection individuelle, ni un masque « grand public » ou autre masque normalisé et certifié.

Ce masque n'est en aucun cas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients, ni en milieu professionnel.

Il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.

Ce masque vise à limiter les projections d'air lorsqu'on parle, lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue. Il vise également à limiter les contacts entre les mains et le visage. Même s'il peut atténuer l'exposition lorsqu'il est porté dans les conditions décrites dans la notice d'utilisation jointe avec le produit, il n'est pas conçu pour protéger contre les infections ou la pollution.

 Sans impression

 Livraison incluse

À partir de J+15



CONDITIONNEMENT

Dans un carton double cannelure
Conditionnés individuellement dans
un sachet plastique flexible.



CARACTÉRISTIQUES

- Filtre brevetée en nanofibre à 3 couches (hydrofuge) : Efficacité de filtration
Ne pas laver, ni nettoyer, ni froter le filtre
- Utilisation limitée à 12 heures par filtre ou la journée.
- Produit stérilisé avant le conditionnement au moyen d'un traitement à l'ozone



**VOIR NOS PRÉCAUTIONS
D'UTILISATION EN PAGE 2**

Précautions d'emploi :

Lorsque vous portez ce masque, veillez à ce qu'il soit toujours bien ajusté et qu'il couvre votre bouche et votre nez.

Ce masque ne remplace pas les gestes barrières préconisés par les autorités publiques à grande échelle. Il n'intervient qu'en complément de ces gestes barrières.

Pour rappel, les gestes barrières sont les suivants :

- Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique
- Eviter de se toucher le visage
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir
- Respecter une distance d'au moins un mètre avec les autres
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter
- Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades

Consignes pour le port du masque :

Avant de mettre ou d'enlever le masque :

Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.

Pour mettre le masque :

Tenez le masque par les lanières.

Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton. Puis ajustez les lanières aux oreilles

Lorsque vous portez le masque :

Eviter de le toucher et de le déplacer.

Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Pour enlever le masque :

Décrochez les lanières pour décoller le masque de votre visage.

Ne mettez pas le masque dans votre poche ou votre sac après l'avoir porté.

En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.

Il faut changer le masque et/ou le filtre :

Quand vous avez porté le masque 12h ou une journée.

Quand vous souhaitez boire ou manger.

Si le masque et/ou le filtre s'humidifie.

Si le masque et/ou le filtre est endommagé.

Consignes pour l'entretien :

Avant ouverture :

Stockez le masque et le filtre dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Pour le lavage :

Enlever le filtre du masque. Le filtre résiste à l'eau bouillante et à l'alcool mais il ne faut pas le froter car cela pourrait détruire les nanos fibres et leur effet.

Lavez le masque à la machine avec une lessive classique au moins 30 min à 60°C.

La dimension et la résistance du masque ont été testées pour 10 lavages.

Après le lavage :

Utiliser un sèche-linge ou un sèche-cheveux pour sécher votre masque, ou encore, le faire sécher à l'air libre sur un support propre et désinfecté.

Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans sa pochette d'origine ou un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

Conservez le filtre dans un endroit propre et sec, ou un sac scellé pour éviter l'absorption électrostatique de la poussière dans l'air.