

EUVANOL - RESPIRE+™

Nez bouché, Rhume
spray nasal

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit car elle contient des informations importantes pour vous. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

1. INDICATION ET COMPOSITION

EUVANOL-RESPIRE+™ aide à soulager le nez bouché, notamment en cas de rhume.

EUVANOL-RESPIRE+™ est une combinaison unique de :

- Solution saline hypertonique concentrée à 3% : aide à **déboucher le nez**,
- Dexpanthénol : contribue à l'**hydratation de la muqueuse nasale**,
- Menthol : **effet rafraîchissant**,
- Huiles essentielles de thym et d'eucalyptus ; dérivés de pin.

Sans conservateur.

Adultes et enfants à partir de 12 ans.

COMPOSITION :

Eau (93,86%), chlorure de sodium (3,05%), dexpanthénol, hydroxystéarate de macroglycérol, phosphate de dihydrogène potassique, phosphate d'hydrogène dipotassique, huile essentielle d'eucalyptus, menthol, acétate de bornyl, acétate d'isobornyl, huile essentielle de thym.

2. CONSEILS D'UTILISATION

Avant la première utilisation, activez le spray de la manière suivante : Ôtez le capuchon de protection, prenez le flacon en main et pompez jusqu'à l'apparition d'un fin brouillard. Le spray est maintenant prêt à l'emploi.

1. Introduisez l'embout nasal dans la narine et pompez ensuite tout en inspirant doucement. Maintenez le flacon en position verticale.
2. Effectuez 1 ou 2 pulvérisations dans chaque narine une à deux fois par jour.
3. Nettoyez l'embout nasal après chaque utilisation et séchez-le ensuite.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vos symptômes ne s'améliorent pas dans les 5 jours.

3. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EUVANOL-RESPIRE+™ est uniquement réservé à l'usage nasal. **Les composants d'EUVANOL-RESPIRE+™ peuvent causer des réactions d'hypersensibilité (y compris de l'essoufflement) chez les patients sensibilisés ou une sensation de grave brûlure dans le nez.** Si vous ressentez un effet indésirable grave, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien et signaler le à P&G Health France SAS, ainsi qu'aux autorités de santé. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Les symptômes nasaux peuvent avoir de multiples causes. Par conséquent, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre pharmacien si vos symptômes ne s'améliorent pas dans les 5 jours.

N'utilisez pas ce dispositif médical après la date de péremption indiquée sur l'emballage. Après ouverture, ne pas utiliser ce produit plus de 4 semaines. Évitez tout contact avec les yeux. Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce spray, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Le spray doseur doit toujours être utilisé par la même personne. Afin de garantir le bon fonctionnement, ne pas enlever le dispositif de nébulisation et ne pas endommager l'emballage.

NE PAS UTILISER CE PRODUIT :

- Si vous êtes allergique à l'un des composants,
- En cas d'affections des voies respiratoires liées à une hypersensibilité marquée (par ex. asthme bronchique),
- Chez les enfants et les adolescents de moins de 12 ans,
- En cas d'épilepsie.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

L'utilisation de ce produit n'est pas recommandée chez la femme enceinte ou allaitante.

4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Flacon avec pompe pour pulvérisation nasale. Ne contient pas de gaz propulseur. Chaque flacon contient 20 ml de solution soit environ 125 pulvérisations. Chaque pulvérisation correspond à environ 0,16 ml de solution.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conserver à une température inférieure à 25° C.
Conserver dans l'emballage d'origine.
Après ouverture, ne pas utiliser ce produit plus de 4 semaines.

DERNIÈRE MISE À JOUR : Novembre 2020.



P&G HEALTH FRANCE SAS
18 C, Boulevard Winston Churchill
21000 DIJON - FRANCE

Une question ? Un avis à donner ?

Rendez-vous sur <https://fr.pg.com/marqueset-produits/#Santé-and-bien-être>
rubrique Gamme Conseil/Euvanol-Respire+