



VORGESEHENE VERWENDUNG :

Befreit nächtliche Nasenverstopfung.


INDICATION : Soulage la congestion nasale nocturne.

ASO LLC, 300 Sarasota Center Blvd.,
34240, Sarasota FL, USA

ASO LLC, 300 Sarasota Center Blvd.,
34240, Sarasota FL, États-Unis



ASO Europe BV, Nijverheidstraat 48,
6681 LN Bommel, Niederlande
ASO Europe BV, Nijverheidstraat 48,
6681 LN Bommel, Pays-Bas

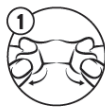

VERWENDUNG

REINIGEN & SÄUBERN Sie die Nase mit Seife und Wasser. **TROCKNEN** Sie sie gründlich ab. Stellen Sie sicher, dass die Nase frei von Creme, Ölen und Make-up ist. **ENTFERNEN** Sie die Abdeckfolie und vermeiden Sie Berührungen mit dem Klebstoff.

PLATZIEREN Sie den Nasenstrip - wie abgebildet - mittig auf dem Nasenrücken.

DRÜCKEN Sie ihn nach außen bis zu den Enden an, um eine vollständige Haftung zu gewährleisten. **DRÜCKEN** Sie ihn 30 Sekunden lang fest.

Der Strip ist korrekt platziert, wenn der abgerundete Laschenansatz den Streifen auf dem Nasenrücken zentriert. Die flexible Feder im Streifen sollte sich knapp über Ihren Nasenflügeln befinden.

APPLIQUER

LAVEZ le nez avec de l'eau et du savon. **SÉCHEZ** complètement. Veillez à ce que le nez soit exempt de crème, d'huile et de maquillage. **RETIREZ** le film protecteur et évitez de toucher l'adhésif.

CENTREZ la bandelette nasale sur l'arête du nez comme indiqué sur l'image.

APPUYEZ, frottez vers l'extérieur jusqu'aux extrémités de la bandelette pour la faire adhérer complètement. **MAINTENEZ** la pression pendant 30 secondes.

La bandelette est correctement placée si la languette arrondie centre la bandelette sur l'arête du nez. La partie flexible de la bandelette doit reposer juste au-dessus de vos narines.

ZUM ENTFERNEN

FEUCHTEN Sie den Nasenstrip mit warmem Wasser an.

Heben Sie ihn **VORSICHTIG** an beiden Enden an und entfernen Sie ihn langsam, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. **ENTSORGEN** Sie den gebrauchten Streifen.

POUR RETIRER

Pour faciliter le retrait, **HUMIDIFIEZ** la bandelette nasale avec de l'eau tiède.

Pour retirer la bandelette, soulevez **délicatement** les deux extrémités et retirez lentement pour minimiser les risques de blessure. **Jetez** la bandelette nasale utilisée.

WARNHINWEISE: Nur zur äußerlichen Anwendung auf intakter Haut. Nicht auf wund, gereizter oder sonengeschädigter Haut verwenden. Nicht länger als 12 Stunden pro Tag auf der Haut anwenden. Wenn Hautreizungen oder eine Überempfindlichkeitsreaktion (z. B. Ausschlag, Juckreiz, Schmerzen, Schwellungen) auftreten, brechen Sie die Verwendung sofort ab. Personen, die den Verdacht auf Schlafapnoe haben, sollten vor der Verwendung dieses Produkts ihren Arzt konsultieren. Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.** Bitte melden Sie ASO und den zuständigen nationalen Behörden alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit diesem Produkt auftreten.

ATTENTION : Pour application externe, sur le nez uniquement. Ne pas utiliser sur une peau irritée ou brûlée par le soleil, ou sur des plaies. Ne pas laisser sur la peau pendant plus de 12 heures par jour. En cas d'irritation cutanée ou de réaction d'hypersensibilité (par exemple, éruption cutanée, démangeaisons, douleur, gonflement), cesser immédiatement l'utilisation. Les personnes soupçonnant une apnée du sommeil doivent consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit. Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Veuillez notifier tout incident grave survenant en relation avec ce dispositif à ASO Europe et aux autorités nationales compétentes.



WICK Pharma Zweigniederlassung der
Procter & Gamble GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824
Schwalbach am Taunus
Tel.: 0800 588 92 02



P&G Health France SAS,
18C Boulevard Winston Churchill, 21000 Dijon - France