

## INSTRUÇÕES DE USO

**BASAGLAR® KwikPen®**  
**insulina glargina**  
**(100 unidades/mL, caneta de 3 mL)**



**POR FAVOR, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR**

Leia as Instruções de Uso antes da primeira vez que for utilizar uma BASAGLAR KwikPen e a cada vez que você iniciar o uso de uma outra BASAGLAR KwikPen. Podem existir novas informações. Estas informações não substituem as orientações do seu médico sobre a sua condição de saúde ou seu tratamento.

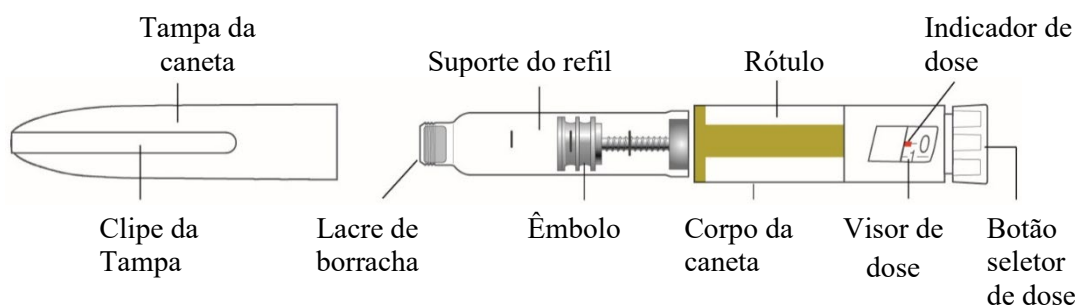
BASAGLAR KwikPen (“Caneta”) é uma caneta pré-preenchida, descartável, contendo 300 unidades de BASAGLAR (insulina glargina [origem ADNr]). Você pode fazer várias aplicações (múltiplas doses) usando uma caneta. A caneta seleciona as unidades de 1 em 1. Você pode aplicar de 1 a 80 unidades de insulina em uma única aplicação. **Se a sua dose for maior que 80 unidades, você terá que aplicar mais de uma injeção.**

O êmbolo só se move um pouco em cada aplicação, e você pode não perceber que ele se move. O êmbolo só vai chegar ao fim do refil quando tiver usado todas as 300 unidades da caneta.


**Não compartilhe a sua caneta com outra pessoa, mesmo que a agulha tenha sido trocada. Não reutilize ou compartilhe suas agulhas com outra pessoa. Você pode transmitir uma infecção a outras pessoas ou adquirir uma infecção grave delas.**

Esta caneta não é recomendada para pessoas com deficiência total ou parcial de visão, sem a assistência de uma pessoa treinada sobre a utilização da caneta.

**Partes da Kwikpen**



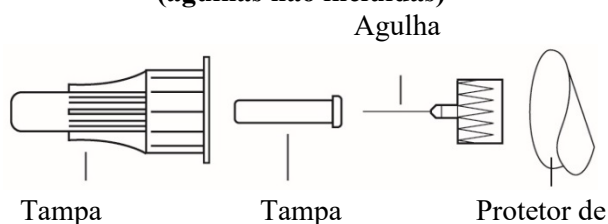**Partes da Agulha da Caneta  
 (agulhas não incluídas)**



**Seletor de Dose  
 com anel verde**



externa da agulha    interna da agulha    papel

### Como reconhecer a sua BASAGLAR KwikPen:

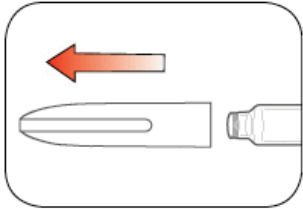
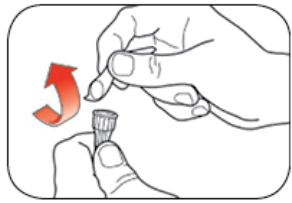
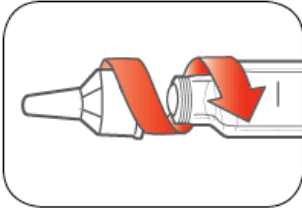
- Cor da caneta: cinza claro.
- Botão seletor de dose: cinza claro com anel verde na extremidade.
- Rótulo: cinza claro com barras verdes.


### Materiais necessários para aplicação:

- BASAGLAR KwikPen.
- Agulhas compatíveis: recomenda-se o uso da caneta KwikPen com agulhas da marca Becton, Dickinson and Company (BD).
- Algodão com álcool.

### Preparação da sua Caneta

- Lave as mãos com água e sabão.
- Certifique-se de que você está usando o tipo correto de insulina. Este cuidado é especialmente importante se você usar mais de um tipo de insulina.
- **Não** use a caneta caso já tenha passado o prazo de validade descrito no rótulo ou após 28 dias do primeiro dia de uso da caneta.
- Utilize sempre uma **nova agulha** em cada aplicação para ajudar a prevenir infecções e entupimento da agulha.





|   |   |
|---|---|
| <p><b>Etapa 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Puxe a tampa da caneta para fora.</li><li>- <b>Não</b> remova o rótulo da caneta</li><li>• Utilize um algodão com álcool para limpar o lacre de borracha.</li></ul> <p>Verifique se BASAGLAR está clara e incolor. <b>Não</b> utilize se ela estiver turva, colorida ou com partículas ou aglomerados.</p> |   |
| <p><b>Etapa 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pegue uma nova agulha.</li><li>• Remova o protetor de papel da tampa externa da agulha.</li></ul>  |  |
| <p><b>Etapa 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Empurre a agulha encapada em direção à caneta e rosqueie a agulha até firmar.</li></ul>  |  |
| <p><b>Etapa 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Puxe a tampa externa. <b>Não</b> a jogue fora.</li><li>• Puxe a tampa interna e jogue-a fora.</li></ul>  |   |

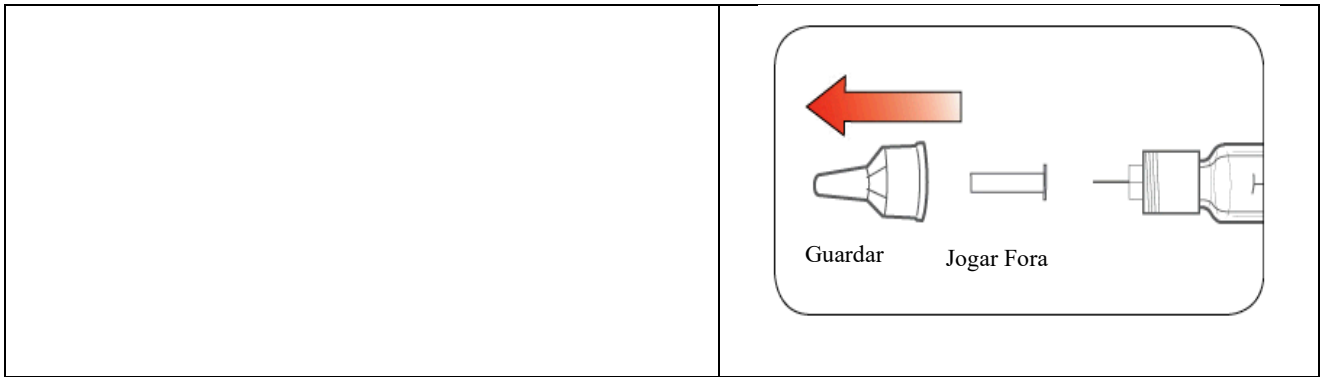

## Regulagem da Caneta

### Regule antes de cada aplicação.

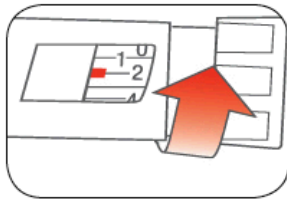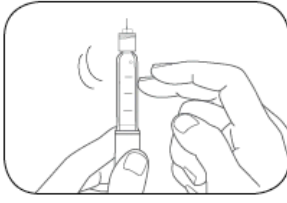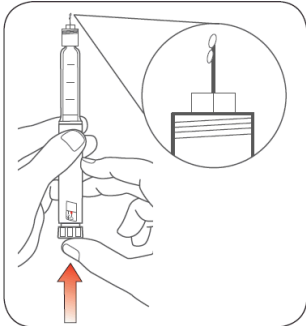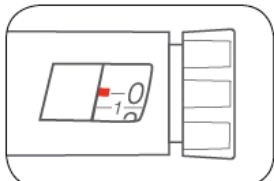- Regular sua caneta significa remover o ar da agulha e refil que pode ser acumulado em decorrência do uso rotineiro e garante que a caneta está funcionando corretamente.
- Se você **não** regular a caneta antes de cada aplicação, você pode receber uma dose bem maior ou bem menor de insulina.



|  |   |
|--|---|
| <p><b>Etapa 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para regular sua caneta, selecione 2 unidades girando o botão seletor de dose.</li> </ul>  |   |
| <p><b>Etapa 6:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque a caneta com a agulha virada para cima. Bata levemente no suporte do refil para posicionar as bolhas de ar no topo.</li> </ul>   |    |
| <p><b>Etapa 7:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Continue segurando sua caneta com a agulha para cima. Empurre o botão seletor de dose até parar e aparecer "0" no visor de dose. Segure o botão seletor de dose e conte lentamente até 5. Você deverá ver a insulina na ponta da agulha.</li> <li>- Se a insulina <b>não</b> aparecer, repita as etapas de regulagem, mas não por mais de 4 vezes.</li> <li>- Se a insulina <b>continuar não</b> aparecendo, troque a agulha e repita as etapas de regulagem.</li> </ul> <p>Pequenas bolhas de ar são normais e não afetarão a sua dose.</p> | <br> |

## Seleção da dose

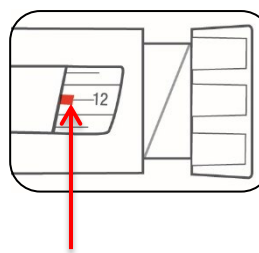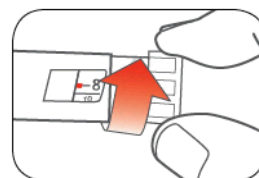
- Você pode aplicar de 1 a 80 unidades de insulina em uma única aplicação.
- Se a sua dose for maior que 80 unidades, você precisará utilizar mais de uma aplicação.
  - Se você precisar de ajuda para decidir como dividir a dose, pergunte ao seu médico.
  - Você deve usar uma agulha nova para cada aplicação e repetir a etapa de regulagem.

### Etapa 8:

- Gire o botão seletor de dose para o número de unidades de insulina que você precisa aplicar. O indicador de dose deve estar alinhado com a sua dose.
  - A caneta seleciona as unidades de uma em uma.
  - O botão seletor de dose faz um clique quando é girado.
  - **NÃO** selecione sua dose pela contagem dos cliques porque você pode marcar a dose errada.
  - A dose pode ser corrigida girando o botão seletor de dose em qualquer direção até a dose correta estar alinhada ao indicador de dose.
  - Os números  **pares**  estão impressos no indicador.
  - Os números  **ímpares** , após o número um, são demonstrados sob a forma de linhas.
- **Sempre verifique o número no visor de dose para ter certeza que você selecionou a dose correta.**



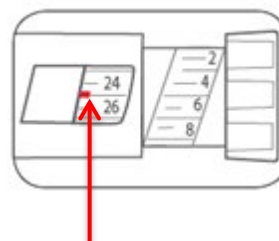Exemplo: 12 unidades demonstradas no visor de dose



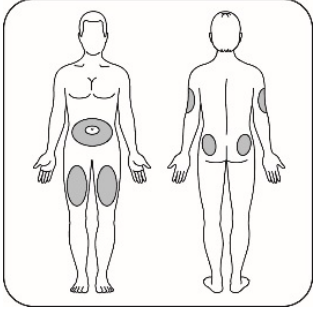

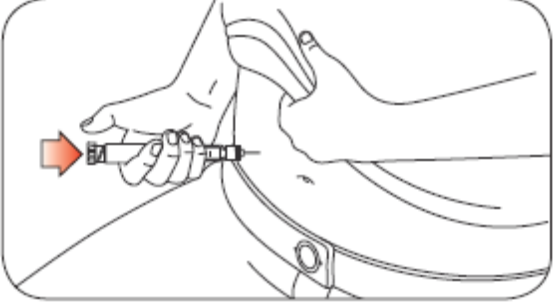
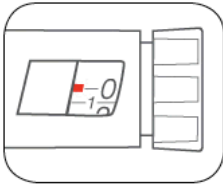
Exemplo: 25 unidades demonstradas no visor de dose

- A caneta não permitirá que você selecione uma dose maior do que o número de unidades que restam na caneta.
- Se a sua dose for maior que o número de unidades restantes na caneta, você deve:
  - aplicar a quantidade que sobrou na caneta atual e, então, utilizar uma nova caneta para completar a sua dose, **ou**
  - aplicar a dose completa com o uso de uma nova caneta.
- É normal restar na caneta uma pequena quantidade de insulina que você não consegue aplicar.

## Aplicando sua injeção

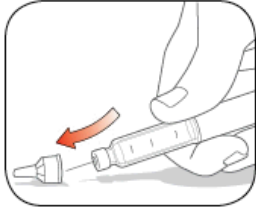
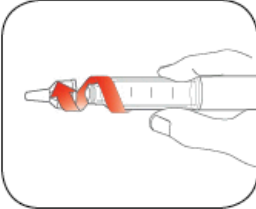
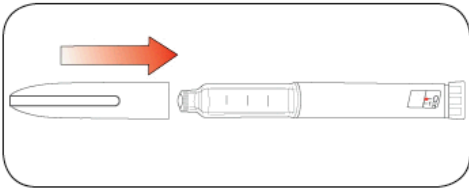
- Aplique sua insulina conforme o seu médico demonstrou.
- Mude (alterne) os locais da aplicação a cada injeção.
- **Não** tente mudar sua dose durante a aplicação.

### Etapa 9:

|  |  |
|--|--|
| <p>Escolha o local da aplicação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BASAGLAR é injetado sob a pele (por via subcutânea) na região abdominal, nádegas, coxas ou parte superior dos braços.</li> <li>• Limpe a pele com um algodão umedecido com álcool e deixe o local da aplicação secar antes de aplicar sua dose.</li> </ul>   |    |
| <p><b>Etapa 10:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insira a agulha na pele.</li> <li>• Empurre o botão seletor de dose até ele parar de se mover.</li> <li>• Segure o botão seletor de dose e <b>conte lentamente até 5</b> antes de remover a agulha da pele.</li> </ul>  <p><b>Não</b> tente aplicar a insulina girando o botão seletor de dose. Você <b>NÃO</b> receberá a insulina girando o botão seletor de dose.</p>   |    |
| <p><b>Etapa 11:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remova a agulha da pele. <ul style="list-style-type: none"> <li>- É normal ficar uma gota de insulina na ponta da agulha. Isso não irá afetar a sua dose.</li> </ul> </li> <li>• Verificar o número no visor de dose. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se você visualizar o “0” no visor de dose, você recebeu a sua dose completa.</li> <li>- Se você não visualizar o “0” no visor de dose, não gire novamente. Insira a agulha na pele e termine a aplicação.</li> <li>- Se você acha que <b>ainda</b> não recebeu a sua dose completa, <b>não comece novamente ou repita a aplicação</b>. Monitore sua glicemia conforme orientado pelo seu médico.</li> <li>- Se você normalmente precisa receber 2 aplicações para sua dose completa, sempre se certifique de ter aplicado a sua segunda aplicação.</li> </ul> </li> </ul> <p>O êmbolo só se move um pouco em cada aplicação e você pode não perceber que ele se move.<br/>Após a retirada da agulha de sua pele, se você visualizar sangue, pressione o local da aplicação da injeção levemente com um pedaço de gaze ou algodão umedecido com álcool. <b>Não</b> esfregue a região.</p> |  |

### Após sua aplicação

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Etapa 12:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuidadosamente, recoloca a tampa externa na agulha.</li> </ul> |  |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
|  |  |
| <p><b>Etapa 13:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desrosqueie a agulha tampada e descarte-a conforme descrito abaixo (ver a seção <b>Descarte das canetas e agulhas</b>).</li> <li>• Não armazene a caneta com a agulha fixada para prevenir vazamento, entupimento da agulha e entrada de ar na caneta.</li> </ul> |  |
| <p><b>Etapa 14:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recoloque a tampa da caneta alinhando o clipe da caneta com o indicador de dose e a empurre em direção à caneta.</li> </ul>   |   |

### Descarte das canetas e agulhas

- Descarte as agulhas usadas em um recipiente que possa ser fechado após o uso, resistente a objetos perfurocortantes. **Não** jogue as agulhas diretamente no seu lixo doméstico.
- A caneta usada pode ser descartada no seu lixo doméstico após a remoção da agulha.
- **Não** reciclar o recipiente para objetos perfurocortantes quando estiver cheio.
- Pergunte ao seu médico sobre as opções disponíveis para realizar apropriadamente o descarte dos recipientes para objetos perfurocortantes.
- As instruções sobre manuseio da agulha não devem substituir as recomendações dos profissionais de saúde locais ou orientações da instituição de saúde.

### Armazenamento da caneta

#### Caneta não usada

- As canetas que não estiverem sendo utilizadas devem ser armazenadas no refrigerador em temperaturas entre 2°C e 8°C.
- **Não** congelar BASAGLAR KwikPen. **Não** usar a caneta se tiver sido congelada.
- Canetas não usadas podem ser utilizadas até a data de validade impressa no rótulo, se a caneta foi mantida na geladeira.

#### Caneta em uso

- A caneta que você está usando atualmente deve ser mantida à temperatura ambiente (abaixo de 30°C) e longe do calor e da luz.
- A caneta que você está usando deve ser descartada após 28 dias de uso, mesmo que ela ainda contenha insulina.

### Informações gerais sobre o uso seguro e eficaz da caneta

- **Mantenha a sua caneta e agulhas fora da visão e do alcance das crianças.**
- Se qualquer uma das partes de sua caneta parecer quebrada ou danificada, **não** a utilize.
- Tenha sempre uma caneta reserva para a aplicação de insulina, em caso de dano ou perda.

### Solução de Problemas

- Se você está tendo dificuldade para remover a tampa, gire-a levemente para frente e para trás para realinhá-la e, então, puxe a tampa da caneta.
- Se estiver difícil empurrar o botão seletor de dose:
  - Pressione mais lentamente o botão seletor de dose para tornar este procedimento mais fácil.
  - Sua agulha pode estar obstruída. Fixe uma nova agulha e regule a caneta.
  - Você pode ter sujeira, comida ou líquido dentro da sua caneta. Substitua a caneta que você estiver usando por uma caneta nova.

Em caso de dúvidas ou problemas com sua BASAGLAR KwikPen, consulte o seu médico e/ou entre em contato com o Lilly SAC 0800 701 0444. Para maiores informações sobre BASAGLAR KwikPen e insulina, visite nosso site [www.lilly.com.br](http://www.lilly.com.br).

REGISTRO MS - 1.1260.0194

### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

Farm. Resp.: Felipe B. Z. da Silva - CRF-SP nº 76.601  
Fabricação, validade e número de lote, vide embalagem

**Fabricado por:**

Lilly France S.A.S. – Fegersheim – França

**Embalado por:**

Eli Lilly and Company – Indianápolis – EUA

ou

Lilly France S.A.S. – Fegersheim – França

**Ou**

**Fabricado por:**

Eli Lilly Italia S.p.A. – Sesto Fiorentino – Itália

**Embalado por:**

Lilly France S.A.S. – Fegersheim – França

**Importado por:**

Eli Lilly do Brasil Ltda.

Av. Morumbi, 8264 – São Paulo, SP

CNPJ 43.940.618/0001-44

BASAGLAR KwikPen é uma marca registrada da Eli Lilly and Company.

Copyright © 2020, Eli Lilly and Company. Todos os direitos reservados.

**BASAGLAR KwikPen** atende às normas vigentes da ISO 11608-1 de precisão da dose e funcionalidade.

Lilly SAC 0800 701 0444

[sac\\_brasil@lilly.com](mailto:sac_brasil@lilly.com)

[www.lilly.com.br](http://www.lilly.com.br)

**Este material foi aprovado pela ANVISA em 28/04/2022.**

