

## Instruções de Uso

### EBGLYSS® (lebriquizumabe)

#### Solução injetável para uso subcutâneo

#### Caneta aplicadora (125 mg/mL)

Estas Instruções de Uso contêm informações sobre como aplicar EBGLYSS.

**Antes de utilizar as canetas aplicadoras (Canetas) EBGLYSS, leia e siga cuidadosamente todas as instruções, passo a passo.**



#### Informações importantes que você precisa saber antes de aplicar EBGLYSS


- Seu médico deve lhe orientar sobre como preparar e administrar EBGLYSS utilizando a Caneta. **Não** se auto aplique ou aplique em alguém até que tenham lhe orientado sobre como aplicar EBGLYSS.
- Guarde estas Instruções de Uso e leia-as conforme necessário.
- Cada Caneta EBGLYSS contém 1 dose (250 mg) de EBGLYSS. **Cada Caneta é somente para uso único.**
- A Caneta EBGLYSS contém partes de vidro. Manuseie cuidadosamente. Caso você derrube a Caneta numa superfície dura, **não** a utilize. Use uma nova Caneta EBGLYSS para a sua aplicação.
- Seu médico pode lhe ajudar a decidir em que parte do corpo administrar a sua dose. Você também pode ler a seção **Escolha seu local de aplicação** destas instruções para lhe ajudar a escolher qual área pode funcionar melhor para você.
- Se você tiver problemas de visão ou audição, **não** utilize a Caneta EBGLYSS sem a ajuda de um cuidador.
- Consulte **Armazenando as Canetas EBGLYSS** para obter informações importantes sobre armazenamento.

## INSTRUÇÕES DE USO

Antes de utilizar a Caneta EBGLYSS, leia e siga cuidadosamente todas as instruções, passo a passo.

### Partes da Caneta EBGLYSS

#### Parte superior

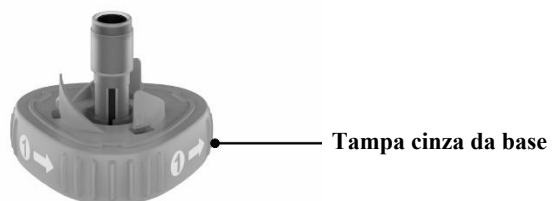

#### Parte inferior

## Preparando para administrar EBGLYSS

### Reúna os materiais

- Retire a Caneta EBGLYSS da geladeira
- Lenço umedecido com álcool
- Algodão ou gaze
- Recipiente para materiais perfurocortantes


### Espere 45 minutos

Com a tampa cinza da base acoplada, permita que a Caneta alcance a temperatura ambiente por 45 minutos antes da aplicação.

- **Não** aqueça a Caneta no micro-ondas, em água quente ou com luz solar direta.
- **Não** utilize a Caneta se o medicamento estiver congelado.

### Inspecione a Caneta e o medicamento

Certifique-se de que você esteja com o medicamento correto. O medicamento dentro deve estar transparente. Este pode ser incolor a levemente amarelado.

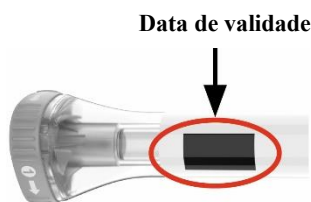

**Não** utilize a Caneta (veja **Descartando EBGLYSS**) se:


- a Caneta parecer danificada
- o medicamento estiver turvo, com a cor alterada ou apresentar partículas
- a data de validade impressa no rótulo estiver expirada

### Lave suas mãos com água e sabão

### Escolha e Limpe o seu local de aplicação

Seu médico pode lhe ajudar a escolher o local de aplicação que seja melhor para você.

**Limpe o local de aplicação com um lenço umedecido com álcool e espere secar.**

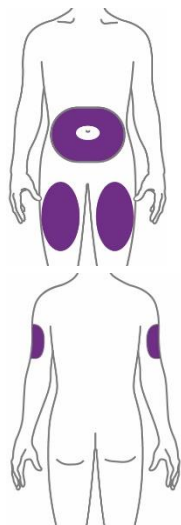

Você ou outra pessoa podem aplicar nessas áreas.

Outra pessoa deve aplicar nessa área para você.


- **Área da barriga (abdome)** —  
A pelo menos 5 centímetros de distância do umbigo.
- **Frente da coxa** —  
A pelo menos 5 centímetros acima do joelho e 5 centímetros abaixo da virilha.
- **Posterior do braço** —  
Outra pessoa deve aplicar na parte detrás do seu braço.

**Não** aplique todas as vezes exatamente no mesmo local.

**Não** aplique nas áreas onde a pele esteja sensível, machucada, vermelha, enrijecida, ou em áreas da pele afetadas pela dermatite atópica ou outras lesões de pele.

## Aplicando EBGLYSS

### 1 Destampe a Caneta

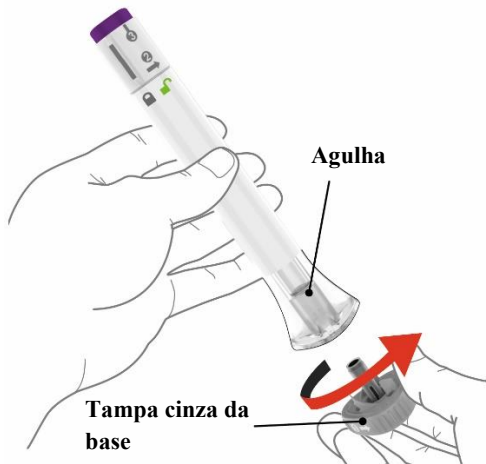

☒ Certifique-se de que a Caneta esteja **travada**.




Quando você estiver pronto para aplicar, gire para fora a tampa cinza da base e descarte-a em seu lixo doméstico.

Não coloque a tampa cinza da base de volta – isto pode danificar a agulha.

Não toque na agulha dentro da base transparente.


### 2 Posicione e Destrave

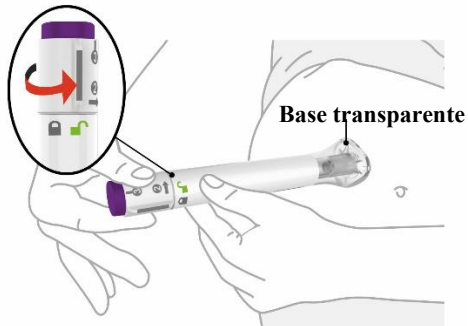

**Posicione** e segure a base transparente de forma plana e firme contra a pele.

☒ Mantenha a base transparente na pele e depois gire o anel de travamento para a posição **destravada**.

### 3 Pressione e Segure por 15 Segundos

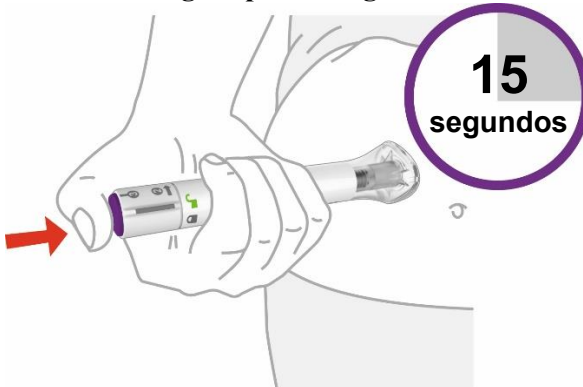


**Pressione e segure** o botão de injeção roxo e **Escute** dois cliques altos:

- primeiro clique = aplicação iniciada
- segundo clique = aplicação concluída


A aplicação pode durar até 15 segundos.

Você saberá que a aplicação está concluída quando o êmbolo cinza estiver visível.

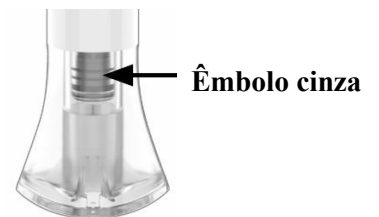

## Descartando EBGLYSS

### Descarte a Caneta usada

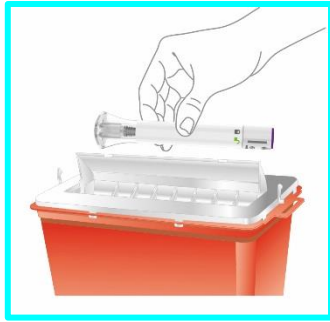

Deposite a Caneta EBGLYSS usada em um recipiente para descarte de materiais perfurocortantes logo após o uso.

**Não** descarte a Caneta EBGLYSS em seu lixo doméstico.

Se você não tiver um recipiente para descarte de materiais perfurocortantes, você poderá usar um recipiente doméstico que:

- seja feito de plástico resistente,
- possa ser fechado com uma tampa bem ajustada e resistente a perfurações, que impeça a saída de perfurocortantes,
- fique em posição vertical e estável durante o uso,
- seja à prova de vazamentos, e,
- seja devidamente sinalizado para advertir sobre os resíduos perigosos no interior do recipiente.

Quando o seu recipiente para descarte de materiais perfurocortantes estiver quase cheio, você precisará seguir as diretrizes locais sobre a maneira correta de descarte do recipiente.

Pode haver leis locais sobre como você deverá descartar agulhas e seringas.

Para mais informações sobre descarte seguro de materiais perfurocortantes, pergunte ao seu médico sobre as opções disponíveis na sua área.

**Não** recicle seu recipiente para descarte de materiais perfurocortantes usado.

### Perguntas Frequentes

**P. E se eu identificar bolhas na Caneta?**

R. Bolhas de ar são normais. Elas não irão lhe prejudicar ou afetar sua dose.

**P. E se houver uma gota de líquido na ponta da agulha quando eu remover a tampa cinza da base?**

R. É normal haver uma gota de líquido na ponta da agulha. Isso não irá lhe prejudicar ou afetar sua dose.

**P. E se eu destravar a Caneta e pressionar o botão de injeção roxo antes de retirar a tampa cinza da base?**

R. **Não** remova a tampa cinza da base. Jogue fora (descarte) a Caneta e pegue uma nova.

**P. Eu preciso manter o botão de injeção roxo pressionado até que a aplicação seja concluída?**

R. Você não precisa manter o botão de injeção roxo pressionado, mas isso pode lhe ajudar a manter a Caneta estável e firme contra a sua pele.

**P. E se a agulha não retrair após a minha aplicação?**

R. **Não** toque na agulha e nem coloque a tampa cinza da base. Guarde a Caneta em um local seguro para evitar uma picada acidental de agulha e entre em contato com 0800 701 0444 para obter instruções sobre como devolver a Caneta.

**P. E se houver uma gota de líquido ou sangue na minha pele após a minha aplicação?**

R. Isto é normal. Pressione um pedaço de algodão ou gaze sobre o local da aplicação. **Não** esfregue o local da aplicação.

**P. Como posso saber se minha aplicação está concluída?**

R. Depois de pressionar o botão de injeção roxo, você ouvirá dois cliques altos. O segundo clique alto informa que sua aplicação está concluída. Você também verá o êmbolo cinza na parte superior da base transparente. A injeção pode levar até 15 segundos.

**P. E se eu removi a Caneta antes do segundo clique alto ou antes do êmbolo cinza parar de se mover?**

R. Você pode não ter recebido a dose completa. **Não** realize outra aplicação. Ligue para o seu médico para pedir orientações.

**P. E se eu ouvi mais que 2 cliques durante a minha aplicação? — 2 cliques altos e 1 suave. Eu recebi minha aplicação completa?**

R. Algumas pessoas podem ouvir um clique suave logo antes do segundo clique alto. Este é o funcionamento normal da Caneta. **Não** remova a Caneta da sua pele antes de ouvir o segundo clique alto.

**Caso tenha mais dúvidas sobre como utilizar a Caneta EBGLYSS:**

- Ligue para o seu médico
- Ligue 0800 701 0444
- Visite [www.lilly.com.br](http://www.lilly.com.br)

**Armazenando EBGLYSS**

- Armazenar sua Caneta em geladeira de 2°C a 8°C.
- Sua Caneta pode ser armazenada em temperatura ambiente por até 7 dias. **Não** armazene acima de 30°C. Jogue fora (descarte) EBGLYSS se não utilizado dentro de 7 dias em temperatura ambiente.
- **Não** congele sua Caneta.
- Manter na embalagem original para proteger sua Caneta da luz até o uso.
- **Não** coloque a Caneta no micro-ondas, nem jogue água quente sobre ela e nem a deixe exposta à luz solar direta.
- **Não** agite a Caneta.
- Jogue fora (descarte) sua Caneta se qualquer uma das condições acima não forem seguidas.
- **Mantenha sua Caneta e todos os medicamentos fora da visão e alcance das crianças.**

**Leia a bula de EBGLYSS para aprender mais sobre o seu medicamento.**

Registro: 1.1260.0205

**Produzido por:**

Eli Lilly and Company – Indianápolis – EUA

**Importado e Registrado por:**

Eli Lilly do Brasil Ltda.

Av. Morumbi, 8264 – São Paulo, SP

CNPJ 43.940.618/0001-44

EBGLYSS® é uma marca registrada da Eli Lilly and Company.

Copyright© 2024 Eli Lilly and Company. Todos os direitos reservados.

A Caneta EBGLYSS cumpre os requerimentos vigentes de exatidão de dose e funcionais da ISO 11608-1 e 11608-5.

Lilly SAC 0800 701 0444

sac\_brasil@lilly.com

www.lilly.com.br

**Este material foi aprovado pela ANVISA em 29/10/2024.**