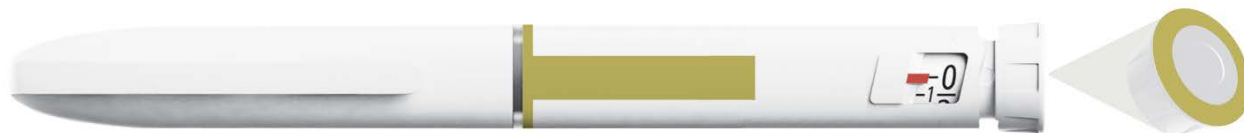


INSTRUÇÕES DE USO

BASAGLAR® KwikPen®
insulina glargina
(100 unidades/mL, caneta de 3 mL)



POR FAVOR, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

Leia as Instruções de Uso antes da primeira vez que for utilizar uma BASAGLAR KwikPen e a cada vez que você iniciar o uso de uma outra BASAGLAR KwikPen. Podem existir novas informações. Estas informações não substituem as orientações do seu médico sobre a sua condição de saúde ou seu tratamento.

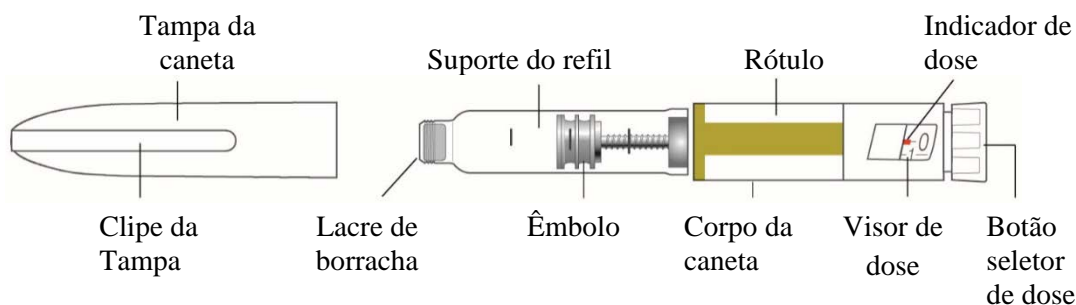
BASAGLAR KwikPen (“Caneta”) é uma caneta pré-preenchida, descartável, contendo 300 unidades de BASAGLAR (insulina glargina [origem ADN_r]). Você pode fazer várias aplicações (múltiplas doses) usando uma caneta. A caneta seleciona as unidades de 1 em 1. Você pode aplicar de 1 a 80 unidades de insulina em uma única aplicação. **Se a sua dose for maior que 80 unidades, você terá que aplicar mais de uma injeção.**

O êmbolo só se move um pouco em cada aplicação, e você pode não perceber que ele se move. O êmbolo só vai chegar ao fim do refil quando tiver usado todas as 300 unidades da caneta.

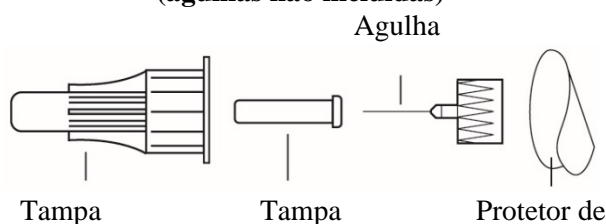
Não compartilhe a sua caneta com outra pessoa, mesmo que a agulha tenha sido trocada. Não reutilize ou compartilhe suas agulhas com outra pessoa. Você pode transmitir uma infecção a outras pessoas ou adquirir uma infecção grave delas.

Esta caneta não é recomendada para pessoas com deficiência total ou parcial de visão, sem a assistência de uma pessoa treinada sobre a utilização da caneta.

Partes da Kwikpen



Partes da Agulha da Caneta (agulhas não incluídas)



Seletor de Dose com anel verde



externa da agulha interna da agulha papel

Como reconhecer a sua BASAGLAR KwikPen:

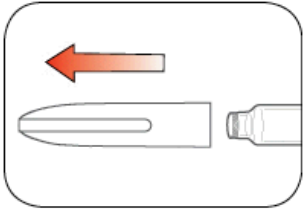
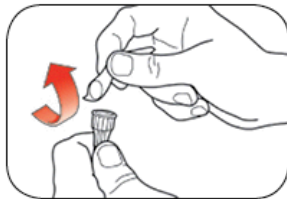
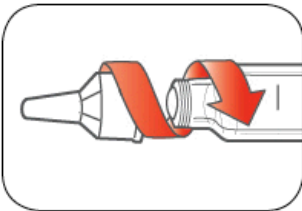
- Cor da caneta: cinza claro.
- Botão seletor de dose: cinza claro com anel verde na extremidade.
- Rótulo: cinza claro com barras verdes.

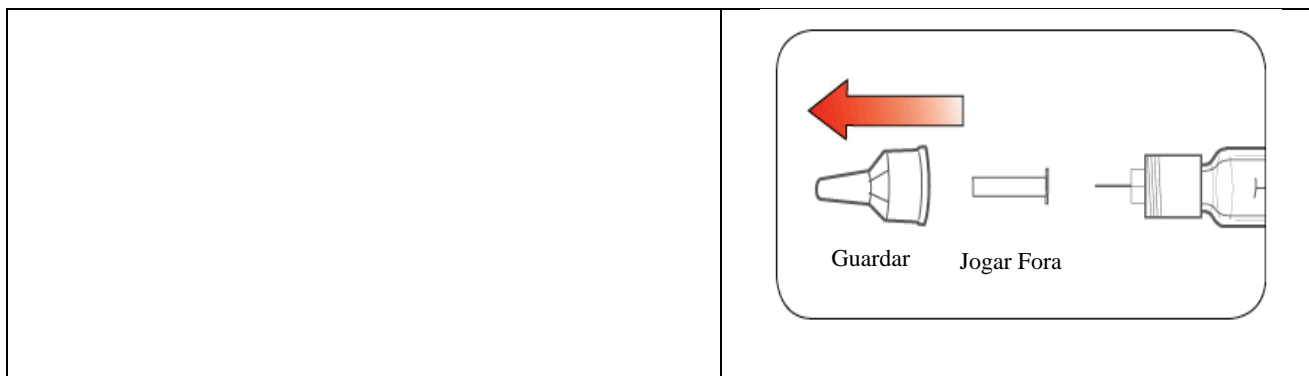
Materiais necessários para aplicação:

- BASAGLAR KwikPen.
- Agulhas compatíveis: recomenda-se o uso da caneta KwikPen com agulhas da marca Becton, Dickinson and Company (BD).
- Algodão com álcool.

Preparação da sua Caneta

- Lave as mãos com água e sabão.
- Certifique-se de que você está usando o tipo correto de insulina. Este cuidado é especialmente importante se você usar mais de um tipo de insulina.
- **Não** use a caneta caso já tenha passado o prazo de validade descrito no rótulo ou após 28 dias do primeiro dia de uso da caneta.
- Utilize sempre uma **nova agulha** em cada aplicação para ajudar a prevenir infecções e entupimento da agulha.

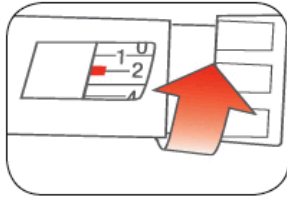

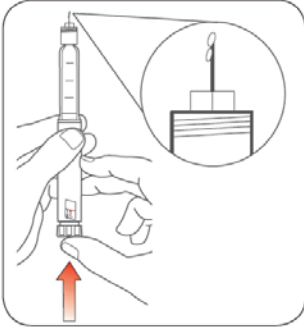
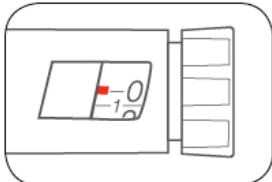
<p>Etapa 1:</p> <ul style="list-style-type: none">• Puxe a tampa da caneta para fora. - Não remova o rótulo da caneta• Utilize um algodão com álcool para limpar o lacre de borracha. <p>Verifique se BASAGLAR está clara e incolor. Não utilize se ela estiver turva, colorida ou com partículas ou aglomerados.</p>	
<p>Etapa 2:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pegue uma nova agulha.• Remova o protetor de papel da tampa externa da agulha.	
<p>Etapa 3:</p> <ul style="list-style-type: none">• Empurre a agulha encapada em direção à caneta e rosqueie a agulha até firmar.	
<p>Etapa 4:</p> <ul style="list-style-type: none">• Puxe a tampa externa. Não a jogue fora.• Puxe a tampa interna e jogue-a fora.	



Regulagem da Caneta

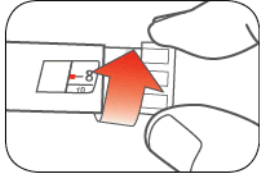
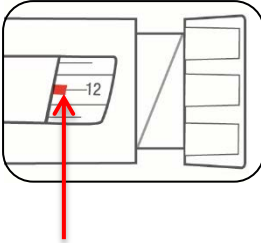
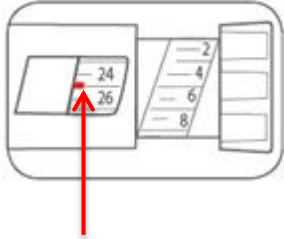
Regule antes de cada aplicação.

- Regular sua caneta significa remover o ar da agulha e refil que pode ser acumulado em decorrência do uso rotineiro e garante que a caneta está funcionando corretamente.
- Se você **não** regular a caneta antes de cada aplicação, você pode receber uma dose bem maior ou bem menor de insulina.

<p>Etapa 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para regular sua caneta, selecione 2 unidades girando o botão seletor de dose. 	
<p>Etapa 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coloque a caneta com a agulha virada para cima. Bata levemente no suporte do refil para posicionar as bolhas de ar no topo. 	
<p>Etapa 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continue segurando sua caneta com a agulha para cima. Empurre o botão seletor de dose até parar e aparecer “0” no visor de dose. Segure o botão seletor de dose e conte lentamente até 5. Você deverá ver a insulina na ponta da agulha. - Se a insulina não aparecer, repita as etapas de regulagem, mas não por mais de 4 vezes. - Se a insulina continuar não aparecendo, troque a agulha e repita as etapas de regulagem. <p>Pequenas bolhas de ar são normais e não afetarão a sua dose.</p>	 

Seleção da dose

- Você pode aplicar de 1 a 80 unidades de insulina em uma única aplicação.
- Se a sua dose for maior que 80 unidades, você precisará utilizar mais de uma aplicação.
 - Se você precisar de ajuda para decidir como dividir a dose, pergunte ao seu médico.
 - Você deve usar uma agulha nova para cada aplicação e repetir a etapa de regulagem.

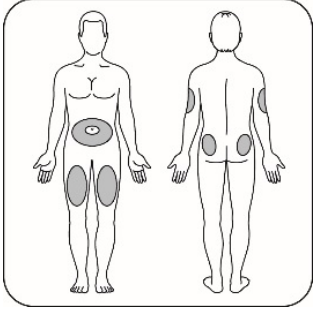

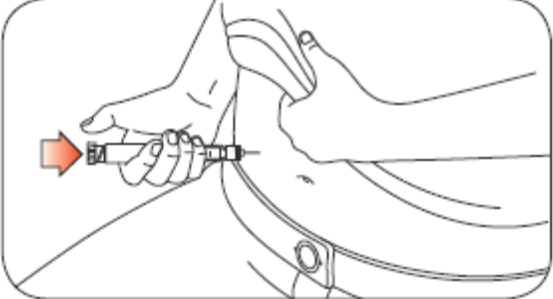
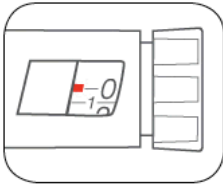
<p>Etapa 8:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gire o botão seletor de dose para o número de unidades de insulina que você precisa aplicar. O indicador de dose deve estar alinhado com a sua dose.<ul style="list-style-type: none">- A caneta seleciona as unidades de uma em uma.- O botão seletor de dose faz um clique quando é girado.- NÃO selecione sua dose pela contagem dos cliques porque você pode marcar a dose errada.- A dose pode ser corrigida girando o botão seletor de dose em qualquer direção até a dose correta estar alinhada ao indicador de dose.- Os números pares estão impressos no indicador.- Os números ímpares, após o número um, são demonstrados sob a forma de linhas.• Sempre verifique o número no visor de dose para ter certeza que você selecionou a dose correta.	  <p>Exemplo: 12 unidades demonstradas no visor de dose</p>  <p>Exemplo: 25 unidades demonstradas no visor de dose</p>
--	---

- A caneta não permitirá que você selecione uma dose maior do que o número de unidades que restam na caneta.
- Se a sua dose for maior que o número de unidades restantes na caneta, você deve:
 - aplicar a quantidade que sobrou na caneta atual e, então, utilizar uma nova caneta para completar a sua dose, **ou**
 - aplicar a dose completa com o uso de uma nova caneta.
- É normal restar na caneta uma pequena quantidade de insulina que você não consegue aplicar.

Aplicando sua injeção


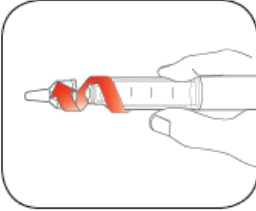
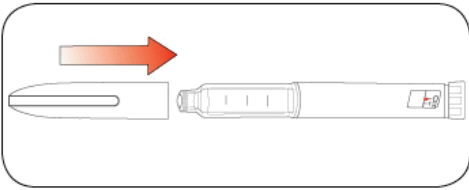
- Aplique sua insulina conforme o seu médico demonstrou.
- Mude (alterne) os locais da aplicação a cada injeção.
- **Não** tente mudar sua dose durante a aplicação.

Etapa 9:	
-----------------	--

<p>Escolha o local da aplicação.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BASAGLAR é injetado sob a pele (por via subcutânea) na região abdominal, nádegas, coxas ou parte superior dos braços. • Limpe a pele com um algodão umedecido com álcool e deixe o local da aplicação secar antes de aplicar sua dose. 	
<p>Etapa 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insira a agulha na pele. • Empurre o botão seletor de dose até ele parar de se mover. • Segure o botão seletor de dose e conte lentamente até 5 antes de remover a agulha da pele.  <p>Não tente aplicar a insulina girando o botão seletor de dose. Você NÃO receberá a insulina girando o botão seletor de dose.</p>	
<p>Etapa 11:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remova a agulha da pele. <ul style="list-style-type: none"> - É normal ficar uma gota de insulina na ponta da agulha. Isso não irá afetar a sua dose. • Verificar o número no visor de dose. <ul style="list-style-type: none"> - Se você visualizar o “0” no visor de dose, você recebeu a sua dose completa. - Se você não visualizar o “0” no visor de dose, não gire novamente. Insira a agulha na pele e termine a aplicação. - Se você acha que ainda não recebeu a sua dose completa, não comece novamente ou repita a aplicação. Monitore sua glicemia conforme orientado pelo seu médico. - Se você normalmente precisa receber 2 aplicações para sua dose completa, sempre se certifique de ter aplicado a sua segunda aplicação. <p>O êmbolo só se move um pouco em cada aplicação e você pode não perceber que ele se move. Após a retirada da agulha de sua pele, se você visualizar sangue, pressione o local da aplicação da injeção levemente com um pedaço de gaze ou algodão umedecido com álcool. Não esfregue a região.</p>	

Após sua aplicação

<p>Etapa 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuidadosamente, recoloca a tampa externa na agulha. 	
---	--

	
<p>Etapa 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desrosqueie a agulha tampada e descarte-a conforme descrito abaixo (ver a seção Descarte das canetas e agulhas). • Não armazene a caneta com a agulha fixada para prevenir vazamento, entupimento da agulha e entrada de ar na caneta. 	
<p>Etapa 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recoloque a tampa da caneta alinhando o clipe da caneta com o indicador de dose e a empurre em direção à caneta. 	

Descarte das canetas e agulhas

- Descarte as agulhas usadas em um recipiente que possa ser fechado após o uso, resistente a objetos perfurocortantes. **Não** jogue as agulhas diretamente no seu lixo doméstico.
- A caneta usada pode ser descartada no seu lixo doméstico após a remoção da agulha.
- **Não** reciclar o recipiente para objetos perfurocortantes quando estiver cheio.
- Pergunte ao seu médico sobre as opções disponíveis para realizar apropriadamente o descarte dos recipientes para objetos perfurocortantes.
- As instruções sobre manuseio da agulha não devem substituir as recomendações dos profissionais de saúde locais ou orientações da instituição de saúde.

Armazenamento da caneta

Caneta não usada

- As canetas que não estiverem sendo utilizadas devem ser armazenadas no refrigerador em temperaturas entre 2 e 8°C.
- **Não** congelar BASAGLAR KwikPen. **Não** usar a caneta se tiver sido congelada.
- Canetas não usadas podem ser utilizadas até a data de validade impressa no rótulo, se a caneta foi mantida na geladeira.

Caneta em uso

- A caneta que você está usando atualmente deve ser mantida à temperatura ambiente (abaixo de 30°C) e longe do calor e da luz.
- A caneta que você está usando deve ser descartada após 28 dias de uso, mesmo que ela ainda contenha insulina.

Informações gerais sobre o uso seguro e eficaz da caneta

- **Mantenha a sua caneta e agulhas fora da visão e do alcance das crianças.**
- Se qualquer uma das partes de sua caneta parecer quebrada ou danificada, **não** a utilize.
- Tenha sempre uma caneta reserva para a aplicação de insulina, em caso de dano ou perda.

Solução de Problemas

- Se você está tendo dificuldade para remover a tampa, gire-a levemente para frente e para trás para realinhá-la e, então, puxe a tampa da caneta.
- Se estiver difícil empurrar o botão seletor de dose:
 - Pressione mais lentamente o botão seletor de dose para tornar este procedimento mais fácil.
 - Sua agulha pode estar obstruída. Fixe uma nova agulha e regule a caneta.
 - Você pode ter sujeira, comida ou líquido dentro da sua caneta. Substitua a caneta que você estiver usando por uma caneta nova.

Em caso de dúvidas ou problemas com sua BASAGLAR KwikPen, consulte o seu médico e/ou entre em contato com o Lilly SAC 0800 701 0444. Para maiores informações sobre BASAGLAR KwikPen e insulina, visite nosso site www.lilly.com.br.

REGISTRO MS - 1.1260.0194

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Farm. Resp.: Márcia A. Preda - CRF-SP nº 19189
Fabricação, validade e número de lote, vide embalagem

Fabricado por:

Lilly France S.A.S. – Fegersheim – França

Embalado por:

Eli Lilly and Company – Indianápolis – EUA

ou

Lilly France S.A.S. – Fegersheim – França

Ou

Fabricado por:

Eli Lilly Italia S.p.A. – Sesto Fiorentino – Itália

Embalado por:

Lilly France S.A.S. – Fegersheim – França

Importado por:

Eli Lilly do Brasil Ltda.

Av. Morumbi, 8264 – São Paulo, SP

CNPJ 43.940.618/0001-44

BASAGLAR KwikPen é uma marca registrada da Eli Lilly and Company.

Copyright © 2020, Eli Lilly and Company. Todos os direitos reservados.

BASAGLAR KwikPen atende às normas vigentes da ISO 11608-1 de precisão da dose e funcionalidade.

Lilly SAC 0800 701 0444

sac_brasil@lilly.com

www.lilly.com.br



Este documento foi aprovado pela ANVISA em 23/03/2020.