

Fixodent


4 ÉTAPES SIMPLES



**NETTOYEZ &
SÉCHEZ**

1

Nettoyez et séchez votre prothèse dentaire avant d'appliquer la crème adhésive.

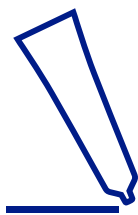

APPLIQUEZ

2

Appliquez la crème adhésive en lignes fines comme indiqué, voire moins. Vous devrez probablement effectuer quelques essais avant de trouver la quantité.



Haut



Bas



Prothèse
partielle

Taille maximum de chaque bande

4x17mm



**INSÉREZ &
MAINTENEZ**

3

Insérez la prothèse dentaire et maintenez-la en place quelques secondes. Lors de la mise en bouche, si le produit déborde cela signifie que vous en avez trop mis.



**RETIREZ &
RINCEZ**

4

Pour retirer votre prothèse dentaire, rincez votre bouche à l'eau tiède, faites bouger la prothèse jusqu'à ce qu'elle se détache.

BE FR LU CRÈME ADHÉSIVE pour prothèses totales et partielles.

IMPORTANT:

- ✘ • **NE PAS** utiliser plus de crème adhésive que ce qui est indiqué.
- ✘ • **NE PAS** utiliser de produit plus d'une fois par jour. Utilisé de façon normale, ce tube doit durer 5 - 6 semaines pour 47g et 7 - 8 semaines pour 70.5g.
- ✘ • **NE PAS** utiliser de produit en excès si votre prothèse est mal ajustée.
- ✘ • **NE PAS** utiliser plus de produit que ce qui est indiqué. Contient du zinc. Consultez un médecin si vous utilisez déjà d'autres produits contenant du zinc.

Vous sentez une gêne? Consultez régulièrement votre dentiste pour contrôler l'ajustement de votre prothèse. Une prothèse qui s'ajuste difficilement peut altérer votre santé.

⚠ AVERTISSEMENT: Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des ingrédients. Dans l'éventualité peu probable d'un problème suspecté grave avec ce produit, consultez votre dentiste ou votre médecin et signalez-le au fabricant et à l'autorité sanitaire nationale.

Tenir le bout et le bouchon au sec, afin d'empêcher l'obstruction. Si l'embout s'obstrue, l'ouvrir avec une aiguille.

ORIGINAL INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cellulose Gum (20%), Silica, Aroma, CI 45410, Menthol, Limonene.

NEUTRAL INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cellulose Gum (20%), Silica.

ORIGINAL ANTIBACTÉRIEN INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum (20%), Petrolatum, Silica, Menthyl Lactate, Aroma, CI 45410, Menthol, Limonene.