

# Fixodent


## 4 ÉTAPES SIMPLES



**NETTOYEZ &  
SÉCHEZ**

**1**

**Nettoyez et séchez** votre prothèse dentaire avant d'appliquer la crème adhésive.

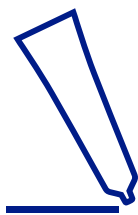

**APPLIQUEZ**

**2**

**Appliquez la crème adhésive** en lignes fines comme indiqué, voire moins. Vous devrez probablement effectuer quelques essais avant de trouver la quantité.



Haut



Bas



Prothèse  
partielle

Taille maximum de chaque bande

4x17mm



**INSÉREZ &  
MAINTENEZ**

**3**

**Insérez la prothèse dentaire** et maintenez-la en place quelques secondes. Lors de la mise en bouche, si le produit déborde cela signifie que vous en avez trop mis.



**RETIREZ &  
RINCEZ**

**4**

**Pour retirer votre prothèse dentaire**, rincez votre bouche à l'eau tiède, faites bouger la prothèse jusqu'à ce qu'elle se détache.

BE FR LU CRÈME ADHÉSIVE pour prothèses totales et partielles.

### IMPORTANT:

- ✘ • **NE PAS** utiliser plus de crème adhésive que ce qui est indiqué.
- ✘ • **NE PAS** utiliser de produit plus d'une fois par jour. Utilisé de façon normale, ce tube doit durer 5 - 6 semaines pour 47g et 7 - 8 semaines pour 70.5g.
- ✘ • **NE PAS** utiliser de produit en excès si votre prothèse est mal ajustée.
- ✘ • **NE PAS** utiliser plus de produit que ce qui est indiqué. Contient du zinc. Consultez un médecin si vous utilisez déjà d'autres produits contenant du zinc.

**Vous sentez une gêne?** Consultez régulièrement votre dentiste pour contrôler l'ajustement de votre prothèse. Une prothèse qui s'ajuste difficilement peut altérer votre santé.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des ingrédients. Dans l'éventualité peu probable d'un problème suspecté grave avec ce produit, consultez votre dentiste ou votre médecin et signalez-le au fabricant et à l'autorité sanitaire nationale.

Tenir le bout et le bouchon au sec, afin d'empêcher l'obstruction. Si l'embout s'obstrue, l'ouvrir avec une aiguille.

**ORIGINAL INGREDIENTS:** Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cellulose Gum (20%), Silica, Aroma, CI 45410, Menthol, Limonene.

**NEUTRAL INGREDIENTS:** Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cellulose Gum (20%), Silica.

**ORIGINAL ANTIBACTÉRIEN INGREDIENTS:** Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum (20%), Petrolatum, Silica, Menthyl Lactate, Aroma, CI 45410, Menthol, Limonene.