




REINIGEN & TROCKNEN

1

Reinigen und trocknen Sie Ihre Zahnprothese, bevor Sie die Haftcreme auftragen.

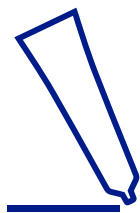

AUFTRAGEN

2

Tragen Sie die Haftcreme wie abgebildet (oder weniger) in dünnen, durchgehenden Linien auf. Sie könnten einige Versuche benötigen, um die für Ihre Prothese passende Menge zu ermitteln.



Oberkieferprothese



Unterkieferprothese



Teilprothese



EINSETZEN & ANDRÜCKEN

3

Prothese einsetzen und kurz andrücken. Wenn die Haftcreme an den Rändern der Prothese herausquillt, haben Sie zu viel aufgetragen.



AUSSPÜLEN & ENTFERNEN

4

Zum Entfernen der Prothese, den Mund mit warmem Wasser ausspülen, leicht an der Prothese wackeln, bis sie sich löst.

HAFTCREME für Voll- und Teilprothesen.

WICHTIG:

- ✗ • **NICHT** mehr Haftcreme anwenden als in der Abbildung gezeigt.
- ✗ • **NICHT** öfter als einmal pro Tag anwenden. Bei sachgemäßer Anwendung sollte der Tubeninhalt für mindestens 4 bis 5 Wochen ausreichen.
- ✗ • **NICHT** übertrieben viel Haftcreme bei schlecht sitzender Prothese auftragen.
- ✗ • **NICHT** mehr als angegeben verwenden. Enthält Zink, fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie weitere zinkhaltige Produkte verwenden.

Ihre Prothese sitzt nicht richtig?

Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig bei Ihrem Zahnarzt kontrollieren. Schlecht sitzende Prothesen können Ihre Gesundheit beeinträchtigen.

⚠️ WARNHINWEIS:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein möglicherweise ernstes Problem nach der Verwendung des Produkts auftritt, kontaktieren Sie Ihren Zahnarzt oder Arzt und benachrichtigen den Hersteller oder die zuständigen Behörden. Öffnung und Verschluss trocken halten, um Verkleben zu vermeiden. Wenn die Spitze verstopft ist, eine Nadel verwenden, um sie wieder zu öffnen.

INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (35%), Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum (20%), Petrolatum, Hydrated Silica, Menthyl Lactate, Aroma, Menthol, CI 45410, BHT, Tocopherol.

RECYCLIERBARE
BROSCHÜRE

www.pg.com

Medizinprodukt hergestellt in Deutschland für
P&G Tech. Centres Ltd, KT13 OXP, UK
DE Tel. 0800 588 91 99



PAP

CE 0197