




**REINIGEN &
TROCKNEN**

1

Reinigen und trocknen Sie Ihre Zahnprothese, bevor Sie die Haftcreme auftragen.

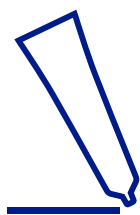

AUFTRAGEN

2

Tragen Sie die Haftcreme wie abgebildet (oder weniger) in dünnen Streifen auf. Sie könnten einige Versuche benötigen, um die für Ihre Prothese passende Menge zu ermitteln.



Oberkieferprothese



Unterkieferprothese



Teilprothese

Maximale Streifengröße

4x17mm



**EINSETZEN &
ANDRÜCKEN**

3

Prothese einsetzen und kurz andrücken. Wenn die Haftcreme an den Rändern der Prothese herausquillt, haben Sie zu viel aufgetragen.



**AUSSPÜLEN &
ENTFERNEN**

4

Zum Entfernen der Prothese, den Mund mit warmem Wasser ausspülen, leicht an der Prothese wackeln, bis sie sich löst.

**HAFTCREME für Voll- und Teilprothesen.
WICHTIG:**

- ✗ • **NICHT** mehr Haftcreme anwenden als in der Abbildung gezeigt.
- ✗ • **NICHT** öfter als einmal pro Tag anwenden. Bei sachgemäßer Anwendung sollte die Tube für 5 – 6 Wochen bei 47g und 7 – 8 Wochen bei 70g Tubeninhalt ausreichen.
- ✗ • **NICHT** übertrieben viel Haftcreme bei schlecht sitzender Prothese auftragen.
- ✗ • **NICHT** mehr als angegeben verwenden. Enthält Zink, fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie weitere zinkhaltige Produkte verwenden.

Ihre Prothese sitzt nicht richtig?

Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig bei Ihrem Zahnarzt kontrollieren. Schlecht sitzende Prothesen können Ihre Gesundheit beeinträchtigen.

⚠ WARNHINWEIS: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein möglicherweise ernstes Problem nach der Verwendung des Produkts auftritt, kontaktieren Sie Ihren Zahnarzt oder Arzt und benachrichtigen den Hersteller oder die zuständigen Behörden. Öffnung und Verschluss trocken halten, um Verkleben zu vermeiden. Wenn die Spitze verstopft ist, eine Nadel verwenden, um sie wieder zu öffnen.

ORIGINAL INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cellulose Gum (20%), Silica, Aroma, CI 45410, Menthol, Limonene.

NEUTRAL INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cellulose Gum (20%), Silica.

FRISCH INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum (20%), Silica, Menthyl Lactate, Aroma, Menthol, CI 45410.



Medizinprodukt hergestellt in Deutschland für

P&G Tech. Centres Ltd, KT13 0XP, UK

DE Tel. 0800 588 91 99



PAP

CE 0197