

SEIRIN PYONEX NEEDLES




SEIRIN CORPORATION



JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan

<https://www.seirin.jp>

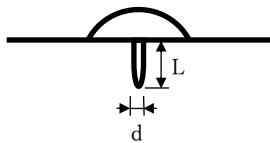

L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20

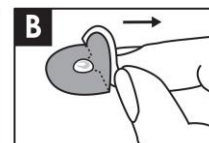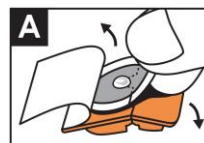

sl SEIRIN PYONEX IGLICE

Trenutni znanstveni dokazi dokazujejo, da medicinski pripomočki, izdelani iz zlitin nerjavnega jekla, ki vsebujejo kobalt, ne povzročajo povečanega tveganja za raka in nimajo škodljivih učinkov na razmnoževanje.

[Namen uporabe, indikacije]

Ta izdelek je pripomoček, namenjen prebadanju kože pri izvajanju akupunkture s strani pooblaščenih zdravnikov (specialistov) za lajšanje bolečin in spodbujanje drugih terapevtskih učinkov.

[Previdnostni ukrepi za uporabo (mora se uporabljati previdno pri naslednjih bolnikih)]

- Nosečnice [akupunktura lahko povzroči porod]
- Bolniki z malignimi tumorji [akupunktura lahko pospeši rast ali metastaze malignih tumorjev]
- Bolniki s hemoragično boleznijo [akupunktura lahko spodbuja krvavitev]
- Bolniki, alergični na kovine, kot so nikelj, krom in druge komponente iz nerjavnega jekla

[Metodi uporabe] Z iglami ravnajte previdno, da preprečite poškodbe, ker so ostre.

- 1) **Preverite:** preverite, ali je na embalaži morebitna poškodba, kontaminacija ali puščanje tekočine. Izdelka ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana, kontaminirana ali mokra.
- 2) **Enkratna uporaba:** Seirinove igle so sterilizirane, za enkratno uporabo in samo za enkratno uporabo. Njihova ponovna uporaba poveča tveganje za okužbo.
- 3) **Dezinfekcija:** Z alkoholnimi blazinicami očistite predele, kamor bodo vstavljene igle. Pustite, da se koža posuši, preden vstavite igle.
- 4) **Vizualni pregled:** Pred uporabo preglejte igle. Ne uporabljajte igel, če so upognjene, poškodovane ali če je zaznana kakšna druga anomalija.
- 5) **Odprite embalažo in odstranite izdelek①:** Odstranite tesnilo pokrova s plastičnega ohišja in dvignite jeziček v obliki polmeseca skupaj s trakom, kot prikazuje slika. Plastično ohišje zlahka zložite s prsti nazaj.
- 6) **Uporaba ②:** Dvignite jeziček v obliki polmeseca skupaj s trakom, da iglo (Pyonex) nanesete na kožo, ne da bi se dotaknili lepila na traku in konice igle. Po tem odstranite jeziček in pritisnite trak.
- 7) **Po zdravljenju:** Igle zavržite na varen način, pri čemer upoštevajte previdnostne ukrepe za zaščito pred okužbami. Če igel po odprtju embalaže ne uporabite, jih ne uporabljajte in jih pravilno zavržite.
- 8) Material igle ne more prenašati toplote, ki nastane pri moksibustiji (toplotni terapiji). Toplotne terapije moksa ne uporabljajte na traku.
- 9) Ta igla ni namenjena za elektroterapijo. Ne uporabljajte ga za električno stimulacijo.
- 10) Pacientom naročite, kopate ali plavate, pacientom naročite, naj odstranijo trak s kože, ker se bo zlahka odlepil.
- 11) Pacientom naročite, naj se izogibajo vedenju, ki povzroča stres na mestu, na katerega je nalepljen trak.

[Neželeni učinki] Pri bolniku se lahko pojavijo bolečina, srbenje, zaspanost, slabo počutje, slabost, rdečino, otekline in mehurje. Če se na območju zdravljenja pojavijo kakršne koli nenormalne reakcije, na primer pordelost in srbenje, naročite bolnikom, naj se po odstranitvi igle posvetujejo s pooblaščenim zdravnikom v akupunkturi.

[Shranjevanje] Igle hranite na varnem mestu, zaščitene pred vodo, neposredno sončno svetlobo, visoko vlažnostjo in visokimi temperaturami ter kemično kontaminacijo. Hranite stran od otrok.

[Datum izteka] Rok uporabnosti (na podlagi samocertificiranja) je naveden na zunanji škatli. Pred uporabo preverite rok uporabnosti. Ne uporabljajte izdelkov s pretečenim rokom uporabe.

Vse resne incidente, povezane s to napravo, prijavite proizvajalcu in zdravstvenim organom države članice, v kateri prebiva uporabnik in/ali pacient.

Kaj je Lot? Lot=07525A1 = 07 5 25 A1 = datum izdelave (1) zadnji dve številki leta (2) mesec (X=10 Y=11 Z=12) (3) dan (4) kontrolna številka izdelave.