

no

Vær forsiktig ved bruk på følgende pasienter:

- Gravide kvinner det er fare for at det fremkaller fødselsveer hos
- Pasienter med ondartede svulster (når pasienten risikerer skjerpende symptomer).
- Pasienter med blødningssykdommer.

Følg anvisningene nedenfor. Hvis ikke, kan det oppstå skader.

1. Spinex-nåler skal kun brukes av helsepersonell, inkludert leger og akupunktører.
2. Spinex er sterile engangsnåler.
3. Ikke bruk hvis blisterpakningen er skadet, misfarget, eller hvis papirforseglingen er brutt. Individuell innpakning sikrer at nålene er sterile.
4. Kontroller alltid utløpsdatoen for nålene. Ikke bruk nålene etter utløpsdatoen.
5. Hvis området som behandles blir rødt eller begynner å klø, eller viser tegn på andre unormale reaksjoner, bør pasienten rådføres til å fjerne nålen og ta kontakt med akupunktøren.
6. Ta nødvendige forholdsregler ved behandling av pasienter som er allergiske mot rustfritt stål.
7. Ikke bruk elektrisk stimulering, da disse nålene ikke er beregnet for elektroakupunktur.
8. Anbefal pasientene å unngå brå bevegelser mens akupunktur nålene settes inn.
9. Anbefal pasientene om at behandlede kroppsdelar ikke bør utsettes for kraftige slag eller friksjon.
10. Anbefal pasienten å fjerne Spinex før bading.
11. Oppbevar nålene utilgjengelig for barn, på et trygt sted der de er beskyttet mot kjemikalier, luftfuktighet og ekstreme temperaturer.



Manufacturer :
SEIRIN CORPORATION
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku,
Shizuoka-shi, Shizuoka, Japan
<http://www.seirin.jp>

Dist by : SEIRIN-America, Inc.
230 Libbey Parkway Weymouth,
MA 02189 U.S.A.
<http://www.seirinafrica.com>



Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands

**STERILE EO**