

# MAT-0228\_1 Features, t:slim 7.6 to 7.10.1, Rise, DEU, INTL

t:slim X2  
Insulinpumpe

SOFTWARE-UPDATES

Neue Funktionen

MAT-0228\_1

## **WICHTIG**

Erkundigen Sie sich beim medizinischen Fachpersonal, wie die aktualisierten Funktionen der Pumpe

hinsichtlich Ihrer Diabetesbehandlung zu verwenden sind.

Erfahren Sie, welche Neuerungen oder Änderungen das jeweilige Software-Update mit sich bringt. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch zur t:slim X2-Pumpe.

## Aktualisierte Funktionen für Softwareversion 7.10


### CONTROL-IQ+ TECHNOLOGIE

Klicken Sie unten auf die Registerkarten, um mehr über die Neuerungen hinsichtlich des verlängerten Bolus und der temporären Basalrate zu erfahren:

#### VERLÄNGERTER BOLUS

#### TEMP. BASALRATE

**Verlängerter Bolus** kann jetzt auf acht Stunden eingestellt werden, wenn Control-IQ+ aktiviert ist. Bisher war nur eine Einstellung auf bis zu zwei Stunden möglich.

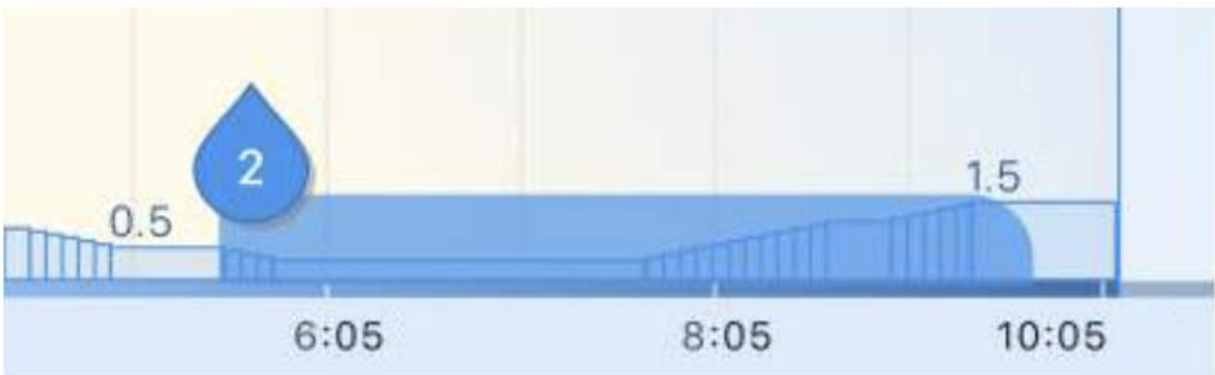

**VERLÄNGERTER BOLUS**


**TEMP. BASALRATE**

**Temporäre Basalrate** kann nun eingestellt werden, wenn Control-IQ+ verwendet wird; dies ist sogar während des Schlafs der Bewegung möglich.

**HINWEIS:** Die Insulinabgabe wird weiterhin auf der Grundlage der prognostizierten Glukosewerte automatisch angepasst, während eine temporäre Basalrate verwendet wird, wenn Control-IQ+ aktiviert ist.

### **Ein Beispiel:**

Eine temporäre Basalrate wurde auf 0 Einheiten pro Stunde von 9:30 bis 12:00 Uhr eingestellt. Da ein Anstieg der Glukose prognostiziert wurde, wurde die Basalrate erhöht und es erfolgten zwei automatische Bolusabgaben.

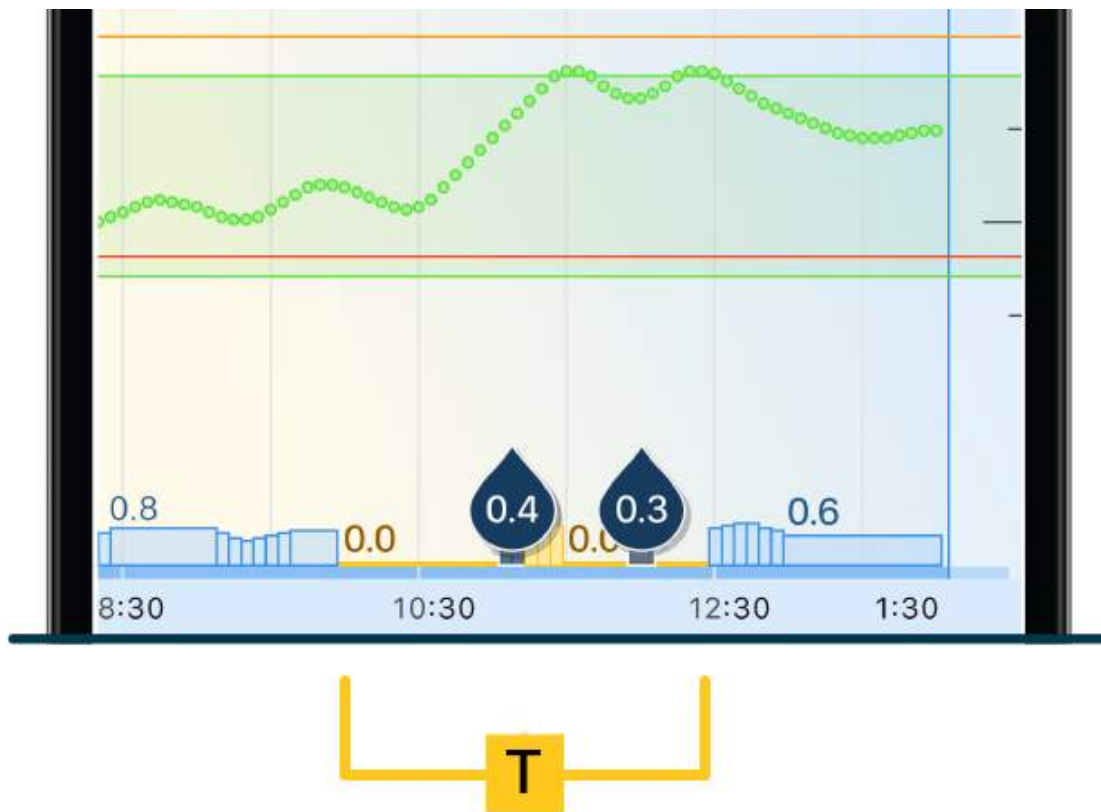

## Aktualisierte Funktionen für Softwareversion 7.7

Klicken Sie unten auf die Registerkarten, um mehr über die Neuerungen zu erfahren:

**SCHLAF UND BEWEGUNG**

**BEWEGUNGSTIMER**

**ALARM AUTOMATISCHES  
ABSCHALTEN**

Der Wechsel zwischen **Schlaf** und **Bewegung** ist nun einfacher. Sie können jetzt eine Aktivität **STARTEN**, ohne eine aktive Aktivität **BEENDEN** zu müssen.



SCHLAF UND BEWEGUNG

BEWEGUNGSTIMER

ALARM AUTOMATISCHES  
ABSCHALTEN

**Bewegungstimer** ist jetzt verfügbar und kann zwischen 30 Minuten und 8 Stunden eingestellt werden. Tippen Sie auf den Ein-Schalter, um die Option zum Einstellen eines Bewegungstimers anzuzeigen.



SCHLAF UND BEWEGUNG

BEWEGUNGSTIMER

ALARM AUTOMATISCHES  
ABSCHALTEN

Wenn der Alarm **Automatisches Abschalten** EINGESCHALTET ist, wird der Timer jetzt zurückgesetzt, wenn über die mobile Tandem-App t:slim ein Bolus abgegeben oder eine Benachrichtigung geöffnet wird.




## Aktualisierte Funktionen für Softwareversion 7.6

Klicken Sie unten auf die Registerkarten, um mehr über die Neuerungen zu erfahren:

## ALARM PUMPE FORTSETZEN

## BOLUS-SYMBOL

Wenn Sie die Insulinabgabe Ihrer Pumpe manuell STOPPEN, können Sie eine Erinnerung einrichten, um die Insulinabgabe frühestens nach 15 Minuten wieder aufzunehmen. Wählen Sie einen Timer zwischen 15, 30, 45 oder 60 Minuten. Tippen Sie auf **15 Min.**, um die anderen Zeitoptionen anzuzeigen.

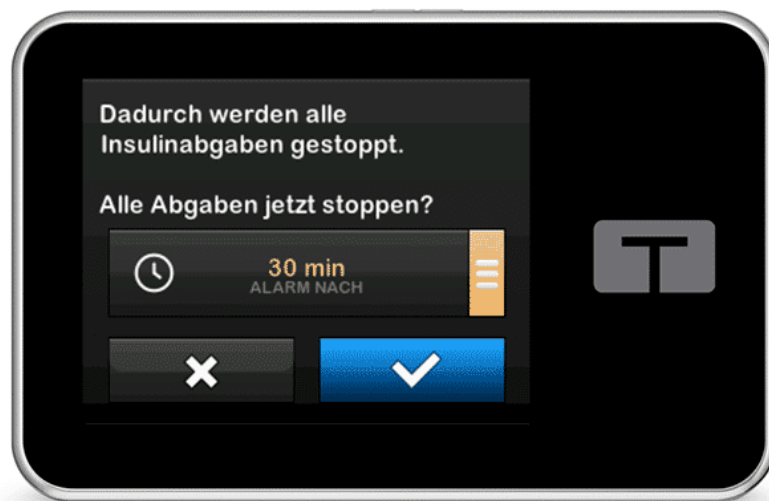

ALARM PUMPE FORTSETZEN

BOLUS-SYMBOL


**Bolus-Symbole** werden auf dem CGM-Diagramm angezeigt, nach dem ein Bolus abgegeben wurde. Je nach Art des abgegebenen Bolus können drei Arten von Symbolen angezeigt werden.




 Standard/Correction

 Auto Bolus

 Extended Bolus

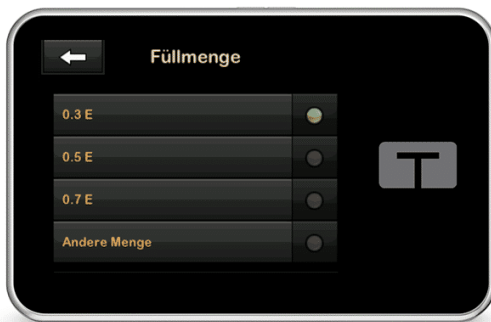

**Kanülenfüllmenge**

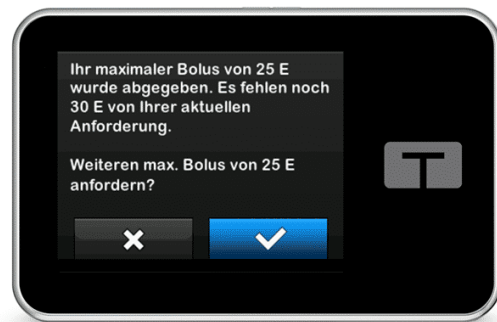

**Erinnerung zusätzlicher Bolus**

Die Optionen für Füllmengen sind nun auf die Gebrauchsanweisungen (IFU) der verschiedenen Infusionssets abgestimmt. Die Gebrauchsanweisung befindet sich in allen Verpackungen der Infusionssets.

Bei Bolusdosen über 25 Einheiten wird nach der Abgabe der ersten 25 Einheiten ein Alarm angezeigt, der zur Abgabe der restlichen angeforderten Menge auffordert. Sie haben 10 Minuten Zeit, um die Aufforderung anzunehmen.



Dieses Produkt ist möglicherweise nicht für Sie geeignet. Lesen und befolgen Sie immer die Angaben auf dem Etikett.

**Sicherheitsinformationen:** [tandemdiabetes.com/safetyinfo](https://tandemdiabetes.com/safetyinfo)

© 2025 Tandem Diabetes Care, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Tandem Diabetes Care, Tandem-Logos, Control-IQ+ und t:slim X2 sind eingetragene Marken oder Marken von Tandem Diabetes Care, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Marken Dritter gehören den jeweiligen Eigentümern. MAT-0228\_1

Bilder sind repräsentativ. Ihr Produkt kann anders aussehen.