

MAT-0246_1 Features, t:slim 7.6 to 7.10.1, ITA, INTL

t:slim X2
Pompa per Insulina

AGGIORNAMENTI SOFTWARE Nuove funzionalità

MAT-0246_1

IMPORTANTE

Parla con il tuo medico diabetologo per utilizzare correttamente le nuove funzionalità della tua pompa per insulina.

Scopri le novità e le modifiche di ogni nuova versione software. Per altre informazioni su come usare queste

funzionalità, consultare la Guida per l'utente di t:slim X2.

Funzionalità aggiornate della versione software 7.10


TECNOLOGIA CONTROL-IQ+

Fare clic sulle schede sotto per esaminare le novità su bolo esteso e basale temporanea:

BOLO ESTESO

BASALE TEMP

Il bolo esteso può essere ora impostato fino a otto ore, quando Control-IQ+ è attivo. In precedenza, poteva arrivare solo fino a due ore.

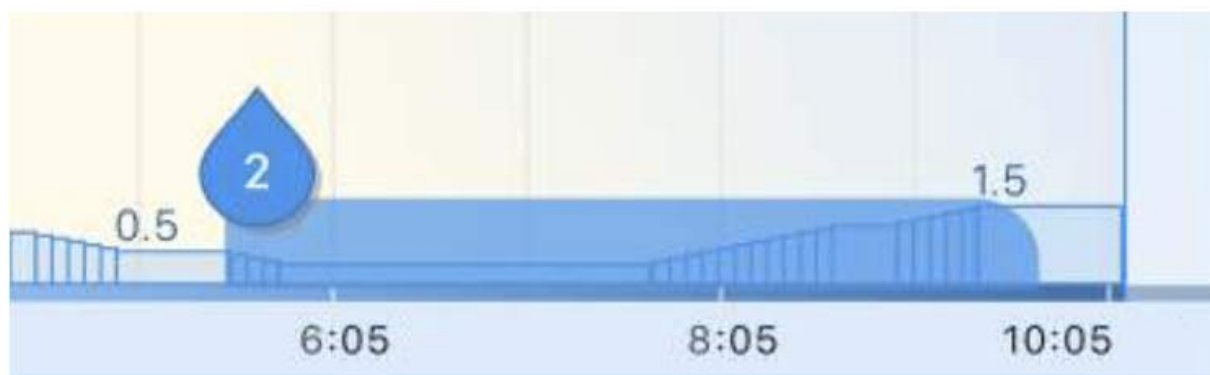

Con Control-IQ+ la **velocità basale temporanea** può essere impostata anche quando l'algoritmo è attivo e nel corso delle attività sonno o esercizio.

NOTA: la somministrazione di insulina continuerà a essere regolata automaticamente in base ai valori previsti della glicemia durante l'uso della basale temp, quando Control-IQ+ è attivo.

Esempio:

è stata impostata una basale temp per 0 unità ogni ora dalle 9:30 a mezzogiorno. In previsione di un aumento della glicemia, la velocità basale è aumentata e sono avvenute due erogazioni automatiche di un bolo correttivo.



Funzionalità aggiornate per la versione software 7.7

Fare clic sulle schede sotto per esaminare le novità:

SONNO ED ESERCIZIO

TIMER ESERCIZIO

ALLARME AUTO-OFF

Il passaggio tra **sonno** ed **esercizio** è diventato più semplice. Si può ora **AVVIARE** un'attività senza dovere **INTERROMPERE** un'attività già in corso.



SONNO ED ESERCIZIO

TIMER ESERCIZIO

ALLARME AUTO-OFF

È ora disponibile il **timer esercizio** che può essere impostato da 30 minuti a 8 ore. Spostare il selettore su ON per vedere l'opzione di impostazione di un timer per l'esercizio.



SONNO ED ESERCIZIO

TIMER ESERCIZIO

ALLARME AUTO-OFF

Se l'allarme **Auto-Off** è ON, il timer si azzererà in caso di somministrazione di un bolo o di apertura di una notifica nella Tandem Mobile app.



Funzionalità aggiornate per la versione software 7.6

Fare clic sulle schede sotto per esaminare le novità:

[ALLARME RIPRENDI POMPA](#)

[ICONE BOLO](#)

Se si **INTERROMPE** manualmente la somministrazione di insulina nella pompa, è possibile impostare un promemoria per riprenderla dopo 15

minuti o più. Scegliere un timer tra 15, 30, 45 o 60 minuti. Toccare **15 min** per vedere le altre opzioni di tempo.



ALLARME RIPRENDI POMPA

ICONE BOLO

Le icone bolo appariranno sul grafico CGM dopo la somministrazione di un bolo. In base al tipo di bolo somministrato, si possono vedere tre tipi di icone.



 Standard/Correction

 Auto Bolus

 Extended Bolus



Promemoria bolo aggiuntivo

Quantità riempimento cannula

Le relative opzioni sono ora conformi alle istruzioni per l'uso per i vari set di infusione. Tutte le confezioni dei set di infusione contengono le istruzioni per l'uso.

Per i boli superiori alle 25 unità, apparirà un avviso dopo la somministrazione delle prime 25 unità per sollecitare la somministrazione della quantità necessaria rimanente. L'utente ha 10 minuti per accettare la richiesta.



Questo prodotto potrebbe non essere adatto all'utente. Leggere e attenersi sempre all'etichetta.

Informazioni relative alla sicurezza:

tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2025 Tandem Diabetes Care, Inc. Tutti i diritti riservati. Tandem Diabetes Care, Tandem logos, Control-IQ+ e t:slim X2 sono marchi registrati o marchi di Tandem Diabetes Care, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti i marchi di terzi appartengono ai rispettivi proprietari. MAT-0246_1

Le immagini sono rappresentative. Il prodotto può avere un aspetto diverso.