

# MAT-0243\_1 Features, t:slim 7.6 to 7.10.1, mgdL, FRA, INTL

Pompe à Insuline  
**t:slim X2**

## MISES À JOUR LOGICIELLES Nouvelles fonctionnalités

MAT-0243\_1

### **IMPORTANT**

Demandez à votre professionnel de santé comment utiliser les fonctionnalités mises à jour de la pompe pour gérer votre diabète.

Découvrez les nouveautés et les changements dans chaque version mise à jour du logiciel. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces fonctionnalités,

reportez-vous au guide de l'utilisateur de la pompe t:slim X2.

## Fonctionnalités mises à jour pour la version 7.10 du logiciel


### TECHNOLOGIE CONTROL-IQ+

Cliquez sur les onglets ci-dessous pour en savoir plus sur les nouveautés concernant les fonctionnalités Bolus prolongé et Débit temp. :

#### BOLUS PROLONGÉ

#### DÉBIT TEMP.

La fonctionnalité **Bolus prolongé** peut désormais être configurée pour une durée maximale de 8 heures lorsque la technologie Control-IQ+ est activée. Auparavant, elle ne pouvait être définie que pour une durée maximale de 2 heures.

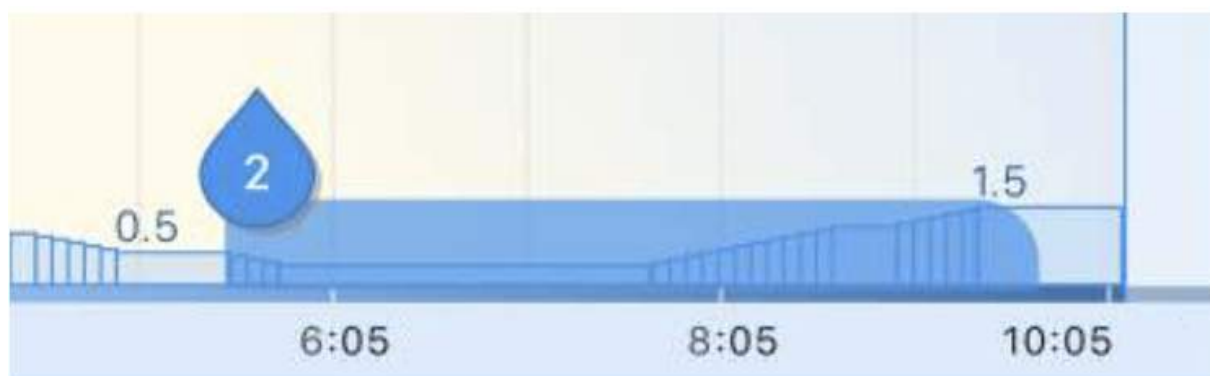


La fonctionnalité **Débit basal temporaire** peut désormais être configurée pour être utilisée lorsque la technologie Control-IQ+ est activée, même pendant l'activité Sommeil ou Exercice.

**REMARQUE :** L'administration d'insuline continuera à s'ajuster automatiquement en fonction des valeurs de glucose prédites pendant l'utilisation d'un débit temporaire lorsque la technologie Control-IQ+ est activée.

---

**Voici un exemple :**

Un débit temporaire a été défini sur 0 unité de 9 h 30 à midi. Comme une hausse du glucose a été prédite, le débit basal a augmenté et deux AutoBolus ont été administrés.

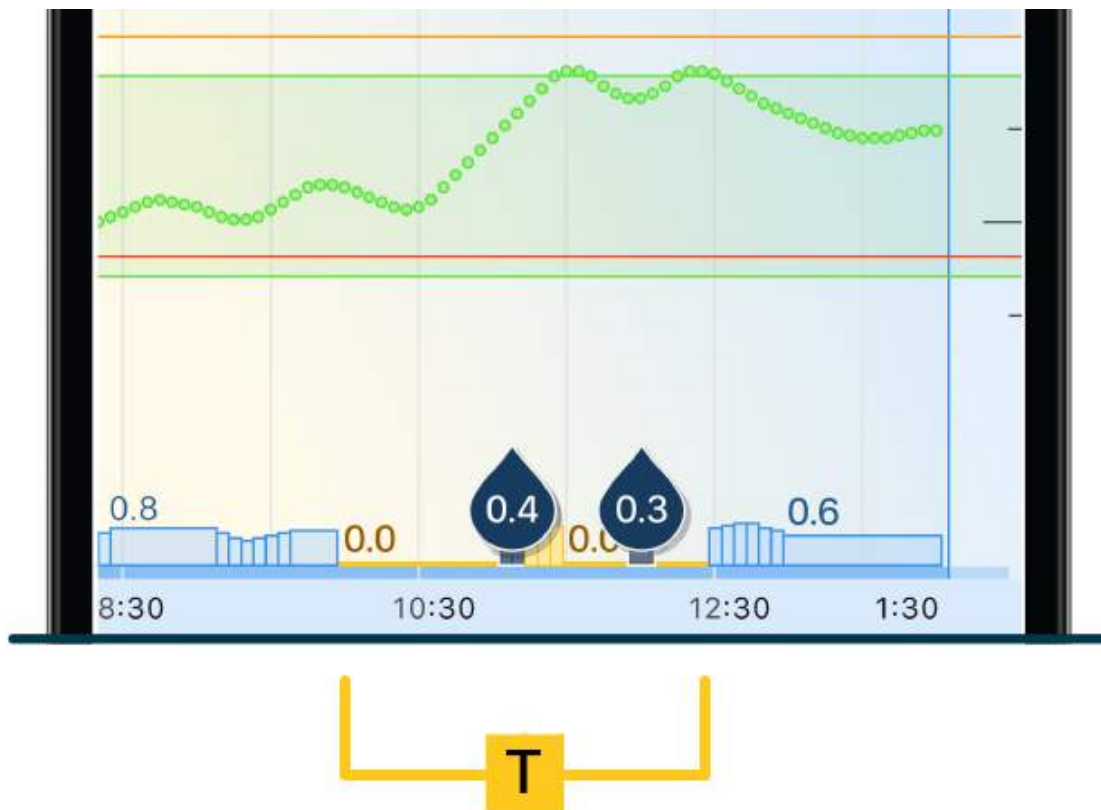

## Fonctionnalités mises à jour pour la version 7.7 du logiciel

Cliquez sur les onglets ci-dessous pour en savoir plus sur les nouveautés :

**SOMMEIL ET EXERCICE**

**MINUTEUR D'ACTIVITÉ  
D'EXERCICE**

**ALARME ARRÊT  
AUTOMATIQUE**

Basculer entre les activités **Sommeil** et **Exercice** est maintenant plus simple. Vous pouvez désormais DÉMARRER une activité sans devoir ARRÊTER une autre activité en cours.



**SOMMEIL ET EXERCICE**

**MINUTEUR D'ACTIVITÉ  
D'EXERCICE**

**ALARME ARRÊT  
AUTOMATIQUE**

La fonctionnalité **Minuteur d'activité d'exercice** est désormais disponible et peut être configurée sur une valeur comprise entre 30 minutes et 8 heures. Appuyez sur le bouton ON pour voir l'option permettant de définir un minuteur pour l'activité Exercice.



SOMMEIL ET EXERCICE

MINUTEUR D'ACTIVITÉ  
D'EXERCICE

ALARME ARRÊT  
AUTOMATIQUE

Si l'alarme **Arrêt automatique** est activée, le minuteur se réinitialise désormais lors de l'administration d'un bolus ou de l'ouverture d'une notification à partir de l'application mobile Tandem t:slim.




## Fonctionnalités mises à jour pour la version 7.6

Cliquez sur les onglets ci-dessous pour en savoir plus sur les nouveautés :

## ALARME REPRISE POMPE

## ICÔNES DE BOLUS

Si vous ARRÊTEZ manuellement l'administration d'insuline sur votre pompe, vous pouvez configurer un rappel pour reprendre l'administration d'insuline au bout de 15 minutes ou plus. Choisissez une valeur de minuteur de 15, 30, 45 ou 60 minutes. Appuyez sur **15 min.** pour voir les autres options de temps.

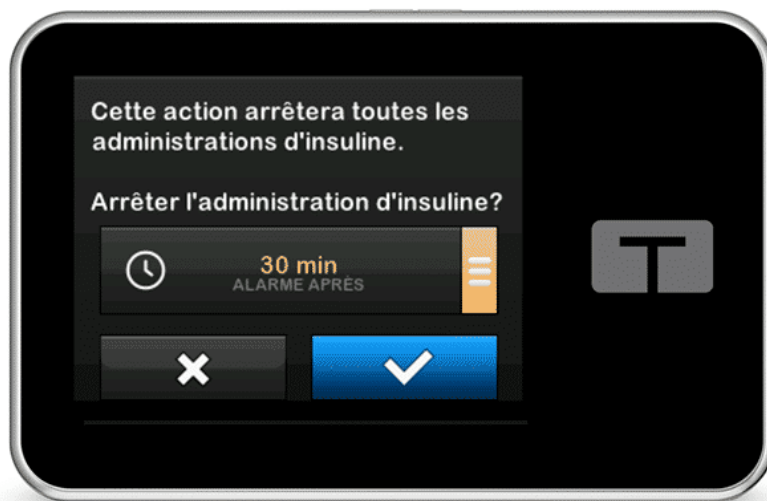

ALARME REPRISE POMPE

ICÔNES DE BOLUS

Des **icônes de bolus** s'affichent désormais sur le graphique de MCG après l'administration d'un bolus. Trois types d'icônes peuvent s'afficher en fonction du type de bolus administré.



 Standard/Correction

 Auto Bolus

 Extended Bolus



**Rappel de bolus supplémentaire**

## Quantités de remplissage de la canule

Les options de quantité de remplissage sont désormais alignées sur le mode d'emploi des différents kits de perfusion. Le mode d'emploi se trouve dans toutes les boîtes de kits de perfusion.

Pour les doses de bolus supérieures à 25 unités, une alerte s'affiche désormais après l'administration des 25 premières unités pour vous inviter à administrer la quantité requise restante. Vous avez 10 minutes pour accepter la demande.



Ce produit peut ne pas vous convenir. Toujours lire et respecter les instructions figurant sur l'étiquette.

**Informations de sécurité :** [tandemdiabetes.com/safetyinfo](https://tandemdiabetes.com/safetyinfo)

© 2025 Tandem Diabetes Care, Inc. Tous droits réservés. Tandem Diabetes Care, les logos Tandem, Control-IQ+ et t:slim X2 sont des marques déposées ou des marques commerciales de Tandem Diabetes Care, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les marques tierces appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
MAT-0243\_1

Les images sont représentatives. Votre produit peut avoir une apparence différente.