


NAALDVERBERGER

VOOR GEBRUIK MET HUMATROPE® PATRONEN

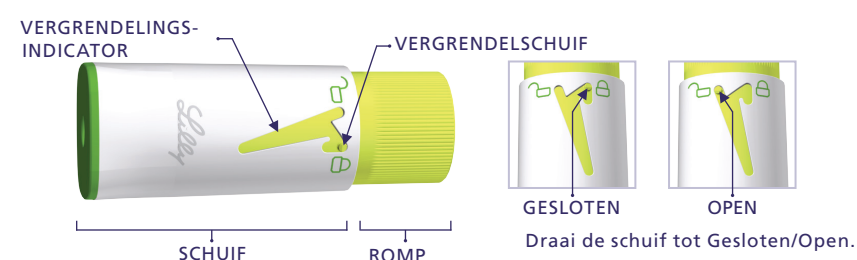

Lilly

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

BEVESTIGEN EN GEBRUIK VAN DE NAALDVERBERGER

De Naaldverberger geeft u de mogelijkheid om te injecteren zonder dat de naald zichtbaar is. Wees er zeker van dat de Pen is klaargemaakt zoals in de gebruikershandleiding van de Pen is aangegeven.

Welke soorten naalden kunnen worden gebruikt met de naaldverberger?

- Pennaalden zijn niet inbegrepen. Het kan zijn dat u een recept nodig heeft om pennaalden bij de apotheek te verkrijgen.
- Pennaalden van Becton, Dickinson and Company worden aanbevolen voor gebruik met de HumatroPen®
- Het gebruik van de naaldverberger met uw HumatroPen is optioneel. Als u de naaldverberger gebruikt met uw HumatroPen, moet u een naaldlengte van 5 mm of langer te gebruiken.
- Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige welke naalddikte en naaldlengte het beste voor u is.

- 1 Wees er zeker van dat de pendop verwijderd is. Bevestig een nieuwe naald en verwijder de buitenste en binnenste naaldbeschermers.

- 2 Bevestig dat de naaldverberger in de "gesloten" positie staat. Zo niet, zet de naaldverberger dan op slot door de schuif te draaien, niet drukken, naar "gesloten" zoals is aangegeven.




- 3 Plaats de patroon, met de naald erop bevestigd, met wat druk recht in de naaldverberger totdat deze niet meer verder kan. Draai de pen naar uw gebruikelijke dosering. Wees voorzichtig om prikken aan de naald te voorkomen.



- 4 Ontgrendel de naaldverberger door de schuif met de klok mee te draaien totdat de naaldverberger in de "open" positie staat, zoals is aangegeven. Druk niet op de schuif om prikken aan de naald te voorkomen als de ontgrendelschuif op "open" staat.



- 5 Injecteer de Humatrope zoals is aangegeven door uw arts, apotheker of verpleegkundige. Plaats eerst de naald in een hoek van 90° door deze in de huid te drukken. De schuif schuift over de romp van de naaldverberger als de naald is geplaatst. Druk dan op de injectieknop. De naaldverberger zal automatisch sluiten als u de naald uit de huid verwijdert.

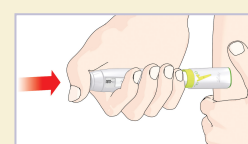

- 6 Bevestig dat de naaldverberger terug is in de "gesloten" positie. Trek voorzichtig de naaldverberger er recht af en verwijder deze van de pen.

Verwijder de naald en gooi deze weg zoals is aangegeven door uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Plaats de pendop terug op de pen.

Vervuilde delen kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek. GEBRUIK GEEN alcohol of andere schoonmaakmiddelen..



CE

0344

Eli Lilly and Company
Pharmaceutical Delivery Systems
639 S Delaware St,
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, USA

Importeur:
Lilly S.A.
Avenida Industria 30
28108 Alcobendas
Madrid, Spanje

EC REP

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
Nederland

Humatrope® en HumatroPen® zijn handelsmerken van Eli Lilly and Company.

© 2008, 2018 Eli Lilly and Company. Alle rechten voorbehouden.

Datum van herziening van het document: april 2018

Lilly

Lilly

PA0095PEZ02